

BIOPLAST® / BIOPLAST® Color / BIOPLAST® Multicolor

Verarbeitungshinweise

- Beschreibung:** BIOPLAST® ist ein weichelastisches, gummiähnliches Tiefziehmaterial aus Ethylvinylacetat (EVA), das sich nicht mit Autopolymerisat verbindet. Ein Vortrocknen des Materials vor dem Tiefziehen ist nicht notwendig, da es nicht hygroskopisch ist. BIOPLAST® ist nach den internationalen Normen ISO 10993 und ISO 7405 zellbiologisch geprüft und freigegeben.
- Indikation:** Dublierformen für Gipssituationsmodelle, Sportmundschutz, Knirscherschutz, Positioner, OSAMU-Retainer®.
- Modellvorbereitung:** Je nach Situation starke Unterschnitte vor dem Tiefziehvorgang mit BLUE-BLOKKER® ausblocken. Zur Isolierung das Modell einmalig mit BIOPLAST®-Isoliermittel (REF 3189/3166) benetzen und dabei darauf achten, dass sich das Isoliermittel weder in den Vertiefungen ansammelt noch eintrocknet.
- Tiefziehen:** Zahnkränze sollten grundsätzlich auf der Modellstützplatte und Vollmodelle im Granulat tiefgezogen werden. Um ein Anhaften von Granulat und den damit einhergehenden Granulatverlust zu verringern, empfiehlt sich die Verwendung der Granulatabdeckung (REF 3006 groß/REF 3007 klein).
- Ausarbeiten:** Die Schiene kann mit der SD-Folienschere A (REF 3460) oder B (REF 3461) auf die finale Länge gekürzt werden. Für die Ausarbeitung haben sich sowohl BIOPERM-Trimmer (REF 3226), DIMO®PRO (REF 3381) und DIMO®PRO SLIM (REF 3376) als auch POLYFIX (REF 3371) bewährt. Für ein optimales Polierergebnis ist der OSAMU-Polierer (REF 3247) bei einer Umdrehungszahl von 5.000 – 10.000 U/Min. ideal.
- Reinigung/Pflege:** Zum Reinigen von Schienen aus BIOPLAST® sind unsere CETRON® Reinigungs- und Pflegeprodukte die beste Wahl. Ausführliche Herstelleranleitungen zu den jeweiligen Anwendungen befinden sich auf unserer Homepage unter www.scheu-dental.com/service.
- Lagerung:** Vor Sonnenlicht schützen. Trocken aufbewahren.

Lieferprogramm:

BIOPLAST®		125 mm Ø
1,0 mm		REF 3270
1,5 mm		REF 3183
2,0 mm		REF 3185
3,0 mm		REF 3187
4,0 mm		REF 3188
5,0 mm		REF 3374

BIOPLAST® Color		125 mm Ø
3,0 mm	rot	REF 3282
3,0 mm	blau-transparent	REF 3356
3,0 mm	rot-transparent	REF 3355
3,0 mm	weiß	REF 3445
3,0 mm	schwarz	REF 3448
3,0 mm	neonrot	REF 3352
3,0 mm	neongrün	REF 3353
3,0 mm	azurblau	REF 3354
3,0 mm	Color-Set	REF 3271

BIOPLAST® Multicolor		125 mm Ø
3,0 mm	Germany	REF 3390
3,0 mm	France	REF 3391
3,0 mm	Italy	REF 3392
3,0 mm	Spain	REF 3393
3,0 mm	Sweden	REF 3394
3,0 mm	Brazil	REF 3395
3,0 mm	Transylvania	REF 3396
3,0 mm	Atlantis	REF 3397
3,0 mm	White Dots	REF 3398
3,0 mm	Green Dots	REF 3399
3,0 mm	Multicolor-Set	REF 3400



CE 0044



SCHEU-DENTAL GmbH
www.scheu-dental.com

Am Burgberg 20
58642 Iserlohn · Germany

phone +49 2374 9288-0
fax +49 2374 9288-90

Facebook
scheu.dental

SCHEU GROUP

DE/GB 30.000/12/20 G REF PM023.01



Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban