

Bechtozid plus, Fertiglösung

Anwendungsbereich

Pumpspray für die schnelle Flächendesinfektion aller alkoholresistenten Medizinprodukte, z.B. Behandlungstühle, Behandlungseinheiten ect. Besonders geeignet für die optimale Hygiene bei Patientenwechsel. Materialschonend (Röhm-Test: 12/2006). Gelistet bei der VAH.

Anwendung

Bechtozid plus auf ein sauberes Tuch sprühen und damit die kontaminierte Oberfläche abwischen.

Wirkungsspektrum / Eigenschaften

- umfassende und sichere mikrobizide Wirkung
- wirkt bakterizid (einschl. MRSA) und fungizid in 1 Minute
- wirkt tuberkulozid (*M.terrae*) in 5 Minuten
- inaktiviert HBV/HCV/HIV/BVDV/Vaccinia -Viren in 1 Minute
- materialschonend (Röhm-Test: 12/2006)
- phenol- und aldehydfrei
- parfümfrei oder mit frischem Citrusduft
- biologisch abbaubar
- pH-Wert: <10,0



Zusammensetzung

100 g Bechtozid plus enthalten:

- 250 mg Benzyl-C12-C16-alkyldimethyl-Chlorid
- 250 mg Didecyldimethylammoniumchlorid
- 250 mg C12-C14[(ethylphenyl)methyl]di-methyl-Chlorid
- 20 g Ethanol
- 10 g 1-Propanol

Haltbarkeit

30 Monate

Klassifizierung

Medizinprodukt, Klasse IIa, Regel 15,
EG-Zertifikat: G1 17 09 49628 010,
TÜV SÜD Product Service GmbH, München

Lieferform

REF 544.N Flasche mit 1 Liter gebrauchsfertiger Lösung, duftneutral, wiederbefüllbar

REF 544 Flasche mit 1 Liter gebrauchsfertiger Lösung, mit Citro Duft, wiederbefüllbar

REF 544.5 Kanister mit 5 Liter gebrauchsfertiger Lösung, mit Citro Duft

REF 544.10N Kanister mit 10 Liter gebrauchsfertiger Lösung, duftneutral

REF 544.10 Kanister mit 10 Liter gebrauchsfertiger Lösung, mit Citro Duft

Zubehör

REF 544.SP Sprühkopf für 1 Liter Flasche

REF 567.5 Dosierpumpe für 5 und 10 Liter Kanister

REF 567.51 Ausgießer für 5 und 10 Liter Kanister



Hersteller

Alfred Becht GmbH,
Carl-Zeiss-Str. 16,
D-77656 Offenburg,
Tel.: +49 781 60586-0,
Fax.: +49 781 60586-40,
www.becht-online.de