

ProphyRepair, Prophylaxepaste RDA 34

Anwendungsbereich

All-in-one Prophylaxepaste für die Reinigung, Politur und Remineralisierung des Zahnschmelzes in einem Arbeitsgang. ProphyRepair ist eine progressive Prophylaxepaste. Sie enthält Silikate, die sich bei der Anwendung von grob (Reinigung) zu fein (Politur) verändern. Das Plus an Hydroxylapatit stärkt den Zahnschmelz und vervollständigt eine professionelle Behandlung.

Anwendung

Nach der Zahnsteinentfernung ProphyRepair in ein Dappenglas oder ein vergleichbar geeignetes Behältnis geben. Eine kleine Menge Paste dann mit dem Gummikelch oder der Polierbürste aufnehmen und in das Arbeitsgebiet einbringen. Darauf achten, dass das Winkelstück erst in Gang gesetzt wird, wenn der Polierer die Zahnoberfläche berührt. Mit langsamen Umdrehungen und wenig Druck den Polierer über die Zahnoberfläche und unter den losen Zahnfleischsaum führen. Die Behandlung mit frischer Paste wiederholen, bis alle Zahnoberflächen sorgfältig gereinigt und poliert sind. Danach gründlich ausspülen.

Wirkungsspektrum / Eigenschaften

- RDA 34
- wasserlöslich
- schäumt nur leicht auf
- Minz-Geschmack
- vegan, lactosefrei
- gluten- und phthalatfrei

Zusammensetzung

- amorphes Siliciumdioxid
- Polyethylenglykol
- Paraben
- Hydroxylapatit
- Aromastoffe



Lieferform

REF 486 Tube mit 95 g

Haltbarkeit

48 Monate

Klassifizierung

Medizinprodukt, Klasse I, Regel 5,

Zubehör

Kelchbürsten, 4 mm, montiert für Winkelstück

REF 260.21 weiß, mit Naturborsten

REF 260.2N weiß, mit Nylonbesatz, weiß

REF 260.240N blau, mit Nylonbesatz

REF 260.250N pink soft, mit Nylonbesatz

REF 260.260N weiß soft, mit Nylonbesatz



Hersteller

Alfred Becht GmbH

Carl-Zeiss-Str. 16

D-77656 Offenburg

Tel.: +49 781 60586-0

Fax.: +49 781 60586-40

www.becht-online.de

Prophylaxepolierer, latexfrei

REF 200.1, 200.2, 200.3 zum Aufschrauben

REF 202.1, 202.2, 202.3 zum Aufstecken

REF 204.1, 204.2, 204.3 montiert für Winkelstück

