

Prophylaxepolierer latexfrei

Anwendungsbereich

Latexfreie Prophylaxepolierer mit Lamellen für eine gründliche Reinigung und Politur. In unterschiedlichen Ausführungen und Härtegraden verfügbar (blau/weich, lila/mittel, gelb/hart). Ein Spritzschutz an der Schulter der Polierer verhindert zusätzlich das Eindringen von Polierpaste in das Winkelstück.

Anwendung

Prophylaxepolierer werden auf ein zahnärztliches Handstück montiert und immer mit einer Prophylaxepaste verwendet. Nach dem Auftragen der Paste auf den Kelch oder direkt auf den Zahn wird das zahnärztliche Winkelstück in rotierende Bewegung versetzt und auf dem zu reinigenden Zahn aufgesetzt.

Wirkungsspektrum / Eigenschaften

- BLAU: weich, zum Entfernen von Zahnbelag und zum Polieren, dies insbesondere in Sulcusnähe zur Schonung der Weichgewebe
- LILA: mittel, universell einsetzbar zum Reinigen und Polieren
- GELB: hart, zum Entfernen von starkem Zahnbelag
- Becht Prophylaxepolierer sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt und werden unsteril ausgeliefert
- maximale Arbeitsgeschwindigkeit: 2500 upm.
- latexfreie Polierer zeichnen sich durch ein besonders strapazierfähiges Material mit niedrigem Reibungskoeffizienten aus, wodurch es zu nur geringer Erwärmung am Zahn kommt



Haltbarkeit

60 Monate

Lieferform

REF 200.1	blau, zum Aufschrauben
REF 200.3	lila, zum Aufschrauben
REF 200.2	gelb, zum Aufschrauben
REF 202.1	blau, zum Aufstecken
REF 202.3	lila, zum Aufstecken
REF 202.2	gelb, zum Aufstecken
REF 204.1	blau, montiert für Winkelstück
REF 204.3	lila, montiert für Winkelstück
REF 204.2	gelb, montiert für Winkelstück

Zubehör

REF 480	ProfiGuard RDA 250
REF 481	ProfiPolish RDA 40
REF 486	ProphyRepair progressive Prophylaxepaste, End-RDA 34



Klassifizierung

Medizinprodukt der Klasse IIa, Regel 5, RL 93/42/EW
EG Zertifikat: HD 601390530001,
TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Nürnberg

Hersteller

Alfred Becht GmbH,
Carl-Zeiss-Str. 16,
D-77656 Offenburg,
Tel.: +49 781 60586-0,
Fax.: +49 781 60586-40,
www.becht-online.de