



## Gebrauchsanleitung **STRAHLENSCHUTZSCHILD SS4**

**Anwendungsbereich:** intraorale Röntgenaufnahmen // Schutz bei Zahnaufnahmen  
Entspricht DIN EN 61331-3 // Pb 0,6mm



**Aufbewahrung:** Keinen extremen Temperaturunterschieden aussetzen (Hitze; Frost)  
Lagern sie den Schild möglichst sturzsicher in Gebrauchsnähe,  
z.B. in der optionalen Wandhalterung

**Anwendung:** Der Handgriff wird in die am Schild befindliche Lasche eingesetzt.  
(Rundung des Griffs in die Lasche an der Außenseite des Schildes)  
Der Schild wird unter dem Kinn gehalten, parallel zur Kaufläche.  
Achten Sie darauf, dass der Ausschnitt dicht am Hals anliegt.



**Reinigung:** abwaschbar und unempfindlich gegen Chemikalien