

**BIOSTAR®**



**MINISTAR S®**



## Übersichts- und Indikationstabelle zu Tiefziehenanwendungen

| Indikationsbereich (alphabetisch)                              | Produkt                                  | empfohlene Stärke      |
|--|--|------------------------|
| Aligner  | CA® Folie                                | 0,4 – 0,75 mm          |
|  | CA® Pro                                  | 0,5 – 0,75 mm          |
|  | CA® Pro+                                 | 0,5 – 0,75 mm          |
|  | DURAN®                                   | 0,4 – 0,75 mm          |
|  | DURAN®+                                  | 0,4 – 0,75 mm          |
| Ätzmaske   | COPYPLAST®                               | 1,0 mm                 |
| Aufbisssschiene / Knirscherschiene / Miniplast-Schiene         | DURAN®                                   | 1,0 – 1,5 mm           |
|  | DURAN® +                                 | 1,0 – 1,5 mm           |
|  | DURASOFT® pd optional mit DURASOFT® seal | 1,8 mm                 |
| Bissnahme, Bissregistrare                                      | IMPRELON® weiß, klar                     | 2,0 / 3,0 mm           |
| Bleichschiene  | BIOPLAST® bleach                         | 1,0 mm                 |
|  | COPYPLAST®                               | 1,0 mm                 |
| Bracket-Transfermaske  | COPYPLAST®                               | 0,5 / 0,75 mm          |
| Dublierformen für Situationsmodelle                            | BIOPLAST® (Gips)                         | mind. 3,0 mm           |
|  | COPYPLAST® (Kunststoff)                  | 2,0 mm                 |
| Expansions-Aligner   | DURAN® / VECTOR® 40/45                   | 0,75 mm                |
|  | CA® Folie / VECTOR® 40/45                | 0,75 mm                |
| Fluoridierungsschiene  | DURAN®                                   | 1,0 / 1,5 mm           |
|  | DURAN®+                                  | 1,0 / 1,5 mm           |
| Gießmasken für provisorische Kronen und Brücken                | COPYPLAST®                               | 0,5 – 2,0 mm           |
| Gusskäppchen   | HARDCAST®                                | 0,4 / 0,6 / 0,8 mm     |
| Immediatprothese / Interimsprothesen                           | BIOCRYL® C (rosa / klar)                 | 2,0 / 3,0 mm           |
| Röntgenschiene / Röntgenschiene                                | DURAN®                                   | 2,0 / 3,0 mm           |
|  | DURAN®+                                  | 2,0 mm                 |
| Individuelle Löffel, Abdrucklöffel, Funktionslöffel            | IMPRELON® (klar)                         | 2,0 / 3,0 mm           |
|  | IMPRELON® (natur)                        | 3,0 mm                 |
| Retainer   | DURASOFT® pd mit DURASOFT® seal          | 1,2 mm                 |
|  | DURAN®                                   | 0,75 – 1,0 mm          |
|  | DURAN®+                                  | 0,75 – 1,0 mm          |
|  | IMPRELON®S pd                            | 0,5 – 1,0 mm           |
|  | COPYPLAST® C                             | 1,0 mm                 |
| KFO-Korrekturschiene   | DURAN®                                   | 0,4 – 0,75 mm          |
|  | DURAN®+                                  | 0,4 – 0,75 mm          |
| Isolierfolie / Unterziehfolie / Platzhalterfolie               | ISOFOLAN®                                | 0,1 mm                 |
| Kosmetische Schiene  | DURAN®+ A2                               | 0,5 – 0,75 mm          |
|  | DURAN®+ white pd                         | 0,5 – 1,0 mm           |
| Modellschutz / Schutzüberzug / Skin-Verpackung                 | Kaschierfolie                            | 0,15 mm                |
| OSAMU-Retainer® (Kombination aus BIOPLAST® und IMPRELON®S pd)  | BIOPLAST®                                | 1,5 mm                 |
|  | IMPRELON®S pd mit OSAMU-Bond             | 0,75 mm                |
| Platzhalterfolie für Gusskäppchen                              | Platzhalterfolie                         | 0,1 mm                 |
| Platzhalter für Bleichschiene                                  | HARDCAST®                                | 0,4 / 0,6 / 0,8 mm     |
|  | COPYPLAST®                               | 0,5 / 0,75 mm          |
| Positioner   | BIOPLAST®                                | 2,0 – 5,0 mm           |
| Retentionsschiene / Langzeitretainer                           | CA® Retentionsfolie pd                   | 0,75 / 1,0 mm          |
|  | COPYPLAST® C                             | 1,0 mm                 |
|  | DURAN®                                   | 1,0 mm                 |
|  | DURAN®+                                  | 1,0 mm                 |
|  | IMPRELON®S pd                            | 0,75 / 1,0 mm          |
| Retainer / KFO-Dehnplatten                                     | BIOCRYL® C                               | 2,0 mm / für UK 3,0 mm |
| Röntgenopake Schiene   | BIOCRYL® Form X                          | 1,5 mm                 |
| Schiene-Provisorien / Stripkronen für prov. Kronen und Brücken | DURAN®                                   | 0,5 mm – 1,0 mm        |
|  | DURAN® +A2 pd                            | 0,5 – 0,75 mm          |
| Schnarchtherapieschiene  | DURAN®                                   | 2,0 mm                 |
|  | DURAN®+                                  | 2,0 mm                 |
|  | DURASOFT® pd mit DURASOFT® seal          | 1,8 / 2,5 mm           |
| Sport-Mundschutz   | BIOPLAST®                                | 1,0 – 5,0 mm           |
|  | BIOPLAST® XTREME / XTREME PRO            | 4,0 / 5,0 mm           |
| Therapieplanungsfolie / Bruxismus-Analyse                      | BRUX CHECKER®                            | 0,1 mm                 |
| Verbandplatte  | DURAN®                                   | 1,0 mm                 |
|  | DURAN®+                                  | 1,0 mm                 |

| Materialeigenschaft            | Verbund mit Acrylat | empfohlenes Acrylat          | empfohlene Isolierung / Sonstiges           |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------|---|
| hartelastisch                  | nicht indiziert     |                              | ISOFOLAN® Folie                             |
| hartelastisch                  | nicht indiziert     |                              | ISOFOLAN® Folie                             |
| hartelastisch                  | nicht indiziert     |                              | integriert                                  |
| hartelastisch                  | nicht indiziert     |                              | ISOFOLAN® Folie                             |
| hartelastisch                  | nicht indiziert     |                              | integriert                                  |
| zähelastisch                   | nein                |                              | Modell kurz wässern oder Platzhalterfolie   |
| hartelastisch                  | ja                  | DURASPLINT® / DURASPLINT® LC | ISOFOLAN® Folie                             |
| hartelastisch                  | ja                  | DURASPLINT® / DURASPLINT® LC |   |
| hart / weiche Folie            | ja                  | DURASPLINT®                  | ISOFOLAN® Folie                             |
| fest, nicht elastisch          | ja                  | DURASPLINT®                  | ISOFOLAN® Folie                             |
| weichelastisch                 | nein                |                              | BIOPLAST® Isoliermittel od. kurz wässern *  |
| zähelastisch                   | nein                |                              | Modell kurz wässern oder Platzhalterfolie * |
| zähelastisch                   | nein                |                              | Modell kurz wässern oder Platzhalterfolie   |
| weichelastisch                 | nein                |                              | BIOPLAST® Isoliermittel od. kurz wässern    |
| zähelastisch                   | nein                |                              | Modell kurz wässern oder Platzhalterfolie   |
| hartelastisch                  | ja                  | BIOCRYL® Resin               | ISOFOLAN® Folie                             |
| hartelastisch                  | ja                  | BIOCRYL® Resin               | ISOFOLAN® Folie                             |
| hartelastisch                  | ja                  |                              | BIOPLAST® als Platzhalter / Reservoir       |
| hartelastisch                  | ja                  |                              | BIOPLAST® als Platzhalter / Reservoir       |
| zähelastisch                   | nein                |                              | Modell kurz wässern oder Platzhalterfolie   |
| zähelastisch                   | nein                |                              | Platzhalterfolie                            |
| schlagzäh                      | ja                  | BIOCRYL® RESIN               | ISOFOLAN® Folie                             |
| hartelastisch                  | ja                  | DURASPLINT® / DURASPLINT® LC | ISOFOLAN® Folie                             |
| hartelastisch                  | ja                  | DURASPLINT® / DURASPLINT® LC |   |
| fest, nicht elastisch          | ja                  | DURASPLINT®                  | ISOFOLAN® Folie / Schaumstoffscheiben       |
| fest, nicht elastisch          | ja                  | DURASPLINT®                  | ISOFOLAN® Folie / Schaumstoffscheiben       |
| hart / weiche Folie            | ja                  | DURASPLINT® / DURASPLINT® LC | ISOFOLAN® Folie                             |
| hartelastisch                  | ja                  | DURASPLINT® / DURASPLINT® LC | ISOFOLAN® Folie                             |
| hartelastisch                  | ja                  | DURASPLINT® / DURASPLINT® LC |   |
| hartelastisch / schlagzäh      | nicht empfohlen     |                              | ISOFOLAN® Folie                             |
| zähelastisch                   | nein                |                              | Modell kurz wässern oder Platzhalterfolie   |
| hartelastisch                  | ja                  | DURASPLINT® / DURASPLINT® LC | ISOFOLAN® Folie                             |
| hartelastisch                  | ja                  | DURASPLINT® / DURASPLINT® LC |   |
| zähelastische Isolierfolie     | nein                |                              |   |
| hartelastisch                  | ja                  | K+B Material                 |   |
| hartelastisch                  | ja                  | K+B Material                 |   |
| Verbindet sich mit Skin-Karton |                     |                              |   |
| weichelastisch                 | nein                |                              | BIOPLAST® Isoliermittel                     |
| hartelastisch / schlagzäh      | nein                |                              |   |
| harte Isolierfolie             | ja                  |                              |   |
| zähelastisch                   | nein                |                              | Platzhalterfolie                            |
| zähelastisch                   | nein                |                              | Modell kurz wässern oder Platzhalterfolie   |
| weichelastisch                 | nein                |                              | BIOPLAST® Isoliermittel                     |
| hartelastisch                  | nicht indiziert     |                              | ISOFOLAN® Folie                             |
| zähelastisch                   | nein                |                              | Modell kurz wässern oder Platzhalterfolie   |
| hartelastisch                  | nicht indiziert     |                              | ISOFOLAN® Folie                             |
| hartelastisch                  | nicht indiziert     |                              | integriert                                  |
| hartelastisch / schlagzäh      | nicht empfohlen     |                              | ISOFOLAN® Folie                             |
| schlagzäh                      | ja                  | BIOCRYL® RESIN               | ISOFOLAN® Folie                             |
| zähelastisch                   | nein                |                              | Platzhalterfolie                            |
| hartelastisch                  | ja                  | K+B Material                 | ISOFOLAN® Folie                             |
| hartelastisch                  | ja                  | K+B Material                 |   |
| hartelastisch                  | ja                  | DURASPLINT® / DURASPLINT® LC | ISOFOLAN® Folie                             |
| hartelastisch                  | ja                  | DURASPLINT® / DURASPLINT® LC |   |
| hart / weiche Folie            | ja                  | DURASPLINT®                  | ISOFOLAN® Folie                             |
| weichelastisch                 | nein                |                              | BIOPLAST® Isoliermittel                     |
| weichelastisch                 | nein                |                              | BIOPLAST® Isoliermittel                     |
| hartelastisch                  | ja                  | DURASPLINT® / DURASPLINT® LC | ISOFOLAN® Folie                             |
| hartelastisch                  | ja                  | DURASPLINT® / DURASPLINT® LC |   |

\* BLUE-BLOKKER als Platzhalter/Reservoir

# Druckformgeräte

mit besten Eigenschaften.

## MINISTAR

MINISTAR 1992-2003



MINISTAR S 2003-2011



MINISTAR S 2011-2017



MINISTAR S ab 2017



## BIOSTAR

BIOSTAR I 1967-1976



BIOSTAR II 1976-1988



BIOSTAR III 1988-1999



BIOSTAR IV 1999-2006



BIOSTAR V 2006-2009



BIOSTAR VI 2009-2015



BIOSTAR VII ab 2015



**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban