


# TOPDENT Brennset Pro

REF 20510MS

Das intelligente Brennset  
für die Dentalkeramik.

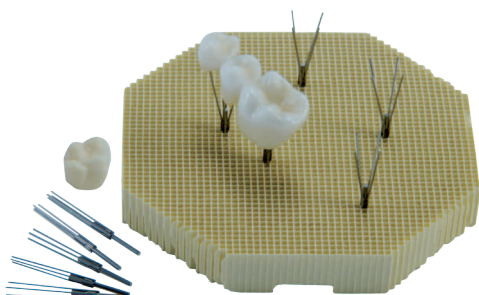

Das Set besteht aus einer formgerechten Wabenplatte, sowie 10 Stück maßgeschneiderten Brennguthaltern „Inlay Pin Pro“.

Die keramische Wabenplatte und die Halter sind Produkte modernster Fertigungstechnik und für Brenntemperaturen bis zu 1200°C geeignet. Sie zeichnen sich durch sehr schnelle Aufheiz- und Abkühlphase aus.

Der Halter „Inlay Pin Pro“ besteht aus vier, fächerförmig aufgespreizten, hitzebeständigen Drähten. Diese dünnen Drahtarme können je nach Bedarf gebogen werden. Dieser Halter wurde speziell zur Aufnahme von Vollkeramik Inlays entwickelt. Das fertig ausgearbeitete Inlay wird glasiert und in den Halter eingelegt.

Tipp: Den Inlay Pin Pro nach dem Auffächern im oberen Bereich wieder etwas nach innen biegen. Somit wird verhindert, dass die Drähte beim Aufsetzen der frisch geschichteten Krone die ungebrannte Keramikmasse beschädigen.

Die maßgeschneiderte Anfertigung garantiert einen vorzüglichen Sitz des Halters in der Wabenplatte und einen ebenso guten Sitz der Zähne/Inlays auf dem Brennguthalter.

Die optimal geformten Brennguthalter erlauben eine energiesparende, dichte Belegung der Wabenplatte und ein schnelles und einfaches Einstellen der Abstände zum Brenngut.



Bitte beachten: Inlay Pins Pro vor dem Erstgebrauch bei 750°C – 1200°C oxidieren. Dabei kann es zu schwarzen Anhaftungen (an den Stellen, an denen die Drähte das Vollkeramikwerkstück berühren) kommen. Diese können – bei Nichtgefallen – mit einem Gummipolierer leicht wieder entfernt werden.

Alle Komponenten sind auch einzeln erhältlich:

Inlay Pin Pro	5 Stück	REF 20511M
Wabenplatte	1 Stück	REF 20507



KENTZLER-KASCHNER DENTAL GMBH  
Geschäftsbereich TOPDENT  
Mühlgraben 36  
73479 Ellwangen/Jagst

Telefon: +49 (7961) 91 26-0  
Fax: +49 (7961) 52031  
info@kkd-topdent.de  
www.kkd-topdent.de

**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban