

# DAS TRIO!

**CLEARFIL MAJESTY™ ES FLOW**



## DREI VISKOSITÄTEN, ANGEPASST AN IHRE BEDÜRFNISSE

Seit 5 Jahren der TOP Award Gewinner - CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow. Unser universelles Komposit CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow ist jetzt in drei verschiedenen Viskositäten erhältlich. Jede dieser Viskositäten kann an Ihre Bedürfnisse angepasst werden und ermöglicht einfache, dauerhafte und ästhetische Restaurationen. CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow ist die perfekte Lösung für ein breites Spektrum von Indikationen.

- ✓ Hervorragende Glanzbeständigkeit
- ✓ Leichte Polierbarkeit
- ✓ Für dauerhafte Restaurationen
- ✓ Breites Indikationsspektrum

**High**

**Low**

**Super Low**

Viskositäten




**HIGH**

- ✓ Ausgezeichnete Benetzbarkeit und Anpassung
- ✓ Als Liner
- ✓ Für kleine Kavitäten



**LOW**

- ✓ Für eine breite Palette von Front- und Seitenzahnrestaurationen




**SUPER LOW**

- ✓ Ideal für den Seitenzahnbereich (z.B. okklusale Fläche, Höcker, usw.)
- ✓ Behält die vorgegebene Form bei


## BREITES INDIKATIONSSPEKTRUM

- ✓ Direkte Restaurationen für alle Restorationsklassen I-V, zervikalen Läsionen (z.B. Wurzel-Oberflächenkaries, keilförmige Defekte), Zahnhartsubstanzverluste (z.B. Abrasion oder Erosion)
- ✓ Kavitätenliner
- ✓ Korrektur von Zahnstellungen oder Zahnformen (z. B. Diastemaschluss, Zahnmissbildungen)
- ✓ Intraorale Reparaturen frakturierter Restaurationen
- ✓ Befestigung von Keramik- und Komposit-Inlays, Onlays und Veneers mit weniger als 2 mm Dicke

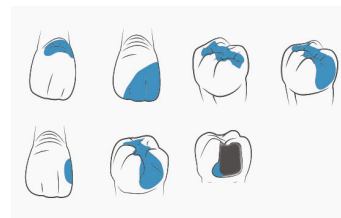

## AUSSERGEWÖHNLICH LEICHT ZU POLIEREN UND NATÜRLICHER GLANZ, DER ÜBER DIE ZEIT ERHALTEN BLEIBT

Millionen von speziellen Submikron-Füllstoffen verbinden sich, dank unseres außergewöhnlichen Silans dauerhaft untereinander. Hierdurch entsteht ein faszinierender Glanz auf der Oberfläche der Restauration, welche dann extrem leicht zu polieren ist. Der Effekt durch die Lichtstreuung spezieller Nanocluster bietet eine außergewöhnliche Farbanpassung und sorgt für hochästhetische Restaurationen.

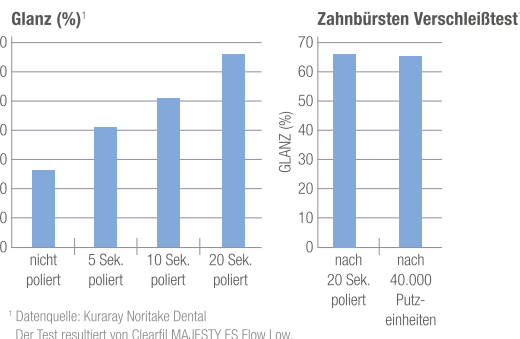

## AUSGEZEICHNETE MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Der proprietäre Silan-Haftvermittler von Kuraray Noritake Dental ermöglicht einen hohen Füllstoffgehalt (bis zu 78 Gew.-%, 64 Vol.-%), um überlegene mechanische Eigenschaften zu erzielen, die ihn sogar für die Seitenzahnrestauration geeignet machen.

	Biegefestigkeit	Druckfestigkeit
Super Low	152 MPa	374 MPa
Low	151 MPa	373 MPa
High	145 MPa	358 MPa

Gemäß ISO 4049:2009. Quelle: Kuraray Noritake Dental Inc.


## ÜBERLEGENES UND EINFACHES HANDLING

Entwickelt mit Blick auf die besten Handhabungseigenschaften. Die Form und Größe der verschiedenen Füllstoffe bieten der Paste überlegene Handlungseigenschaften, die das Handling und die Formgebung verbessern.


- ✓ Klebt nicht am Instrument
- ✓ Reduzierte Luftblasenbildung durch die kontrollierte Applikation durch einen O-Ring in der Spritze

## VERFÜGBARE FARBEN

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low

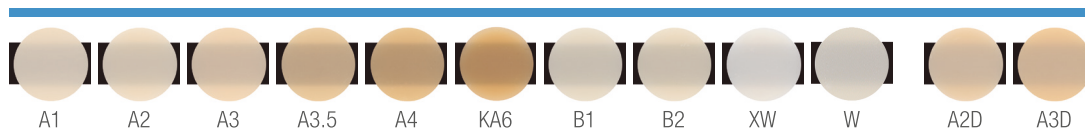

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Super Low

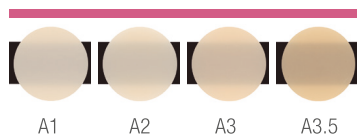

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow High



## PRODUKTSORTIMENT CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow

ART. NR	INHALT
#3341-EU	<b>Super Low (A1)</b> 1 Spritze (2.7g/1.5ml), 15 Applikationsspitzen
#3342-EU	<b>Super Low (A2)</b> 1 Spritze (2.7g/1.5ml), 15 Applikationsspitzen
#3343-EU	<b>Super Low (A3)</b> 1 Spritze (2.7g/1.5ml), 15 Applikationsspitzen
#3344-EU	<b>Super Low (A3.5)</b> 1 Spritze (2.7g/1.5ml), 15 Applikationsspitzen
#3301-EU	<b>Low A1</b> 1 Spritze (2.7g/1.5ml), 15 Applikationsspitzen
#3302-EU	<b>Low A2</b> 1 Spritze (2.7g/1.5ml), 15 Applikationsspitzen
#3303-EU	<b>Low A3</b> 1 Spritze (2.7g/1.5ml), 15 Applikationsspitzen
#3304-EU	<b>Low A3.5</b> 1 Spritze (2.7g/1.5ml), 15 Applikationsspitzen
#3305-EU	<b>Low A4</b> 1 Spritze (2.7g/1.5ml), 15 Applikationsspitzen
#3306-EU	<b>Low KA6</b> 1 Spritze (2.7g/1.5ml), 15 Applikationsspitzen
#3307-EU	<b>Low B1</b> 1 Spritze (2.7g/1.5ml), 15 Applikationsspitzen
#3308-EU	<b>Low B2</b> 1 Spritze (2.7g/1.5ml), 15 Applikationsspitzen
#3309-EU	<b>Low XW</b> 1 Spritze (2.7g/1.5ml), 15 Applikationsspitzen
#3310-EU	<b>Low A2D</b> 1 Spritze (2.7g/1.5ml), 15 Applikationsspitzen
#3311-EU	<b>Low A3D</b> 1 Spritze (2.7g/1.5ml), 15 Applikationsspitzen
#3312-EU	<b>Low W</b> 1 Spritze (2.7g/1.5ml), 15 Applikationsspitzen

ART. NR.	INHALT
#3321-EU	<b>High (A1)</b> 1 Spritze (2.7g/1.5ml), 15 Applikationsspitzen
#3322-EU	<b>High (A2)</b> 1 Spritze (2.7g/1.5ml), 15 Applikationsspitzen
#3323-EU	<b>High (A3)</b> 1 Spritze (2.7g/1.5ml), 15 Applikationsspitzen
#3324-EU	<b>High (A2D)</b> 1 Spritze (2.7g/1.5ml), 15 Applikationsspitzen
#3325-EU	<b>High (A3D)</b> 1 Spritze (2.7g/1.5ml), 15 Applikationsspitzen
#3331-EU	<b>Applikationsspitzen (N)</b> 20 Applikationsspitzen

Nachfolger von ES Flow

Neues Design - Gleicher Inhalt!

Mehr Informationen unter [kuraraynoritake.eu/clearfil-majesty-es-flow](http://kuraraynoritake.eu/clearfil-majesty-es-flow)

**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main

Registernummer: HRB 56518

Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban