

# Pflegeanleitung für Ihre Praxiseinheit

Reinigung und Desinfektion mit Produkten  
aus der System-Hygiene von Dürr Dental




FD 312 wet wipes



FD 333 wipes  
FD 366 sensitive wipes



FD 312

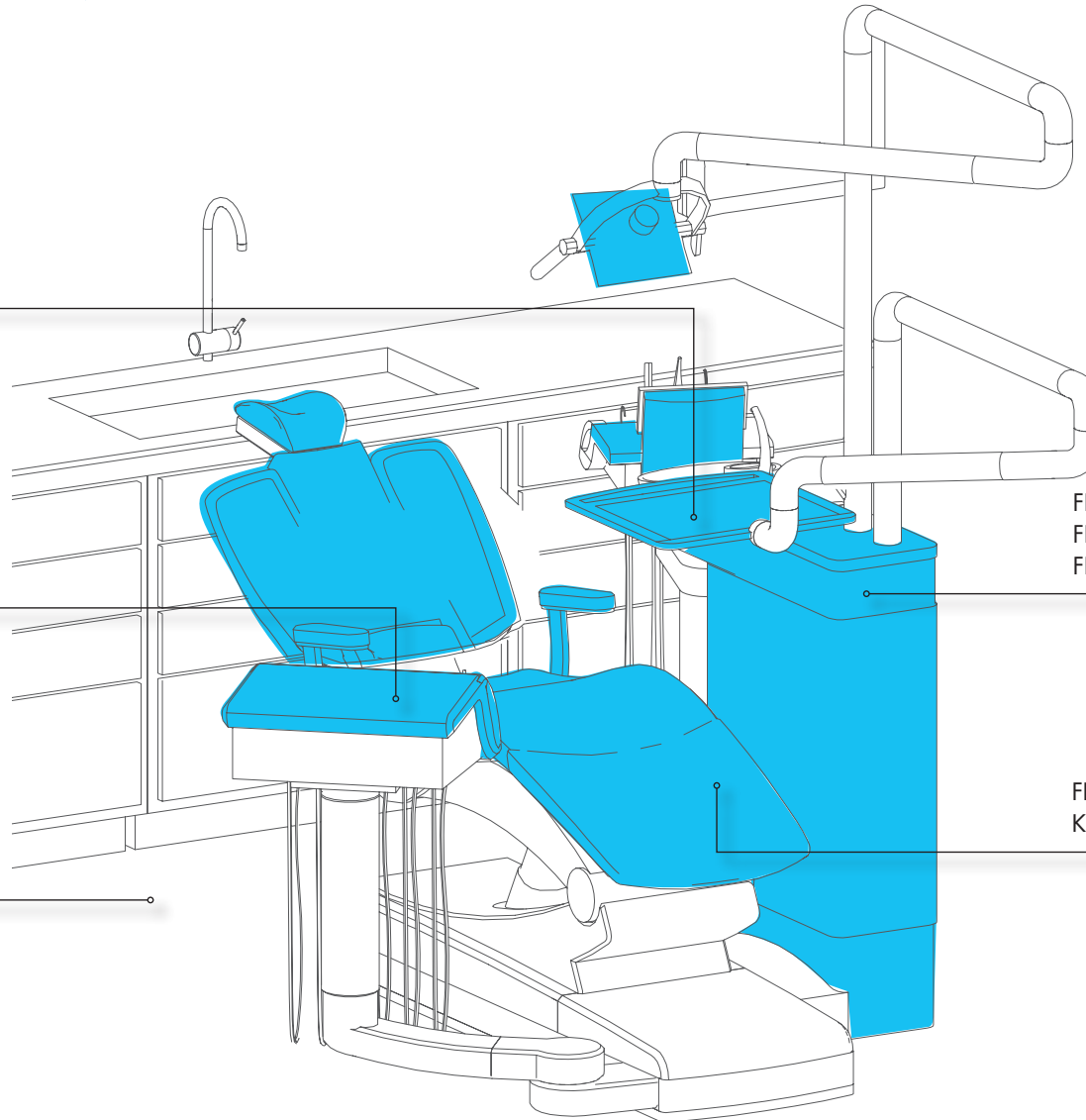

FD 322  
FD 333  
FD 366 sensitive



FD 360  
Kunstlederreiniger



DÜRR DENTAL SE  
Höpfigheimer Str. 17  
74321 Bietigheim-Bissingen  
Germany  
[www.duerrdental.com](http://www.duerrdental.com)  
[info@duerrdental.com](mailto:info@duerrdental.com)

 **DÜRR  
DENTAL**  
DAS BESTE HAT SYSTEM

# Reinigung und Desinfektion der Flächen an Ihrer Praxiseinheit

Bei jeder Behandlung entsteht eine kontaminierte Aerosolwolke, die sich vom Patientenmund mehrere Meter weit in den Praxisraum ausbreitet. Circa 10 - 30 Minuten nach der Behandlung hat sich das Aerosol auf die umliegenden Oberflächen und Gegenstände abgesetzt. Eine tägliche, routinemäßige Reinigung und Desinfektion ist daher unbedingt notwendig.

## 1 Vor dem ersten Patient




Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen im Praxisraum mit den alkoholfreien FD 312 wet wipes

## 2 Nach dem ersten Patient und ...



Reinigung und Desinfektion patientennahe Oberflächen mit den Schnelldesinfektionsmitteln FD 322, FD 333/ FD 333 wipes bzw. FD 366 sensitive/FD 366 sensitive wipes

## ... zwischen allen Patienten

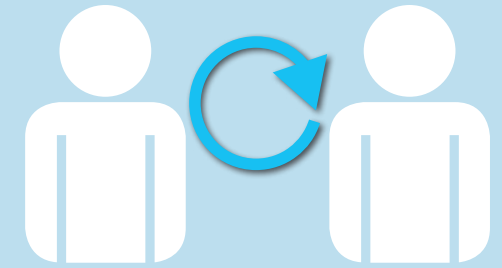


Zum Schutz von Praxisteam und Patient wird zwischen jeder Behandlung routinemäßig gereinigt und desinfiziert

## 3 Nach dem letzten Patient



Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen im Praxisraum mit den alkoholfreien FD 312 wet wipes

## 4 Am Ende des Arbeitstages

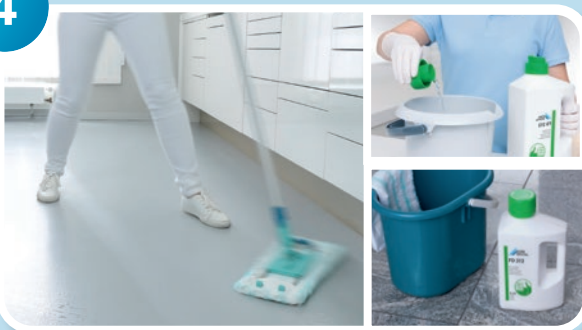

Abschließende Reinigung und Desinfektion des Fußbodens gemäß aktueller Anforderungen des Robert-Koch-Instituts mit FD 312 Flächen-Desinfektion

## Wöchentlich Kunstlederpflege mit FD 360



Wöchentliche Reinigung und Pflege von Behandlungsstühlen aus Kunstleder mit FD 360. Dies sorgt für einen langen Werterhalt der Praxiseinheit.

**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban