

Futurabond® DC

DAS DUALHÄRTENDE SELF-ETCH-BOND
MIT NANOFÜLLERN VERSTÄRKT

Futurabond® DC

DUAL. UNIVERSAL. SICHER.

Ein Bond für alle Fälle

Futurabond DC ist das ideale selbstätzende Bonding zur Anwendung unter allen licht-, selbst-, oder dualhärtenden Füllungsmaterialien für einen starken, dauerhaften Verbund.

Ob Compositefüllungen, Inlays, Onlays, Kronen, Brücken oder Wurzelstifte, Futurabond DC erfüllt die Anforderungen an eine patientengerechte Therapie verschiedenster Indikationen. Haftfestigkeit und Randedichtigkeit sowie schnelle, präzise und einfache Anwendung sind mit Futurabond DC in einem Adhäsiv vereint. Die Gesamtleistung von Futurabond DC wird somit höchsten Anwender- und Patientenansprüchen gerecht.

Futurabond DC kann bei indirekten Restaurationen mit allen dual- und selbsthärtenden Befestigungssystemen ohne vorherige Polymerisation der Adhäsivschicht verwendet werden. Hierdurch entsteht ein deutlicher Vorteil bei schwer licht-zugänglichen Bereichen.

Einmal auftragen – sichere Haftung

Die hochfunktionalisierten SiO₂-Partikel (Ø 20 nm) in Futurabond DC führen zu einer Quervernetzung der


Harzbestandteile des Bondings und verbessern dessen Filmbildungseigenschaften. So kann das Adhäsiv die freigesetzten Kollagenfasern und das mikroretentive Ätzmuster am Schmelz optimal benetzen. Dadurch werden die Vernetzungsdichte und Filmbildungseigenschaften optimiert sowie die Adhäsionsschicht verstärkt.

Ein einmaliges Auftragen des Bondings reicht aus, um einen langfristig stabilen Verbund zwischen Composite und Zahn zu gewährleisten.

Dualhärtend + Self-etch

- Adhäsive Befestigung indirekter Restaurationen
- Adhäsive Stiftbefestigungen
- Adhäsiver Stumpfaufbau
- Keine Überätzung des Dentins
- Keine Kontamination des Ätzmusters
- Kein zu starkes/geringes Trocknen des Dentins

Dentinhaftwerte von chemisch härtenden Befestigungssystemen

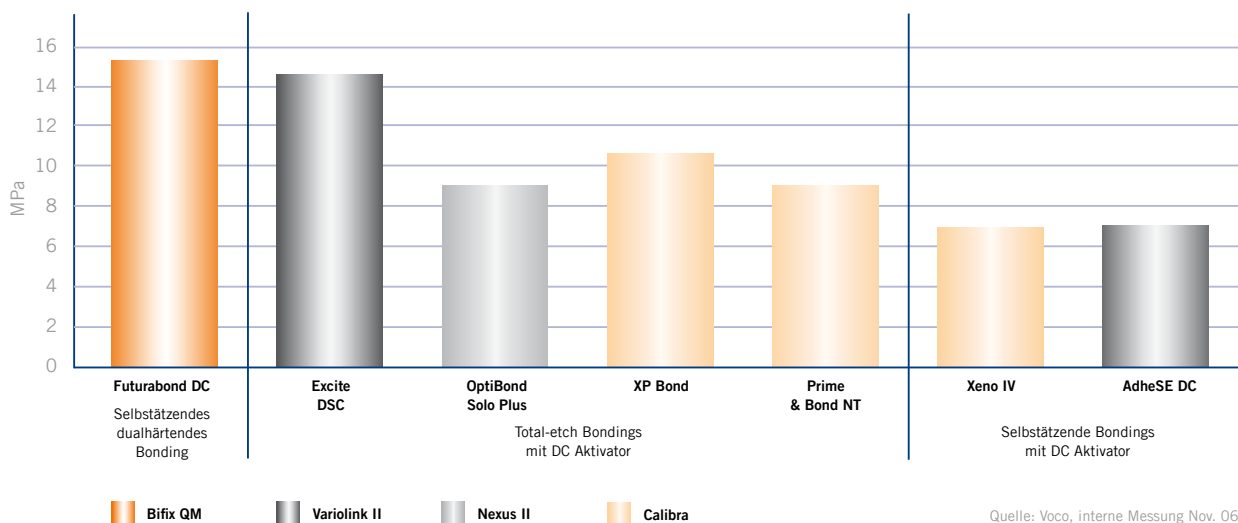

*Xeno IV, Variolink II, Nexus II, Calibra, AdheSE DC, Excite DSC, Optibond Solo Plus, XP Bond und Prime&Bond NT sind keine eingetragenen Warenzeichen der VOCO GmbH.

Futurabond® DC

EINFACHE ANWENDUNG IN NUR 35 SEKUNDEN

Direkte Restauration

Indirekte Restauration

Futurabond® DC

SIE HABEN DIE WAHL

Indikation

Direkte selbst- oder dualhärtende Composite Restaurationen und Stumpfaufbauten

Direkte lichthärtende Restaurationen auf Composite-/Compomer-/Ormocer®Basis

Befestigen von Wurzelstiften mit dual- oder selbsthärtenden Compositezementen

Indirekte Restaurationen; bei Verwendung von dualhärtenden/selbsthärtenden Compositezementen zum Befestigen von Inlays, Onlays, Kronen und Brückenversorgungen

Vorteile der *SingleDose*

- Nur 35 sec. Applikationsdauer
- Ein-Schritt-Aktivierung des Spezialblisters
- Einfach, schnell, hygienisch

Produktvorteile

- Funktioniert mit allen licht-, dual- und selbsthärtenden Composites
- Ideal für Wurzelstiftzementierung
- Hohe Dentin-Scherhaftung
- Dauerhaft randdicht
- Feuchtigkeitstolerant
- Enthält Fluoride
- Reduziert postoperative Sensibilitäten
- Mit Nanopartikeln verstärkt
- Kein Schütteln erforderlich
- „All-in-One“ Universal Adhäsiv



Handelsformen

REF 1163 Flasche 4 ml Liquid 1 / Flasche 4 ml Liquid 2, Zubehör

REF 1164 50 *SingleDose*, Zubehör

REF 1165 200 *SingleDose*, Zubehör

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Deutschland

Tel.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-109

info@voco.de
www.voco.de

Zu beziehen durch:

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban