

ZAHNERHALTUNG MIT SYSTEM
PRÄVENTION UND MINIMALINVASIVE THERAPIE

LUNOS®
VOR FREUDE STRAHLEN



WEIL DAS GROSSE GANZE ZÄHLT.

Zahnärzte müssen das große Ganze im Blick behalten, um für die Zahnerhaltung ihrer Patienten immer die richtige Entscheidung zu treffen. Dürr Dental hat für dieses große Ganze etwas ganz Großes erarbeitet: Ein präzise abgestimmtes System für die Prävention zur Erhaltung der allgemeinen Mundgesundheit sowie zur Prävention und Therapie von Parodontitis oder Periimplantitis. Ein System aus minimalinvasiven Verfahren, nachgewiesenen schmerzarmen und schonenden Behandlungsmethoden, Hightech, Hilfsmitteln, Diagnostik, Komfort und Information. Ein System, das in dieser Form und Qualität kein anderer Hersteller bietet: Lunos®.

Dafür hat sich Dürr Dental intensiv mit vielen Details beschäftigt. Zum Beispiel mit der Weiterentwicklung der Ultraschalltechnologie. Oder mit digitalen bildgebenden Verfahren. Oder mit hochwertigen Prophylaxeprodukten wie Prophylaxepulver, Polierpasten, Fluoridgel oder Fluoridlack zum Schutz der Zähne. Eingeflossen sind hohe Ingenieurskunst und ein großes Interesse für zahnmedizinische Zusammenhänge und Praxisprozesse.

Lunos® unterstützt die Bedürfnisse von Patienten und die Arbeit von Praxisteams gleichermaßen. Es bietet Möglichkeiten für Therapie und Prophylaxe, es öffnet als System alle Möglichkeiten für die individuellen Konzepte moderner Zahnarztpraxen. Lunos® begreift die vielen Einzelschritte in Prävention und Therapie als das, was sie sind: Ein großes Ganzes.

LUNOS®
VOR FREUDE STRAHLEN



WEIL PRÄVENTION ZAHNGESUNDHEIT FÖRDERT.


Patienten wollen sichergehen, dass ihre Zähne dauerhaft gesund sind. Prophylaxe ist der beste Weg, um diese Sicherheit zu gewinnen. In sechs Schritten unterstützt Dürr Dental alle Elemente der professionellen zahnmedizinischen Prophylaxe mit Produkten und Expertenwissen: Dabei kommen Neuentwicklungen zum Einsatz wie die Perio-Spitze für MyLunos®, mit der nun auch die subgingivale Pulverstrahlbehandlung möglich ist. Oder bildgebende Technologien wie die VistaCam zur intraoralen Bilderfassung und -analyse.



WEIL THERAPIE UND PRÄVENTION ZUSAMMENGEGHÖREN.


Präventive Zahnheilkunde hat ihre Grenzen. Erkrankungen des Zahnhalteapparates gehören zu den häufigsten Erkrankungen überhaupt, sodass in vielen Fällen eine Parodontaltherapie erforderlich ist. Auch dort, wo Prävention endet und Parodontaltherapie beginnt, bietet das Lunos® Gesamtsystem von Dürr Dental moderne und wirkungsvolle Unterstützungsmöglichkeiten, die zeiteffizient und einfach umgesetzt werden können.

Dürr Dental entlastet Patient, Zahnarzt und Fachpersonal mit schonenden, minimalinvasiven Methoden. Am Ende dieses Prozesses steht die lebenslange Erhaltungstherapie, die den Patienten vor einem Fortschreiten der Parodontitis bewahren soll.

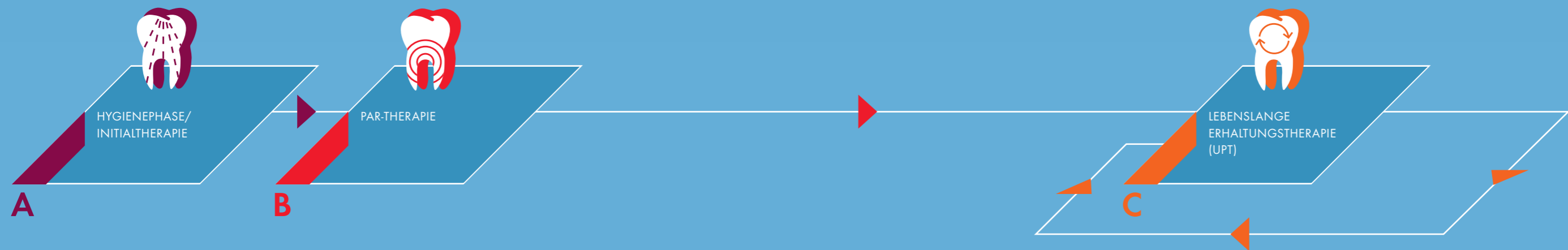


INHALTSVERZEICHNIS: ALLE LUNOS® PRODUKTE AUF EINEN BLICK

PRÄVENTIONSPROZESS

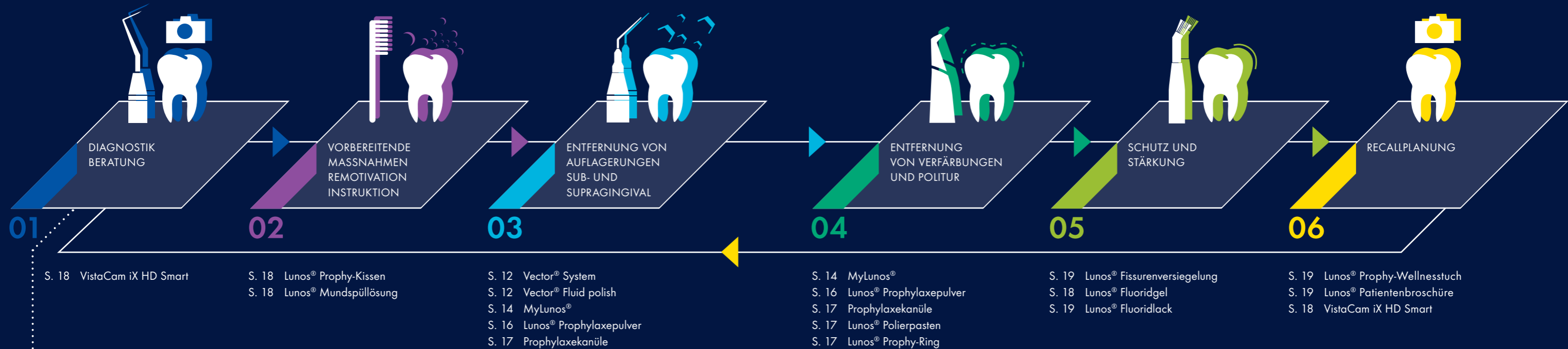

THERAPIEPROZESS

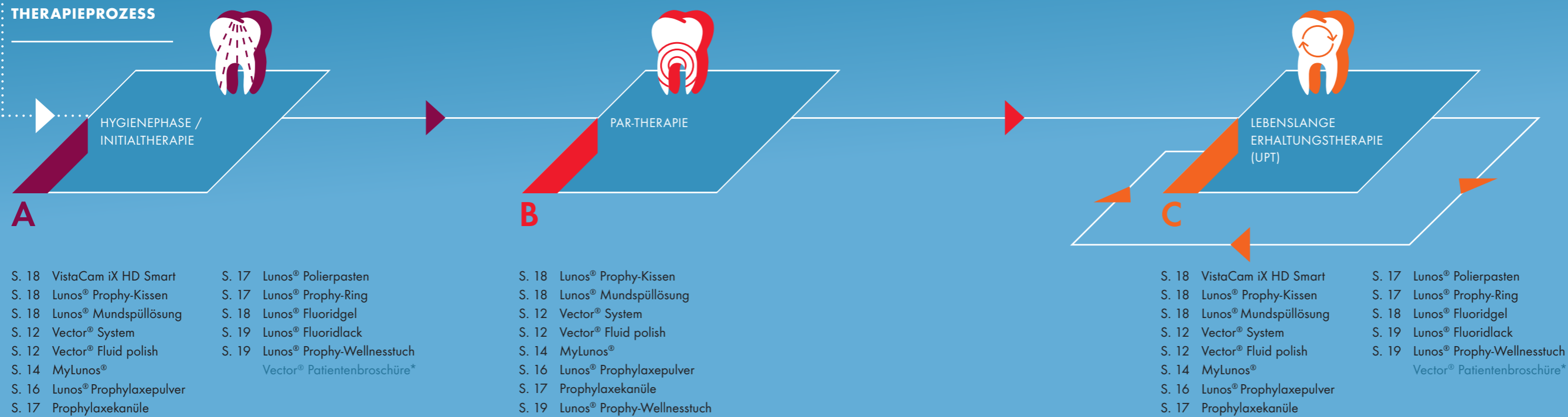

* Dieses Produkt finden Sie in der Vector® Broschüre von Dürr Dental.
Sie erhalten diese Broschüre kostenlos bei Dürr Dental. Mehr unter www.duerrdental.com

WENN UNSERE BESTEN GEMEINSAME SACHE MACHEN.

MyLunos® und Vector® sind das starke Team für Prävention und gegen Formen parodontaler Erkrankungen. Das Lunos® System bietet alles für Pulverstrahlbehandlung, Politur, Schutz, Stärkung und Versiegelung. Vector® ist der Spezialist für die sanfte und dennoch effektive Reinigung mit Ultraschall.



Ob supra- oder subgingival – das Team aus MyLunos®, Vector® Paro und Vector® Scaler bietet alles, was erforderlich ist, um harte Auflagerungen und Biofilme zu entfernen.



DAS VECTOR® SYSTEM – SYNERGIE AUS DESIGN UND FUNKTION.

Auch nach 20 Jahren noch immer der Maßstab für minimalinvasive und schmerzarme Ultraschalltechnik: die lineare Schwingungsumlenkung von Dürr Dental. Verbaut ist dieses geniale Stück Technik im Vector® Paro. Ergänzt um eine große Auswahl an Instrumenten und hilfreichem Zubehör ist Vector® ein Maximum in der minimalinvasiven Ultraschallbehandlung. Hightech im System.

WEGWEISENDE ERGÄNZUNG

Vector® Fluid polish unterstützt in Kombination mit dem Vector® System die Reinigung der Zahn-, Zahnersatz- und Wurzeloberfläche und die schmerzarme Behandlung

- FREI VON:**
- ✓ TIERISCHEN INHALTSSTOFFEN
 - ✓ LACTOSE
 - ✓ GLUTEN
 - ✓ FRUCTOSE

WEGWEISENDES SYSTEM

Aufeinander abgestimmtes Zubehör komplettiert das Vector® System. Sie finden alle Komponenten in der Vector® Broschüre von Dürr Dental.

WEGWEISENDE TECHNOLOGIEN

Paro-Handstück mit Schwingungsumlenkung für schonende subgingivale Behandlungen. Moderne Scalertechnik mit 6 LEDs ermöglicht beste Übersicht bei der supra- und subgingivalen Anwendung.



WEGWEISEND UNABHÄNGIG

Ein großer abnehmbarer Wassertank ermöglicht das Arbeiten ohne Festwasseranschluss.



WEGWEISENDE FORM

Beide Handstücke überzeugen durch ein hohes Maß an Bedienerfreundlichkeit.



WEGWEISEND EINFACH UND HYGIENISCH

Das übersichtliche Bedienfeld lässt sich intuitiv bedienen. Die Oberflächen sind spaltenfrei und erfüllen damit höchste Hygieneanforderungen. Das Gerät erinnert automatisch an die regelmäßige Reinigung und erleichtert das Spülen der medienführenden Leitungen. Handstücke und Instrumente können validiert manuell und maschinell vollständig aufbereitet werden.



HANDLICH, VIELSEITIG, MIT STRAHLKRAFT.

Das Pulver-Wasserstrahl-Handstück* MyLunos® unterstützt mit Leichtigkeit, Kraft und Ergonomie, wenn Verfärbungen, Ablagerungen und Biofilme beseitigt werden sollen. Je nach Düse und Pulver ist es bereit für die supra- oder subgingivale Anwendung. Die abnehmbare Pulverkammer kann schnell gewechselt werden, sodass stets genau das Pulver verwendet werden kann, das erforderlich ist. Von der Vorbereitung über die Anwendung in der Behandlung bis hin zur Aufbereitung wird konsequent der Systemgedanke verfolgt. MyLunos® bietet hohe Flexibilität und Effizienz, weil als System entwickelt.

SUPRA- UND SUBGINGIVALE BEHANDLUNG

Eins für alles – das MyLunos® Pulver-Wasserstrahl-Handstück ermöglicht größte Therapiefreiheit. Ob die supragingivale Entfernung von Verfärbungen oder die subgingivale Reinigung von Wurzel- und Implantatoberflächen – durch ein schnelles Tauschen der beiden Düsen wird ein reibungsloser Behandlungsablauf ermöglicht.



PERFEKTE ERGONOMIE

Optimale Ergonomie hat viele Gründe: Gewicht, Schwerpunktlage, Material, Form, Haptik, Abmessungen. MyLunos® berücksichtigt alle. Die Oberfläche ist rutschfest, die Form ideal angepasst an die Hand. Damit bietet MyLunos® mit allen Düsen hohe Ergonomie.



WECHSELKAMMERPRINZIP

Besonders leicht zu wechseln mit dem Bajonett-Verschluss – auch während der Behandlung. Arbeitsunterbrechungen oder Leistungsabfall aufgrund geringen Füllstandes sind damit ausgeschlossen. Auch kann bedarfsorientiert mit unterschiedlichen Pulvern gearbeitet werden.



VORBEREITUNG DER BEHÄLTER

Aufgrund des sicheren Ventilverschlusses können die Behälter vorab befüllt werden. Dabei ermöglichen die cleveren Ablagen eine flexible Befüllung und Lagerung. Die Behälter sind in fünf verschiedenen Farben erhältlich. Jede Farbe steht somit eindeutig für eine der fünf Varianten der Lunos® Prophylaxepulver.



HANDSTÜCK UND EINZELTEILE KOMPLETT MASCHINELL AUFBEREITBAR

Die wiederaufbereitbaren Komponenten des Handstücks sind aus temperaturbeständigem Kunststoff. Und damit bequem thermodesinfizier- und autoklavierbar.



* Verfügbar für Turbinenkupplungen von KaVo, Sirona, W&H, BienAir und NSK.

DIE STARKEN SANFTEN – LUNOS® PULVER UND PASTEN.

Seit mittlerweile 20 Jahren ist die Zahnerhaltung und der Schutz regenerativen Gewebes im Fokus der Produktentwicklungen von Dürr Dental. Bei den Lunos® Prophylaxepulvern und Polierpasten steht die Schonung von empfindlicher Zahnschmelz bei gleichzeitig effektiver Reinigung an erster Stelle. Sie zeigen eine äußerst geringe Abrasion auf Zahnschmelz und Dentin und können so im Rahmen regelmäßiger Recallbehandlungen angewendet werden. Das schont nicht nur Zahnschmelz, sondern spart dem Anwender auch wertvolle Behandlungszeit und ermöglicht so höheren Patientenkomfort.



- FREI VON:**
- ✓ TIERISCHEN INHALTSSTOFFEN
 - ✓ LACTOSE
 - ✓ GLUTEN
 - ✓ FRUCTOSE

LUNOS® PROPHYLAXEPULVER GENTLE CLEAN

03 04 A B C // S. 08-09

Für die supragingivale Reinigung und Entfernung von extrinsischen Verfärbungen.

Innovativer Abrasivkörper Trehalose:

- Korngröße ca. 65 µm
- nicht schleimhautreizend

Beste Wasserlöslichkeit:

- hinterlässt keine Pulverrückstände im Patientenmund
- schont die Sauganlage

Ergonomische Flasche mit Einhandkipphebelverschluss

Geschmacksrichtungen: Neutral, Orange, Spearmint und Wild Berry
Verkaufseinheit: 4x 180 g



- FREI VON:**
- ✓ TIERISCHEN INHALTSSTOFFEN
 - ✓ LACTOSE
 - ✓ GLUTEN
 - ✓ FRUCTOSE

LUNOS® PROPHYLAXEPULVER PERIO COMBI

03 04 A B C // S. 08-09

Für die subgingivale Biofilmentfernung und supragingivale Reinigung. Ideal für den Recall.

Innovativer Abrasivkörper Trehalose:

- Korngröße ca. 30 µm
- nicht schleimhautreizend

Zur Unterstützung der Erhaltungstherapie

Beste Wasserlöslichkeit:

- hinterlässt keine Pulverrückstände im Patientenmund
- schont die Sauganlage

Ergonomische Flasche mit Einhandkipphebelverschluss

Geschmacksrichtung: Neutral
Verkaufseinheit: 4x 100 g



Das Schutzschild an der Kanülenspitze kann beliebig gedreht werden. Dies ermöglicht eine besonders effektive Absaugung des Strahlpulvers.

PROPHYLAXEKANÜLE

03 04 A B C // S. 08-09

Ein speziell entwickeltes dreh- und fixierbares Schutzschild ermöglicht eine erhöhte Aerosolaufnahme und eine besonders effektive, ergonomische Absaugung im Rahmen der Prophylaxebehandlung mit Pulverstrahlgeräten.

- Doppelte Aerosolaufnahme gegenüber herkömmlichen Kanülen
- Vermeidung von Schleimhautirritationen durch Strahlpulver
- Ergonomische Behandlung
- Protect-Nebenluftinlässe gegen Reflex



- FREI VON:**
- ✓ TIERISCHEN INHALTSSTOFFEN
 - ✓ LACTOSE
 - ✓ GLUTEN
 - ✓ FRUCTOSE

LUNOS® POLIERPASTE TWO IN ONE

04 A C // S. 08-09

Die innovative Two-in-One-Lösung: entfernt Verfärbungen und poliert in einem. Spart Zeit und ist dennoch substanzschonend und gründlich.

Stufenlos abnehmende Abrasivität der Paste durch selbst-



- Für jeden Behandlungsbedarf im Rahmen supragingivaler professioneller Reinigungsmaßnahmen einsetzbar
- Effektive Reinigung und Politur dank innovativem Abrasiv- und Polierkörpersystem.
- Substanzschonend, RDA 28*
- Geschmacksrichtung Mint enthält zusätzlich Natriumfluorid zur Unterstützung der Remineralisierung

Geschmacksrichtungen: Neutral, Orange und Mint
Verkaufseinheit: 1x 100 g



LUNOS® PROPHY-RING

04 A C // S. 08-09

Zur einfachen Applikation der Polierpaste für eine optimale Handhabung. Flexible Ringgröße.

- Das innovative Polierpastenbehältnis passt sich an jede Arbeitsweise an
- Ergonomisch geformter Ring für höchsten Tragekomfort
- Das kantenfreie Polierpastenbehältnis lässt sich nach der Behandlung besonders leicht reinigen

Verkaufseinheit: 8 Stück



- FREI VON:**
- ✓ TIERISCHEN INHALTSSTOFFEN
 - ✓ LACTOSE
 - ✓ GLUTEN
 - ✓ FRUCTOSE

LUNOS® POLIERPASTE SUPER SOFT

04 A C // S. 08-09

Nachhaltig schonende Feinpolitur, auch auf besonders empfindlichen Oberflächen.

- Kann universell eingesetzt werden, auch auf Implantaten, KFO-Apparaturen und prothetischen Versorgungen
- Erzeugt glatte, hochglänzende Oberflächen, neue Beläge lagern sich nicht so schnell an
- Hydroxylapatit reinigt und poliert äußerst sanft und unterstützt die Remineralisierung
- RDA < 5*

Geschmacksrichtungen: Neutral und Orange
Verkaufseinheit: 1x 50 g

* Gebrauchsanweisung beachten!

ZAHNGESUNDHEIT ZU ENDE GEDACHT.



VISTACAM IX HD SMART

01 06 A C // S. 08-09

Das Kamerasystem unterstützt Sie zuverlässig bei der Kariesdiagnose ebenso wie bei der Plaque-Visualisierung. Zeigen Sie Ihren Patienten während der PZR, wo sie gründlicher reinigen sollten. Dank des Fluoreszenzverfahrens brauchen Sie zur Visualisierung der Ablagerungen lediglich den Proof-Wechselkopf. Die Vorher-Nachher-Aufnahmen verdeutlichen Ihren Patienten zudem die Notwendigkeit und den Mehrwert der professionellen Zahnreinigung. Das Multikopf-Kamerasystem ist sowohl in der Patientenberatung als auch bei der Diagnoseunterstützung eine echte Bereicherung für jede Praxis.



LUNOS® PROPHY-KISSEN

02 A B C // S. 08-09

Zur sicheren und komfortablen Lagerung des Kopfes. Unterstützt Hals und Nacken.

- Mittels Klettband einfach und schnell an der Kopfstütze der Behandlungseinheit zu fixieren
- Der viscoelastische Schaumstoff wirkt druckentlastend, reagiert auf Körperwärme und passt sich so individuell an jeden Patienten an
- Weicher, hautfreundlicher und wasserdichter Bezug
- Abwaschbar und desinfizierbar

Verkaufseinheit: 1 Stück



LUNOS® FISSURENVERSIEGLUNG

05 // S. 08-09

Zur ästhetisch hochwertigen Versiegelung von Fissuren und Schmelzdefekten auf Kompositbasis.

- Feuchtigkeitstolerant und hydrophil
- Applikation auf feuchten oder leicht angetrockneten Zahnoberflächen, effektive Benetzung des Zahnschmelzes
- Exzellente Fließ Eigenschaften
- Lichthärtend

Erhältlich in:

Clear (ohne Fluorid, speziell zur ästhetischen Versiegelung)

Opaque (mit Fluorid)

Verkaufseinheit: 2x 1,5 g Spritzen



LUNOS® PROPHY-WELLNESSTUCH

06 A B C // S. 08-09

Erfrischendes, getränktes Frotteetuch, ideal für die Gesichtereinigung nach der Prophylaxebehandlung.

- Individueller Service für den Patienten
- Heiß- und Kaltanwendung möglich
- Pflegend, mit Aloe Vera
- Alkoholfrei

Verkaufseinheit: 50 Tücher einzeln verpackt

FREI VON:
✓ LACTOSE
✓ GLUTEN



LUNOS® MUNDSPÜLLÖSUNG

02 A B C // S. 08-09

Gebrauchsfertige Mundspüllösung zum Schutz von Zahnfleisch und Zähnen.

- Beugt bakteriell bedingten Entzündungen der Mundschleimhaut und des Zahnfleisches vor
- Hemmt das Wachstum plaquebildender, pathogener und geruchsbildender Keime
- Zuckerfrei, mit Xylitol

Verkaufseinheit: 1x 400 ml, 1x 2,5 Liter

Dosierpumpe für die 2,5 Literflasche extra erhältlich

FREI VON:
✓ TIERISCHEN INHALTSSTOFFEN
✓ LACTOSE
✓ GLUTEN
✓ FRUCTOSE



LUNOS® FLUORIDGEL

05 A C // S. 08-09

Zur Kariesprophylaxe mit Natriumfluorid. Vermindert erhöhtes Reizempfinden der Zähne und Zahnhäse.

- Zur Remineralisierung des Zahnschmelzes
- Einfach und schnell aufzutragen
- Enthält 12300 ppm Fluorid

Verkaufseinheit: 1x 250 ml



LUNOS® PATIENTENINFOBROSCHÜRE

A C // S. 08-09

Wir unterstützen Sie bei der Patientenaufklärung über die Professionelle Zahnreinigung mit kostenlosen Patienteninformationsbroschüren.

WWW.LUNOS-DENTAL.COM

DÜRR DENTAL SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

Änderungen vorbehalten

 **DÜRR
DENTAL**
DAS BESTE HAT SYSTEM

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban