

KaVo turbiner, hand- och vinkelstycken

Med perfektion och påtaglig känsla av kvalitet.

KaVo *Master Series*

NYHET

KaVo MASTERtorque™

med Direct Stop Technology
23 watt prestanda och extremt tyst



MASTERtorque M9000 L
turbin


GENTLEpower LUX 25 LP
vinkelstycke

14 BORR-
HUVUDEN

Med 14 nya INTRA Huvuden
för alla indikationer

GENTLEpower LUX 20 LP
underdel

GENTLEpower LUX 7 LP
underdel

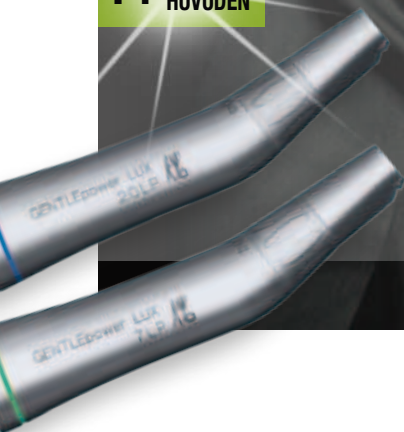

KaVo. Dental Excellence.

Tillförlitlig kvalitet från KaVo.



Din kvalitetslösning från KaVo.

Mer än **ett hundra års erfarenhet** och över **fem miljoner sålda KaVo instrument** avspeglar Dental Excellence runt om i världen. Några kvalitetsbevis från KaVo:

- > I vår tillverkning lägger vi mycket stor vikt vid precision och kvalitet, som till exempel **dammfria monteringen i Biberach**.
- > Upp till 70% av andra tillverkares instrument behöver en omfattande reparation inom de första åren. **För KaVo är det bara 30%**. Därför intar KaVo en särställning på marknaden (källa: GfK ZaBus undersökning i mars 2009).
- > **Att 98% av kunderna köper KaVo på nytt** avspeglar det höga förtroendet de har för vår produktkvalitet.
- > **Regelbundna certifieringar** säkerställer en stabil och hög kvalitet. KaVo är certifierat enligt EN ISO 9001 och EN ISO 13485.

Din systemlösning från KaVo.

Skaffa dig lönsamhet och investerings säkerhet med **lösningar som är perfekt anpassade till varandra**:

- > **Undvik kostsamma nyanskaffningar** och byt till exempel ut halogenlampan på ditt instrument, enkelt och helt på egen hand, mot den nya KaVo MULTI LED.
- > **Reservdelar som är tillgängliga länge** höjer investeringsvärdet betydligt.
- > Vid all ny produktutveckling lägger vi mycket stor vikt vid att systemen ska kunna samverka, du ska när som helst kunna **uppdatera ditt system på ett kostnadseffektivt sätt**.

Din innovationslösning från KaVo.

Vi bidrar till dina vardagsframgångar genom våra innovationer, som bygger på ett genuint engagemang och avspeglas i **över 2 200 patent** och mönsterskydd i många olika länder. Några exempel på framgångsrika innovationer:

- > **KaVo COMFORTdrive**, det första vinkelstycket med integrerad elmotor, kombinerar kraft och lätt vikt.
- > Det **utbytbara KaVo spray mikrofiltret** optimerar spraykylningen och minskar servicekostnaderna.
- > **Tryckregleringsventilen** i turbinerna ger högt vridmoment och lång livslängd.
- > Den **patenterade huvud- och knävinkeln på 100° resp. 19° hos KaVo instrument** ger en optimal åtkomst till behandlingsområdet.
- > **Med SONICflex Quick** byter man scalerspets snabbt och enkelt.

Din KaVo "Made in Germany" fördel.

KaVo ger dig de rätta förutsättningarna för **högsta behandlingssäkerhet** och bästa skydd mot infektioner för tandläkare, assistenter och patienter, vid varje behandling. Några praktiska exempel som visar hur KaVo uppnår detta:


- > **Fasthållningskraften i chucken** på upp till 30 N ligger långt över standardens krav, vilket ger trygghet till användaren.
- > **Innovativa hygienlösningar**, som det inbyggda återsugstoppet i GENTLESilence serien och de lättrenjorda och steriliserbara ytorna, bidrar till att skydda alla inblandade mot korskontaminering.

KaVo *Master Series*

1. Högsta behandlingskvalitet

2. Maximal behandlingskomfort

3. Högsta patientnöjdhet

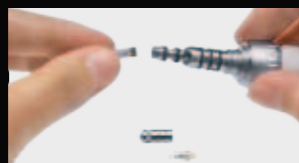

Över  miljoner sålda instrument världen över



MASTERtorque – Starkare. Tystare. Bekvämare.

MASTERtorque:

- > **Arbeta tidssparande** med högeffektiv preparation med upp till 23 watts prestanda och en stopptid på ca 1 sekund – snabbare kontrollblick
- > **Tyst** för behandlare och patient genom frekvensoptimering för att skapa en mycket låg ljudnivå under behandlingen 57 dB(A)
- > **Avspänt arbete** tack vare Direct Stop Technology (DST) med mycket kort stopptid för bättre säkerhet
- > **Mer hygien och längre hållbarhet:** DST förhindrar återsugning och därmed även att kontaminerat sprutvatten tränger in
- > **Utmärkt sikt** tack vare det lilla instrumenthuvudet (H = 13,1 mm; Ø = 12,5 mm)
- > **Mer rörelseutrymme** tack vare patenterad KaVo 100°/19° huvud-/knäivinkelkombination

M9000 L art.-nr. 1.008.7900 (med ljus) M9000 LS art.-nr. 1.008.5400 (med ljus, passar till Sirona-kopplingen)*

Helt i rostfritt stål

GENTLEmini: Det ideala komplementet – ännu mindre.

- > **Vårt minsta handstycke** – bästa sikt tack vare minimalt omfång på instrumenthuvudet (H = 12,1 mm; Ø = 10,8 mm) – idealisk för barn och äldre
- > **Mer rörelseutrymme** tack vare patenterad KaVo 100°/19° huvud-/knäivinkelkombination
- > **Bekväm** både för tandläkare och patient tack vare låg ljudnivå vid behandling 59 dB(A)
- > Passar både till miniatyrborrar och till standardborrar

5000 B art.-nr. 1.002.3300

Med stålhuvud för lång hållbarhet

MULTIflex LUX koppling 465 LED

- > **Flexibel** – anslutningarna passar till många handstycken
- > **Lönsam** – inga kostsamma nyanskaffningar behövs, det är bara att byta ut lampan mot en KaVo MULTI LED

För alla KaVo turbiner med MULTIflex-anslutning, SONICflex Airscaler, PROPHYflex, CORONAflex, alla INTRAflex LUX motorinstrument, RONDOflex

465 LED art.-nr. 1.007.3197

* Dessa märken hör inte till KaVo Dental GmbH.

3 års garanti.

MASTERtorque, GENTLEmini, INTRA LUX-huvuden, GENTLEpower hand- och vinkelstycken

1. Högsta behandlingskvalitet 2. Maximal behandlingskomfort 3. Högsta patientnöjdhet

Direct Stop Technology (DST).

Snabbt stopp – bättre säkerhet när stopptiden är reducerad med 60% och stannar på endast en sekund**. Säker hygien och lång livslängd med noll återsug

Upp till 23W prestanda för tidsbesparande och precist arbete

Låg ljudnivå 57 dB(A), höga toppar i frekvensområdet är nästan fullständigt eliminerade.

Utmärkt sikt med minskad diameter omfång på huvudena även vid komplexa preparationer i molarområdet. Med ett borr på 19 mm uppgår huvudhöjden till endast 20 mm.

Utbytbara spraymikrofilter för en ständigt effektiv och störningsfri spraykylning

Ljusledande glasstav med 25 000 LUX för att lätt kunna se behandlingsområdet

4-hålsspay med mycket fin spridning för optimal kylning

KaVo Plasmatec ytbeläggning för perfekt grepp och utmärkt hygien.

Snabbblåsning med tryckknappschuck med upp till 30 N hållkraft ger säker och stadig borr, med hög användningskomfort.

Högteknologisk FG-chuck för högsta hållbarhet och pålitlighet.

Patenterad KaVo 100°/19° huvud-/knäivinkelkombination för största rörelsefrihet och bästa sikt

Tack vare KaVo MULTIflex kopplingssystem kan de användas vid varje behandlingsenhet

KaVo keramiska kullager i original för en hållbarhet långt över genomsnittet samt en utmärkt vibrationsfri drift

Värmedesinficerbar och steriliserbar upp till 135°C

NYHET Innovativ FG-chuck för lång livslängd.

- > KaVo chuckar har alltid utmärkt sig för att **ha lång livslängd och bra hållkraft**. Med ambitionen att ha högsta kvalitet har KaVo utsatt sina chuckar för omfattande tester och därefter förbättrats ytterligare. Resultatet **har blivit längre hållbarhet samtidigt som instrumenten hanteras på enklaste sätt med en lätt knapptryckning.**
- > Med hjälp från modernaste FEM-uträkningar (Finite Element Method) har det utförts förbättringar på chucken. Exempelvis kunde dragfastheten (1 växelutförande = 1 borrhåla) höjas med minst 60% tack vare dessa optimeringar.



GENTLEpower LUX – perfekt sikt, optimal rörelsefrihet.

Med stålhuvud för lång hållbarhet

GENTLEpower LUX 25 LP: Arbeta mjukt utan vibrationer.

- > **Arbeta mjukt** tack vare Triple-Gear. Arbeta i lugn och ro utan störande vibrationer
- > **Bekvämt** både för tandläkare och patient tack vare låg ljudnivå vid behandling 55 dB(A)
- > **Mer rörelseutrymme** tack vare patenterad KaVo 100°/19° huvud-/knävikelskombination
- > **Perfekt sikt** tack vare de små instrumenthuvudena (H = 15,0 mm; Ø = 10,3 mm)
- > **Mer säkerhet:** utbytbara spraymikrofilter garanterar optimal kylning och förhindrar värmeskador på tanden

Art.nr. 1.001.2849


COMFORTdrive – arbeta ergonomiskt, skonsamt för dina leder.

Med stålhuvud för lång hållbarhet

COMFORTdrive 200 XD: Kraftfull, lätt och precis.

- > **Innovationen** för behandlingsenheterna KaVo ESTETICA E80, E70, E50 och Primus 1058
- > Det mest **lätta och tysta vinkelstycke som någonsin tillverkats**
- > **Arbeta avslappnat och länge** tack vare låg vikt (141 g) och kortare längd (162 mm)
- > **Arbeta extra precist** tack vare perfekt balans och därmed mindre belastning på fingrarna
- > **Arbeta kraftfullt och effektivt** med upp till 200 000 v/min och 30 W prestanda

Art.nr. 1.000.5500

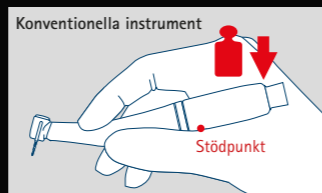

1. Högsta behandlingskvalitet 2. Maximal behandlingskomfort 3. Högsta patientnöjdhet

Mycket litet omfång på huvudena för bästa sikt, även vid komplexa preparationer i molarområdet

3-hållspray med mycket fin spridning för optimal kylning

Ljusledande glasstav med 25 000 LUX för att lätt kunna se behandlingsområdet

Låg ljudnivå och vibrationsfri vid behandlingen (55 dB(A))

Arbeta mjukt tack vare Triple-Gear. Arbeta i lugn och ro utan störande vibrationer

Utbytbara spraymikrofilter för en ständigt effektiv och störningsfri spraykylning

KaVo Plasmatec ytbeläggning för perfekt grepp och utmärkt hygien

Högteknologisk FG-chuck för högsta hållbarhet och pålitlighet

KaVo tryckknappschuck med upp till 30 N hållkraft ger säker och stadig borrhållning, med hög användningskomfort

KaVo keramiska kullager i original för en hållbarhet långt över genomsnittet samt en utmärkt vibrationsfri drift

Patenterad KaVo 100°/19° huvud-/knävikelskombination för största rörelsefrihet och bästa sikt

Värmedesinficerbar och steriliserbar upp till 135°C

Kan monteras på alla KaVo INTRAmatic-motorer och motorer med anslutning enligt ISO 3964 / DIN 13940

Kommentar från användare:


"Instrumenthuvudets vridvinkel på 100° på GENTLEpower LUX 25 LP gör det möjligt att arbeta i svåra områden i munhålan. I jämförelse med föregångsmodellerna är Triple-Gear och vinkelstyckenas låga ljudnivå imponerande."

Dr. med. Thorsten Kleinert, Berlin, Tyskland



GENTLEpower LUX – Högsta flexibilitet genom utbytbara instrumenthuvuden.

Investera i enbart en vinkelstycksunderdel. Vårt breda INTRA huvudsortiment ger dig ideala möjligheter att arbeta i alla indikationer.

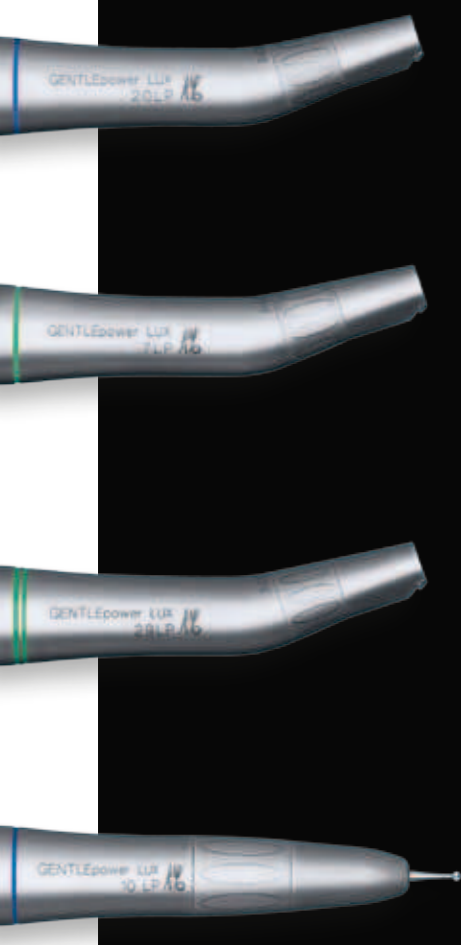

- 

GENTLEpower LUX 20 LP

 - > Utväxling 1:1
 - > **Standard** för kariesborttagning
 - > **Maximal behandlingsflexibilitet** och bästa möjlighet med 14 olika huvuden

Art.nr. 1.001.7453
- 

GENTLEpower LUX 7 LP

 - > Nedväxlad 2,7:1
 - > **Maximal behandlingsflexibilitet** och bästa möjlighet med 14 olika huvuden
 - > **Kompatibel** med alla INTRA LUX-huvuden

Art.nr. 1.001.7452
- 

GENTLEpower LUX 29 LP


 - > Nedväxlad 7,4:1
 - > **Maximal behandlingsflexibilitet** och bästa möjlighet med 14 olika huvuden
 - > **Kompatibel** med alla INTRA LUX-huvuden

Art.nr. 1.001.7454
- 

GENTLEpower LUX 10 LP

 - > Både till handstycks- och vinkelstycksbort
 - > Även för lätta **extraorala arbeten** som proteskorrigeringar

Art.nr. 1.001.5660

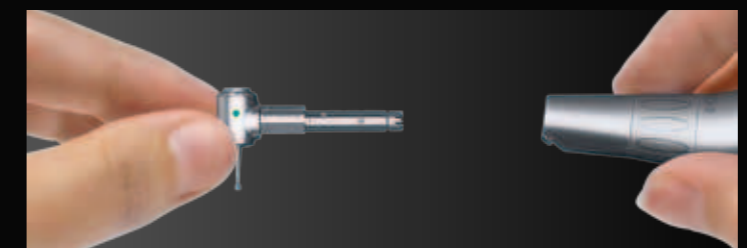

Tack vare KaVo:s snabba säkerhetslås kan instrumenthuvudena lätt och snabbt tas ut ur underdelen och bytas, allt efter behov.

Rätt huvud för varje indikationsområde:

| Preparation | Profylax | Endodonti | Kirurgi |
|--|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> > L68 (1:1, upp till 40.000 v/min) > L68 B (1:1, till 40.000 v/min) > L67 (2:1, upp till 20.000 v/min) > L52 (1:1, upp till 40.000 v/min) > L80 (1:1, upp till 40.000 v/min) > L68 B (3:1, till 40.000 v/min) | | <ul style="list-style-type: none"> > L68 B (1:1, upp till 40.000 v/min) > L66 B (3:1, upp till 13 300 v/min) i samband med endodontifunktionen hos KaVo ESTETICA E80, E70 och E50 med vridmomentstyrning | <ul style="list-style-type: none"> > L22 (1:1) maximalt varvtal 20 000 v/min |
| <ul style="list-style-type: none"> > L68 (1:1, upp till 14.800 v/min) > L68 B (1:1, upp till 14.800 v/min) > L67 (2:1, upp till 7.400 v/min) > L52 (1:1, upp till 14.800 v/min) > L80 (1:1, upp till 14.800 v/min) > L66 B (3:1, upp till 4.950 v/min) | <ul style="list-style-type: none"> > L31 (2:1, upp till 7.400 v/min) > L61 G (0,8 mm slaglängd, upp till 14 800 slag) > L61 R (0,8 mm slaglängd, upp till 14 800 slag) | <ul style="list-style-type: none"> > L62 (10:1, upp till 1.500 v/min) | <ul style="list-style-type: none"> > L22 (1:1, upp till 4.800 v/min) |
| <ul style="list-style-type: none"> > L68 (1:1, upp till 5.400 v/min) > L68 B (1:1, upp till 5.400 v/min) > L67 (2:1, upp till 2.700 v/min) > L52 (1:1, upp till 5.400 v/min) > L80 (1:1, upp till 5.400 v/min) > L66 B (3:1, upp till 1.800 v/min) | <ul style="list-style-type: none"> > L31 (2:1, upp till 2.700 v/min) > L61 G (0,8 mm slaglängd, upp till 5 400 slag) > L61 R (0,8 mm slaglängd, upp till 5 400 slag) > L53 (90° dubbelriktad) | <ul style="list-style-type: none"> > L53 (90° dubbelriktad) > L3 (90° dubbelriktad) > L3 Y (0,4 mm slaglängd) maximalt varvtal 3 000 v/min > L62 (10:1, upp till 540 v/min) | |

Översikten visar en rekommenderad kombination av KaVo GENTLEpower underdelar och INTRA-huvuden och det följande varvtalet. Dessa kombinationer säkerställer, så länge inget annat anges, att de maximala driftsvarvtalen för instrumenthuvudena inte överskrids.

Kommentar från användare:

"Skön tyngd, bra greppyta samt Triple-Gear, det är de mest framträdande egenskaperna hos KaVo:s vinkelstycken från Master-Serien. Genom det minimala slitaget, vilket i sig talar för fantastisk kvalitet, är de dessutom ur lönsamhetssynpunkt mycket intressanta."

Andreas Clemens, Gelnhausen, Tyskland



KaVo INTRA huvuden av specialädelstål för högsta flexibilitet.

NYHET 65 % hårdare än tidigare och dubbelt så formbeständig som titan.

- > **Lång livslängd** – tack vare användandet av specialädelstål
- > **Hygienisk** – slätare yta
- > **Pålitlig** – bästa KaVo kvalitet och 3 års garanti
- > **Flexibel** – 14 huvuden för alla indikationer



Preparation

INTRA Huvud L68

- Utväxling 1:1
- För vinkelstycksborr
- Med tryckknappschuck, smutsavvisare och förstärkt borrlåsning
- För kariespreparation och finishering
- Maximal hastighet 40 000 v/min



Art.nr. 1.008.1833

INTRA miniatyrhuvud L52

- Utväxling 1:1
- Idealisk för vinkelstycksborr i små format (16 mm)
- Med tryckknappschuck
- För bästa siktförhållande när du avlägsnar kariöst material, idealisk vid behandlingar i trånga områden eller vid behandling av barn
- Maximal hastighet 40 000 v/min



Art.nr. 1.008.1825

INTRA Huvud L67

- Nedväxlat 2:1
- För vinkelstycksborr
- Med tryckknappschuck, smutsavvisare och förstärkt borrlåsning
- Förhöjd dragkraft i förhållande till L 68
- För kariespreparation och finishering
- Maximal hastighet 20 000 v/min



Art.nr. 1.008.1832

INTRA Huvud L80

- Utväxling 1:1
- För turbinbör med 1,6 mm genomsnitt
- Med tryckknappschuck
- Färdigställning och formning av tuggytor efter att fyllnadsmaterialet har härdat; snabb och effektiv polering; idealisk även för kariesavlägsning med FG-hårdmetallbör
- Maximal hastighet 40 000 v/min



Art.nr. 1.004.4456

Preparation/endodonti

INTRA Huvud L68 B

- Utväxling 1:1
- För vinkelstycksbör och rotkanalsinstrument
- Med tryckknappschuck och kullager
- Avlägsna kariesmaterial, preparering av kavitetbotten, roterande bearbetning av rotkanaler, med t.ex. NiTi-filar
- Idealisk för endodonti-behandlingar i kombination med KaVo GENTLEpower 20 LP och KaVo ESTETICA E80, E70 eller E50 med endodontifunktion
- Maximal hastighet 100 – 40 000 v/min



Art.nr. 1.008.1834

INTRA Huvud L66 B

- Nedväxlad 3:1
- För vinkelstycksbör och rotkanalsinstrument
- Med tryckknappschuck och kullager
- Avlägsna kariesmaterial, preparering av kavitetbotten, roterande bearbetning av rotkanaler, med t.ex. NiTi-filar
- Idealisk för endodonti-behandlingar i kombination med KaVo GENTLEpower 20 LP och KaVo ESTETICA E80, E70 eller E50 med endodontifunktion
- Maximal hastighet 35 – 13 300 v/min



Art.nr. 1.008.1831

Kommentar från användare:

"På olika underdelar (20 LN och 7 LN) använder jag 68 LH, 3 LDSY och 61 LR huvuden. Underdelarna är fortfarande från grundutrustningen och har inte behövs repareras sedan 1994. Till alla kollegor kan jag bara rekommendera KaVo-instrumenten och användarfilosofin om utbytbara huvuden."


Dr. Steffen Doering, Berlin, Tyskland



Endodonti

INTRA Huvud L62


- Nedväxlat 10:1
- Med tryckknappschuck lämplig för rotkanalsfil
- Med vinkelstycksfattning
- Bearbetning av rotkanaler med NiTi-filar, fylla rotkanaler med Lentulo. För känsliga behandlingsområden
- Maximal hastighet 20 000 v/min,

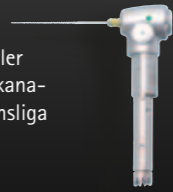

Art.nr. 1.008.1830

INTRA Endohuvud L53


- För rotkanalsinstrument med skaftdiameter på 2,35 mm
- Oscillerande rörelser på cirka 90°.
- Med tryckknappschuck
- Bearbetning av rotkanaler
- Maximal hastighet 3 000 v/min – rekommenderad underdel: 29 LP/dubbelgrön

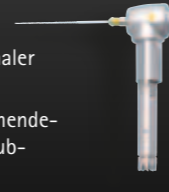

Art.nr. 1.008.1826

INTRA Endohuvud L3


- Lämplig för rotkanalsfil med en skaftdiameter på 3,5 - 4,0 mm
- Oscillerande rörelser på cirka 90°.
- Med tryckknappschuck
- Bearbetning av rotkanaler
- Maximal hastighet 3 000 v/min – rekommenderad underdel: 29 LP/2 x dubbelgrön

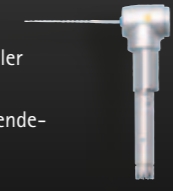

Art.nr. 1.008.1822

INTRA Endohuvud L3 Y

- Lämplig för rotkanalsfil med en skaftdiameter på 3,5 - 4 mm
- Amplitud 0,4 mm
- Med tryckknappschuck
- Chucken vridbar 360°
- Bearbetning av rotkanaler
- Maximal hastighet 3 000 v/min – rekommenderad underdel: 29 LP/dubbelgrön

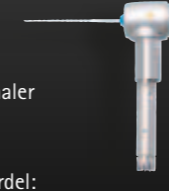

Art.nr. 1.008.1823

Profylax / Specialindikationer

INTRA EVA huvud L61 R

- Precis låsning av den monterade filen genom 36 låsinställningar (används med filarna Proxoshape, Margin Shaper, Bevelshape, Cavishape, Rootshape, samt Ortho-Strips från INTENSIV)
- Stötdämpad rörelse. Amplitud 0,8 mm
- För perfekt borttagning av fyllnadsöverskott och hantering av restaurerade approximalytor (med proxoshape-filar)
- För snabb och kontrollerad en- eller tvåsidig interdental öppning, emaljreduktion och polering vid käkortopedi (stripping, med ortho-strips)
- För kantjobb vid skalfasader (med bevelshape-filar)
- För kantslipning vid framtandskomposit, kompositlots, inlays och onlays (med bevelshape-filar)
- För kronpreparationer vid avslutning av håligheter och avrundning av skulderpreparation (med bevelshape-filar)
- För borttagning av emallameller och för att avrunda kavitetväggar (med cavishape-filar)
- För borttagning av mjukt plack och konkrement samt fyllningsöverskott på rotytan (med rootshape-filar)
- För snabb och enkel avrundning samt bearbetning och slutarbete på kavitetväggar
- Användning med tillräcklig vattenspray (minst 50 ml/min)
- Maximal hastighet 20 000 v/min



Art.nr. 1.008.1829

INTRA EVA huvud L61 G

- Dämpad slaglängd på 0,8 mm för en preparering som är mild mot vävnad och allmänt skonsam
- Filar som kan rotera fritt (Proxoshape-, Bevelshape-, Cavishape- samt Rootshape-filar från INTENSIV)
- Möjlig innerkyllning
- För indikationer se 61 LRG (användning av ortho-strips med 61 LG är begränsat och användning av marginshaper är inte möjligt)
- Användning med vattenspray (minst 50 ml/min)
- Maximal hastighet 20 000 v/min



Art.nr. 1.008.1828

INTRA Profylaxhuvud L31

- Nedväxlat 2:1
- Gängad chuck för putskoppar och borstar med skruvfattning alt. "snap-on"-fattning
- Med specialtätning som förhindrar polermedel från att tränga in i huvudet.
- Avlägsna beläggningar, jämna fyllningar och polera tandtytor, t.ex. efter "air flow" behandling eller tandstensborttagning
- Maximal hastighet 15 000 v/min



Art.nr. 1.008.1824

Kirurgi

INTRA Microhuvud L22

- Utväxling 1:1
- Med rundborr stl. 2
- Passar även till KaVo rundborr strl. 0 och till konisk borrar strl. 2 och strl. 0
- Mikrohuvud i extremt små skalor för mikrokirurgiska ingrepp som t.ex. apikotomi (genom benfönster)
- Maximal hastighet 20 000 v/min



Art.nr. 1.008.1835

INTRA Endo/Profylax huvud L53

- Lämpligt för rotkanals-filar samt putskoppar med vinkelstycksfattning
- Oscillerande rörelse cirka 90°
- Snabblåsning med tryckknappschuck.
- Avlägsna beläggningar, jämna fyllningar och polera tandtytor, t.ex. efter "air flow" behandling eller tandstensborttagning.
- Maximal hastighet 3 000 v/min - rekommenderad underdel: 29 LP/2 x dubbelgrön



Art.nr. 1.008.1826


Nytt användningsområde!

KaVo Hygien – prisvärt underhåll av dina instrument.

KaVo QUATTROcare CLEAN

- > **Maximal säkerhet** med validerad invändig rengöring (RKI-konform) kombinerat med perfekt värdebevarande skötsel och permanent processövervakning
- > **Högsta effektivitet** tack vare enkel och bekväm hantering och snabbt, programstyrt processförlopp
- > **Låga kostnader** för användningsmaterial tack vare miljövänlig invändig rengöring med vattenånga

Mat-Nr. 1.008.3806

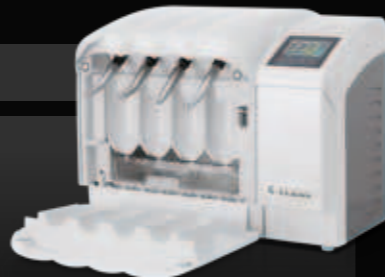

KaVo QUATTROcare PLUS 2124 A

- > **Optimal skötselkvalitet** med QUATTROcare plus spray
- > **Enkel och bekväm hantering** med ett snabbt programförfarande
- > **Låg investeringskostnad**

Art.nr. 1.008.3805



KaVo Spray

- > Manuell **skötsel** av instrument och turbiner
- > **Effektiv och kostnadsbesparande**

Art.nr. 0.411.9640



KaVo CLEANspray / DRYspray

- > Manuell **intensivrengöring** av proteinrester

Art.nr. 1.007.0573



Övriga instrument från KaVo Master Serien

Profylax, diagnos och minimalinvasiv

| | | |
|------------|------------------------------|--|
| 1.001.9000 | DIAGNOcam | |
| 1.002.7000 | DIAGNOdent pen | |
| 1.004.8400 | Display | |
| 1.005.9310 | SONICflex quick 2008 L | |
| 1.005.9311 | SONICflex quick 2008 | |
| 1.007.0540 | SONICflex quick 2008 LS | |
| 1.007.0541 | SONICflex quick 2008 S | |
| 1.005.9328 | SONICflex scaler spetssets A | |
| 1.006.2020 | SONICflex paro spetssets A | |

Välj bland över 50 spetsar, från profylax till kirurgi.

Specialprodukter och endodonti

| | | |
|------------|-------------------------------|--|
| 1.002.4497 | ENDOadvance NT 120 L | |
| 1.002.3693 | INTRA LUX vinkelstycke CL3-09 | |
| 1.003.7894 | INTRA LUX vinkelstycke CL3-04 | |
| 1.002.0911 | INTRA handstycke CL10 | |
| 1.001.3421 | Kirurgimotor INTRA LUX SL 550 | |

Kirurgi

Du vet vad du vill ha.
Vi har det du behöver.

KaVo instrumentserier – för varje tandläkare finns de rätta instrumenten



KaVo

Master Series

Med perfektion och påtaglig känsla för kvalitet.

➤ Högsta behandlingskvalitet

➤ Maximal behandlingskomfort

➤ Högsta patientnöjdhet



KaVo

Expert Series

Prisvärd och effektiv.

➤ Hög effektivitet

➤ Bästa funktionalitet

➤ Lång livslängd



KaVo. Dental Excellence.

KaVo service.



Instrument



Teknisk support



Service



Behandlingsenheter



Utbildning/seminarier



Kvalitet



CAD/CAM



Reservdelar



Studier



Röntgen



Utbytbara delar



Användarrapporter

Upptäck alla mervärden från KaVo:


Din kvalitetslösning från KaVo.



KaVo kvalitet betalar sig i längden genom pålitlighet utöver det vanliga, ringa underhåll och lång livslängd.

- **Värdebeständig:** Långvarig, total tillförlitlighet på alla produkter från KaVo.
- **Behandlingsframgångar:** Mycket noggrann och precis bearbetning.
- **Säkerhet:** Omfattande kvalitetskontroller och tester.
- **Kostnadseffektiv:** Praktiskt taget inga driftstopp eller reparationer.

Din innovationslösning från KaVo.

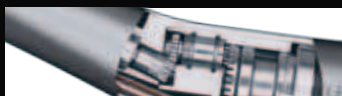

Våra utvecklingsteam – de största och bästa inom dentalsektorn – är kända för att ligga i utvecklingens framkant. Med innovationerna från KaVo säkrar du redan idag morgondagens framgångar.

- **Investeringskydd:** Framtida teknologier kan integreras utan problem.
- **Infektionsskydd och tidsbesparing:** Innovativa och automatiserade hygienfunktioner.
- **Enhetliga standarder:** Mer än 2.200 patent och mönsterskydd.

Din systemlösning från KaVo.



Med KaVo satsar du på systematisk framgång: Du kan när som helst komplettera och uppgradera våra produkter. På så vis slipper du kostsamma nyanskaffningar och skyddar din investering.

- **Funktions- och kombinations-säkerhet:** Samtliga komponenter från ett ställe.
- **Pålitlighet:** Produkter som är perfekt anpassade till varandra.
- **Trygghet för framtiden:** Reservdelar är tillgängliga länge, ytterligare komponenter är även senare integrerbara till lågt pris.

Din KaVo "Made in Germany" fördel.



Var på den säkra sidan och förlita dig på "Made in Germany" kvalitet – med behandlingssystem, instrument och andra dentalprodukter från KaVo.

- **Förtroendeingivande:** Högsta internationella och interna kvalitetsstandarder som – t ex den dammfria monteringen i Biberach.
- **Precision och säkerhet:** Tillverkningsprocess i världsklass.
- **Hållbarhet:** Beprövade och innovativa teknologier och material.



KaVo. Dental Excellence.

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban