

OneGloss M

MOUNTED

One-step Finierer und Polierer
für Komposit und Schmelz



Finieren und Polieren mit

Die einstufigen Silikonpolierer mit Aluminiumoxid bieten das ideale Finish für alle Arten von Komposit-Restaurationen, indem einfach der Kontaktdruck von der Ausarbeitung bis zur Politur verändert wird.

- OneGloss M Polierer sind auf einen Winkelstück-Schaft aus Edelstahl montiert und sterilisierbar
- Ausarbeitung mit hohem Anpressdruck (ca. 1,0 N)
- Politur mit federleichtem Anpressdruck (ca. 0,3 N)
- Entfernung von Komposit- oder Zementüberschuss und Schmelzpolitur mit mäßigem bis federleichtem Druck
- Schmelzpolitur nach Entfernung von Brackets und von Zahnstein oder zur Beseitigung von Verfärbungen mit nur federleichtem Anpressdruck
- Empfohlener Drehzahlbereich 3.000 min^{-1} - 10.000 min^{-1} mit intermittierendem Wasserspray; maximal zulässige Drehzahl von 15.000 min^{-1} nicht überschreiten




einem Instrument

Formenauswahl

Das Sortiment umfasst vier Formen, die optimal auf die zu bearbeitenden Zahnflächen abgestimmt sind.


Kelch

für Höcker, inzisal, okklusal

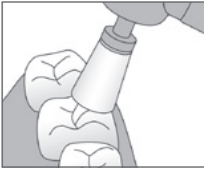

Midispitze

für labial, lingual, bukkal, okklusal

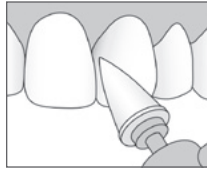


Minispitze

für Fissuren, zervikal



IC

für labial, lingual, bukkal, interproximal

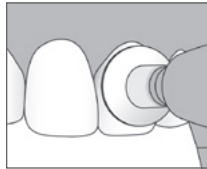

Bestellinformationen

OneGloss M

mit Winkelstück-Schaft, 12 St. pro Packung



Form: Minispitze

Bestell-Nr. 0186



Form: Kelch

Bestell-Nr. 0187



Form: Midispitze

Bestell-Nr. 0188



Form: IC

Bestell-Nr. 0189



Manufacturer
SHOFU INC.

11 Kamitakamatsu-cho,
Fukuine, Higashiyama-ku,
Kyoto 605-0983, Japan

[EC] [REP] SHOFU DENTAL GmbH
An der Pönt 70, 40885 Ratingen, Germany www.shofu.de

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban