

PiezoLED™

Prophylaxe und Implantatreinigung

KaVo PiezoLED Spitzen Übersicht



KAVO

PROPHYLAXE



PIEZO Scaler Spitzen

Für die Entfernung von supra- und subgingivalen Konkrementen in allen Quadranten

Anwendung in Zahnzwischenräumen, im Sulcusbereich und auf Wurzeloberflächen

Effektive und zeitsparende Zahnsteinentfernung und Prophylaxebehandlung

Ebenfalls passend für **PIEZOSOFT**



PIEZO Scaler Tip 201

Universelle Scaling-Spitze

- Für die Entfernung von supragingivalem Zahnstein in allen Quadranten
- Von der Inzisalkante zum Sulcusbereich arbeiten
- Tangential zum Zahn anwenden
- Nur die ersten 2-3 mm der Spitze einsetzen



Mat.-Nr. 1.007.4024

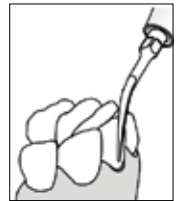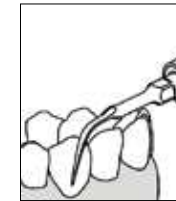

PIEZO Scaler Tip 202

- Für die Entfernung von supra- und subgingivalen Konkrementen bis zu 4 mm Taschentiefe in allen Quadranten
- Insbesondere für Zahnzwischenräume und den Sulcusbereich
- Tangential zum Zahn anwenden
- Nur die ersten 2-3 mm der Spitze einsetzen



Mat.-Nr. 1.007.4026





PROPHYLAXE

PIEZO Scaler Tip 203

Filigrane Paro Spitze

- Für die Entfernung subgingivaler Ablagerungen auf Wurzeloberflächen
- Für tiefe Zahntaschen und parodontale Kontrollbehandlungen geeignet
- Tangential zum Zahn anwenden
- Nur die ersten 2-3 mm der Spitze einsetzen
- Sanfte Behandlung, auch geeignet für Kinder

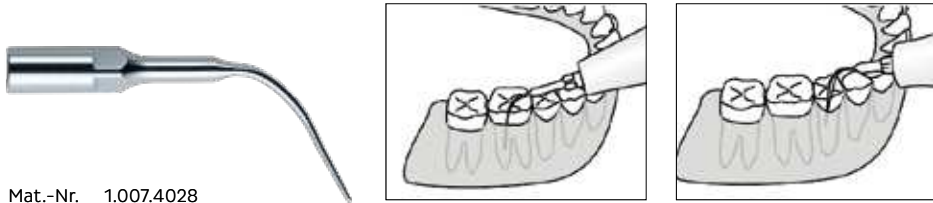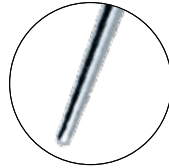

Mat.-Nr. 1.007.4028



IMPLANTREINIGUNG



PIEZO Implant Set

Für die effiziente Reinigung von Implantaten

Metallfreie Spitze verhindert die Beschädigung der Implantathülse



Sehr saubere Oberflächen ohne Aufrauung

PIEZO Implant Tip Set

- Für die Entfernung von Plaque und Zahnstein von Implantatoberflächen und Restaurationen aus Metall oder Keramik
- Für die effiziente und schonende Reinigung von Prothesenoberflächen
- Metallfreie Spitze
- 50 Anwendungen pro Aufsatz




Mat.-Nr. 1.007.4008
Refill Tip Set: 1.007.4014

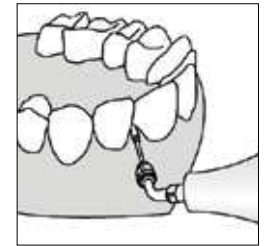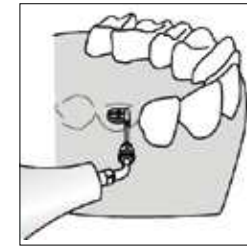

Material	Bezeichnung	PIEZO soft	Piezo LED	Inhalt
PIEZO Scaler Spitzen				
1.007.4004	PIEZO Scaler Tip Set	●	●	3 PIEZO Scaler Spitzen (je einmal Nr. 201, 202, 203 mit Drehmomentschlüssel) 6er Steribox Verschleißmesskarte
1.007.4024	PIEZO Scaler Tip 201	●	●	
1.007.4026	PIEZO Scaler Tip 202	●	●	
1.007.4028	PIEZO Scaler Tip 203	●	●	
PIEZO Implant Spitzen				
1.007.4008	PIEZO Implant Tip Set		●	Halter für PIEZO Implant Tips Schlüssel für PIEZO Implant Tip Halter 4 Aufsätze
1.007.4014	PIEZO Implant Refill Tip Set		●	4 Aufsätze

1.008.0994.de 04/21 REV.1 © Copyright Kavo Dental GmbH.

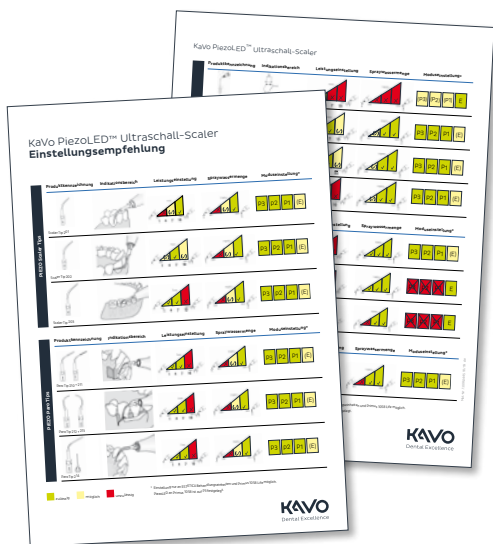

Hinweis PiezoLED:

Bitte beachten Sie unsere Einstellungsempfehlungen für die Spitzen

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban