

# PiezoLED™

## Prophylaxe und Implantatreinigung

KaVo PiezoLED Spitzen Übersicht



**KAVO**

# PROPHYLAXE



## PIEZO Scaler Spitzen

Für die Entfernung von supra- und subgingivalen Konkrementen in allen Quadranten

Anwendung in Zahnzwischenräumen, im Sulcusbereich und auf Wurzeloberflächen

Effektive und zeitsparende Zahnsteinentfernung und Prophylaxebehandlung

Ebenfalls passend für **PIEZOssoft**



### PIEZO Scaler Tip 201

Universelle Scaling-Spitze

- Für die Entfernung von supragingivalem Zahnstein in allen Quadranten
- Von der Inzisalkante zum Sulcusbereich arbeiten
- Tangential zum Zahn anwenden
- Nur die ersten 2-3 mm der Spitze einsetzen



Mat.-Nr. 1.007.4024

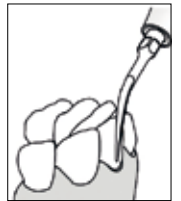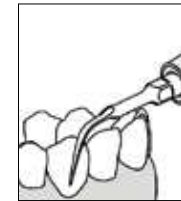


### PIEZO Scaler Tip 202

- Für die Entfernung von supra- und subgingivalen Konkrementen bis zu 4 mm Taschentiefe in allen Quadranten
- Insbesondere für Zahnzwischenräume und den Sulcusbereich
- Tangential zum Zahn anwenden
- Nur die ersten 2-3 mm der Spitze einsetzen



Mat.-Nr. 1.007.4026


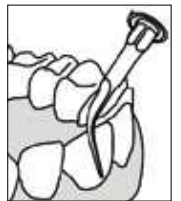


# PROPHYLAXE

## PIEZO Scaler Tip 203

Filigrane Paro Spitze

- Für die Entfernung subgingivaler Ablagerungen auf Wurzeloberflächen
- Für tiefe Zahntaschen und parodontale Kontrollbehandlungen geeignet
- Tangential zum Zahn anwenden
- Nur die ersten 2-3 mm der Spitze einsetzen
- Sanfte Behandlung, auch geeignet für Kinder

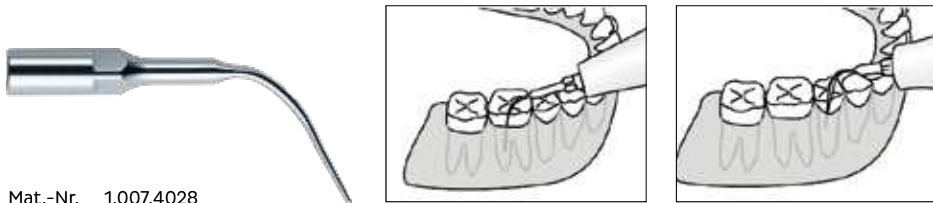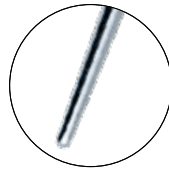

Mat.-Nr. 1.007.4028



# IMPLANTREINIGUNG



## PIEZO Implant Set

Für die effiziente Reinigung von Implantaten

Metallfreie Spitze verhindert die Beschädigung der Implantathülse



Sehr saubere Oberflächen ohne Aufrauung

## PIEZO Implant Tip Set

- Für die Entfernung von Plaque und Zahnstein von Implantatoberflächen und Restaurationen aus Metall oder Keramik
- Für die effiziente und schonende Reinigung von Prothesenoberflächen
- Metallfreie Spitze
- 50 Anwendungen pro Aufsatz




Mat.-Nr. 1.007.4008  
Refill Tip Set: 1.007.4014

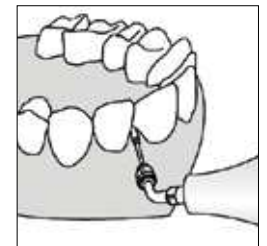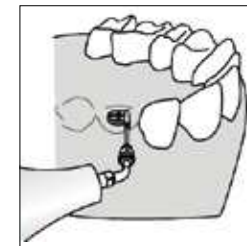

| Material                     | Bezeichnung                     | PIEZO<br>soft | Piezo<br>LED | Inhalt                                                                                                              |
|------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PIEZO Scaler Spitzen</b>  |                                 |               |              |                                                                                                                     |
| 1.007.4004                   | PIEZO Scaler Tip Set            | ●             | ●            | 3 PIEZO Scaler Spitzen (je einmal Nr. 201, 202, 203 mit Drehmomentschlüssel)<br>6er Steribox<br>Verschleißmesskarte |
| 1.007.4024                   | PIEZO Scaler Tip 201            | ●             | ●            |                                                                                                                     |
| 1.007.4026                   | PIEZO Scaler Tip 202            | ●             | ●            |                                                                                                                     |
| 1.007.4028                   | PIEZO Scaler Tip 203            | ●             | ●            |                                                                                                                     |
| <b>PIEZO Implant Spitzen</b> |                                 |               |              |                                                                                                                     |
| 1.007.4008                   | PIEZO Implant Tip Set           |               | ●            | Halter für PIEZO Implant Tips<br>Schlüssel für PIEZO Implant Tip Halter<br>4 Aufsätze                               |
| 1.007.4014                   | PIEZO Implant<br>Refill Tip Set |               | ●            | 4 Aufsätze                                                                                                          |

1.008.0994 de 04/21 REV1 © Copyright Kavo Dental GmbH.

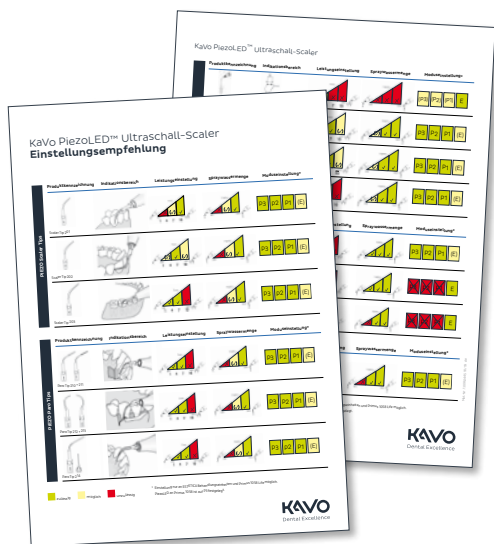

#### Hinweis PiezoLED:

Bitte beachten Sie unsere  
Einstellungsempfehlungen  
für die Spitzen

**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban