






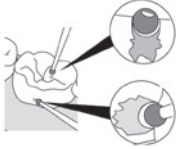

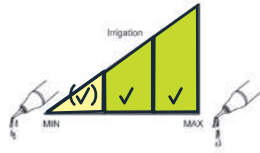

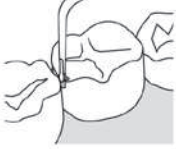
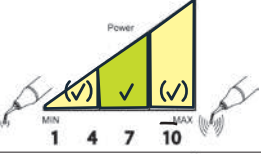
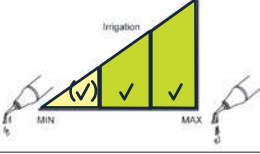

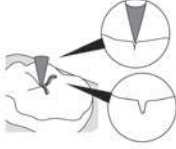
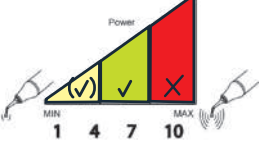
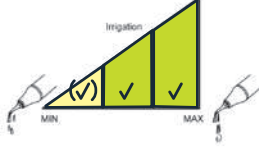



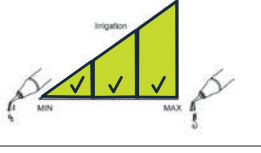



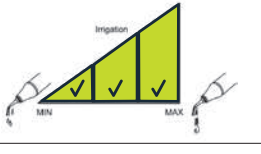



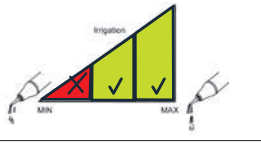

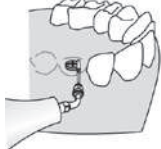

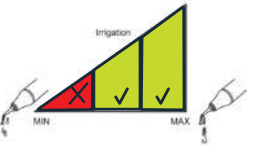
KaVo PiezoLED™ Ultraschall-Scaler Einstellungsempfehlung

PIEZO Scaler Tips	Produktkennzeichnung	Indikationsbereich	Leistungseinstellung	Spraywassermenge	Moduseinstellung*
	Scaler Tip 201				P3 P2 P1 (E)
	Scaler Tip 202				P3 P2 P1 (E)
	Scaler Tip 203				P3 P2 P1 (E)
PIEZO Paro Tips	Produktkennzeichnung	Indikationsbereich	Leistungseinstellung	Spraywassermenge	Moduseinstellung*
	Paro Tip 210 + 211				P3 P2 P1 (E)
	Paro Tip 212 + 213				P3 P2 P1 (E)
	Paro Tip 214				P3 P2 P1 (E)

■ zulässig
 ■ möglich
 ■ unzulässig

* Einstellung nur an ESTETICA Behandlungseinheiten und Primus 1058 Life möglich.
PiezoLED an Primus 1058 ist auf P3 festgelegt.

KaVo PiezoLED™ Ultraschall-Scaler

	Produktkennzeichnung	Indikationsbereich	Leistungseinstellung	Spraywassermenge	Moduseinstellung*
PIEZO Prep Tips					(P3) (P2) (P1) E
					P3 P2 P1 (E)
					P3 P2 P1 (E)
					P3 P2 P1 (E)
PIEZO Endo Tips					P3 P2 P1 (E)
		Spitze nicht verwendbar für Primus 1058 			P3 P2 P1 E
		Spitze nicht verwendbar für Primus 1058 			P3 P2 P1 E
PIEZO Implant Tips					P3 P2 P1 (E)

■ zulässig
 ■ möglich
 ■ unzulässig

* Einstellung nur an ESTETICA Behandlungseinheiten und Primus 1058 Life möglich.
PiezoLED an Primus 1058 ist auf P3 festgelegt.

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban