

SICHERE POSITIONIERUNG VON WUNDVERBÄNDEN

GEWEBEKLEBER MIT PERFEKTER REZEPTUR

PeriAcryl 90-HV dient zum einfachen Anhaften von dentalen Wundverbänden an intaktes Zahnfleisch und/oder Zahnschmelz. Damit wird eine sichere und feste Positionierung von Wundverbänden in einem Zeitraum von bis zu zwei Wochen unterstützt.

Sehr hohe Viskosität

Der neu entwickelte PeriAcryl 90-HV Gewebekleber besteht aus einer Kombination aus N-Butyl- und 2-Octyl-Cyanoacrylaten: N-Butyl zur schnellen Aushärtung und 2-Octyl zur Trocknung in Form einer homogenen Oberfläche. Zusammen ergeben sie die perfekte Rezeptur. Zusätzlich verfügt PeriAcryl über eine 9 Mal höhere Viskosität als andere auf dem Markt befindliche Cyanoacrylate. Dadurch lässt sich der Gewebekleber bei der Applikation sehr gut kontrollieren.


PeriAcryl behält bis zur Anwendung im ausgewählten Bereich seine flüssige Konsistenz. Sobald der Gewebekleber mit kleinen Feuchtigkeitsmengen an Oberflächenbereichen in Kontakt kommt, härtet er rasch aus und bildet einen Film, der sich mit den darunterliegenden Oberflächen verbindet.

Anwendung

PeriAcryl arbeitet effektiv als Flüssigkeitsbandage bei freien Bindegewebs-Transplantationen und unterstützt die Sekundärheilung durch Abdeckung des Nahtverschlusses. Es ist zu beachten, dass der Gewebekleber ausschließlich oberflächlich eingesetzt werden darf. Er resorbiert nicht, sondern löst sich über die Zeit von der Oberfläche ab. PeriAcryl 90-HV Gewebekleber sollte möglichst dünn und in kleinen Mengen aufgetragen werden. Mit der Pipetten-Spitze kann die Flüssigkeit geglättet werden und nach etwas weniger als 30 Sekunden härtet der Gewebekleber aus.

PeriAcryl 90-HV wird in einer wiederverschließbaren Flasche mit 5 ml Füllvolumen geliefert. Zur leichten Applikation werden die mitgelieferten Einweg-Pipetten (50 Stück) verwendet.

Die Flüssigkeit kann direkt aus der Flasche oder über die ebenfalls mitgelieferte wiederverwendbare Schale (autoklavierbar) aufgenommen werden.

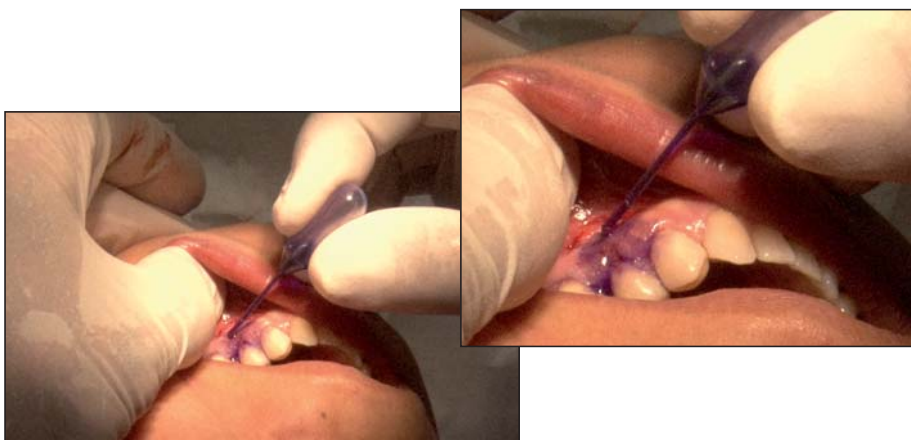

Bestellnr. Bezeichnung

7432250 PeriAcryl 90-HV (5 ml)

American Dental Systems GmbH Günther Jerney
Johann-Sebastian-Bach-Straße 42 · D-85591 Vaterstetten

Bestellung und Beratung:
Telefon: +49 (0) 8106/300-300 · Fax: +49 (0) 8106/300-310
E-Mail: info@ADSystems.de · Internet: www.ADSYSTEMS.de

 **AMERICAN**
Dental Systems

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban