

# Produktinformation

## Periomat Intra/C<sup>+</sup> Fixierkonzentrat



### Periomat Intra/C<sup>+</sup> Fixierkonzentrat auf einen Blick

- Einteiliges Fixierkonzentrat zur Fixage von intraoralen Röntgenfilmen.
- Sichere Archivierung entsprechend der RÖV.
- Einfach in der Anwendung: Einfüllen – verdünnen – fertig.

### Eigenschaften

Das Periomat Intra/C<sup>+</sup> Fixierbad ist ein optimales Schnellfixierbad für alle Röntgenfilm-Entwicklungsmaschinen von Dürr Dental, die ausschließlich dazu geeignet sind, intraorale Röntgenfilme zu verarbeiten. Der Periomat Intra/C<sup>+</sup> Fixierer hat die Aufgabe, nicht reduziertes Silberbromid aus dem Film zu entfernen. Weiterhin muss das Fixierbad durch geeignete Puffersubstanzen einen stets konstanten pH-Wert garantieren, auch wenn mit dem Film gewisse Entwicklungsmengen eingeschleppt werden. Die dritte Aufgabe besteht in der Härtung der Filmgelatineschicht, damit keine Ablösung von der Trägersubstanz erfolgt.

### Produktzusammensetzung

Das Periomat Intra/C<sup>+</sup> Fixierbad reagiert schwach sauer und enthält Ammoniumthiosulfat zur Fixage, Natriumsulfit als Oxidationschutz, organische Säuren, Hilfsstoffe in wässriger Lösung.

### Anwendung

Das Periomat Intra/C<sup>+</sup> Fixierkonzentrat wird als einteiliges Konzentrat geliefert. Der Ansatz der Gebrauchslösung muss entsprechend der Gebrauchsanweisung erfolgen. Ein Ansatz ergibt 1 l gebrauchsfertige Fixierlösung.

### Umweltverhalten

Gebrauchte Fixierbäder sind entsprechend den jeweils örtlich geltenden Bestimmungen zu entsorgen (Abfallschlüssel: EAK 090104). Die Verpackung ist aus Polyethylen und Polypropylen und somit stofflich und thermisch verwertbar. Für Recycling Flasche mit Wasser ausspülen.

Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

### Physikalische Daten

Konzentrat:

Aussehen: klare, farblose Flüssigkeit

Dichte:  $D = 1,2 \pm 0,2 \text{ g/ml (20 °C)}$

pH-Wert:  $4,9 \pm 0,5$

Gebrauchslösung:

Aussehen: klare, farblose Lösung

pH-Wert:  $4,8 \pm 0,5$

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf eingehenden internen und externen wissenschaftlichen Untersuchungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Unsere Haftung hierfür beurteilt sich nach unseren „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“, die bei uns jederzeit angefordert werden können.

# Produktinformation

## Periomat Intra/C<sup>+</sup> Fixierkonzentrat

### Haltbarkeit

Konzentrat: 18 Monate

### Gebrauchslösung:

3 Wochen bei 20 °C bzw. 24/25 °C mit Badheizung und max. 350 intraoralen Röntgenfilmen im Format 3 cm x 4 cm im Periomat und Periomat plus von Dürr Dental bzw. 200 intraorale Röntgenfilme im Format 3 cm x 4 cm in der XR 04.

### Packungsgröße

Set mit:

4 x 500 ml-Flasche Entwicklerkonzentrat

4 x 500 ml-Flasche Fixierkonzentrat

Einteilige Konzentrate für 4 Ansätze (ergeben 4 x 1 l Entwickler- und 4 x 1 l Fixierer-Gebrauchslösung)

### Lagerung

Konzentrate zwischen 5 °C und 25 °C lagern.

### Allgemeine Hinweise

Periomat Intra/C<sup>+</sup> nicht mit anderen Produkten mischen. FEs kann zu Abweichungen von Produktfarbe/Geruch kommen, insbesondere bei der Lagerung im Sonnenlicht. Diese Farb- bzw. Geruchsveränderung hat jedoch keinen Einfluss auf die Desinfektionsleistung des Produktes. Anwendung ausschließlich durch Fachpersonal. Alle im Zusammenhang mit dem Produkt auftretenden schwerwiegenden Vorkommnisse sind umgehend dem Hersteller und der zuständigen Behörde Ihres Mitgliedstaats zu melden.

### Zubehör

WR 2000 Sprühreiniger

### Gefahrenhinweise

Das Periomat Intra/C<sup>+</sup> Fixierkonzentrat ist nach CLP-Verordnung eingestuft und nicht kennzeichnungspflichtig.



### Vertrieb

Dürr Dental SE  
Höpfigheimer Str. 17  
74321 Bietigheim-Bissingen  
Germany  
[www.duerrdental.com](http://www.duerrdental.com)  
[info@duerrdental.com](mailto:info@duerrdental.com)

### Hersteller

orochemie GmbH + Co. KG  
Max-Planck-Straße 27  
70806 Kornwestheim  
Germany  
[www.orochemie.de](http://www.orochemie.de)  
[info@orochemie.de](mailto:info@orochemie.de)