

#whdentalwerk



video.wh.com

Jetzt bei Ihrem
Fachhändler oder
auf **wh.com**




Piezo- Spitzensystem.

Langlebig. Sicher. Effektiv.
Von Profis für Profis.



W&H Piezo-Spitzensystem

Das W&H Spitzensystem wurde gemeinsam mit Endanwendern entwickelt und speziell auf die technischen Anforderungen der W&H Piezotechnologie abgestimmt. Es ist perfekt für die Anforderungen der jeweiligen Anwendungsgebiete und die einzelnen Behandlungsschritte.

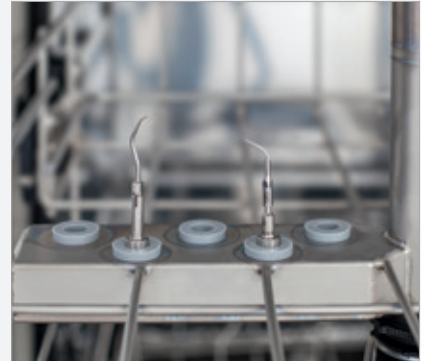

Hygiene und Pflege

Sämtliche Spitzen und der Spitzenwechsler sind thermodesinfizierbar und sterilisierbar.



Schnelle, einfache und sichere Handhabung



Der W&H Spitzenwechsler ermöglicht eine schnelle und sichere Handhabung. Die integrierte Drehmomentkontrolle vermeidet ein Überdrehen und ermöglicht das einfache und sichere Wechseln der Spitze.



Universalspitzen


Einfache, schonende und effiziente supragingivale Zahnsteinentfernung in allen Quadranten.

Scaling

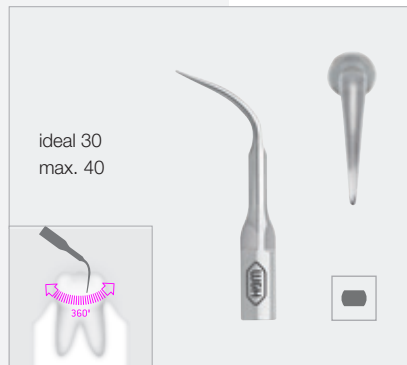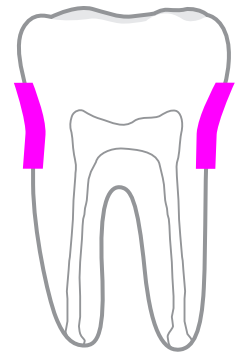


1UQ / 1U / 1US

Zur Grobdeposition von supragingivalem Zahnstein.

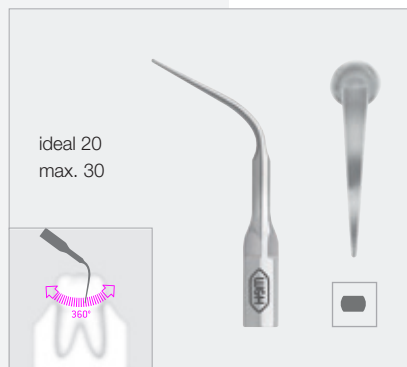


2UQ / 2U / 2US

Zur Feindeposition von supragingivalem Zahnstein, sowie für die Behandlung von Recall Patienten.

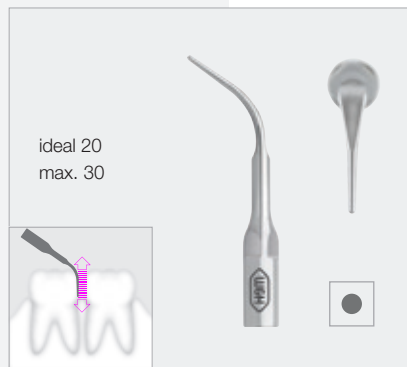

3UQ / 3U / 3US

Zur Feindeposition von supragingivalem Zahnstein, besonders geeignet für die Interdentalreinigung.

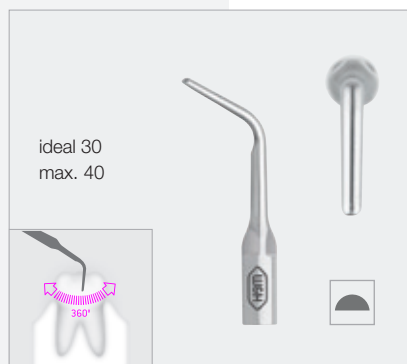



4U

Zur Grobdeposition von supragingivalem Zahnstein, speziell für die Entfernung von großen Zahnsteinflächen.

Parodontologiespitzen

Durch ihre schlanke Form ist ein optimaler und zugleich schonender Zugang zu den Parodontaltaschen möglich.

Paro

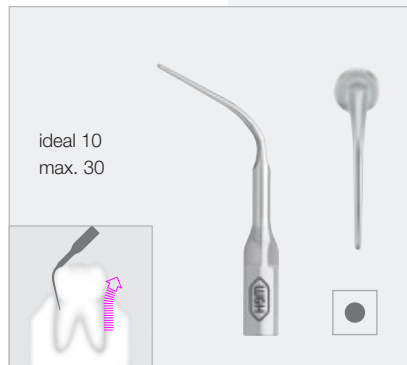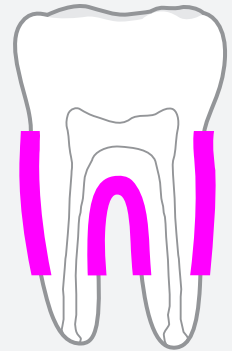


1PQ / 1P / 1PS

Entfernung von subgingivalen Ablagerungen, besonders geeignet für tiefe Parodontaltaschen.




3PrQ / 3Pr

Rechtsgebogene Spitze für das parodontale Debridement, empfohlen für die Erhaltungsbehandlung von mitteltiefen bis tiefen Taschen sowie Furkationen.

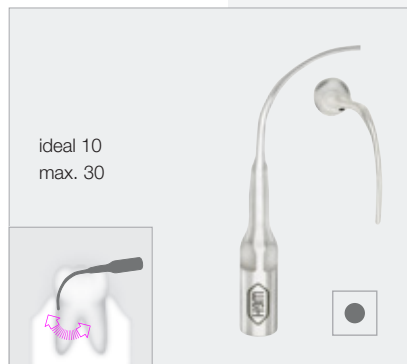

3PIQ / 3PI

Linksgebogene Spitze für das parodontale Debridement, empfohlen für die Erhaltungsbehandlung von mitteltiefen bis tiefen Taschen sowie Furkationen.

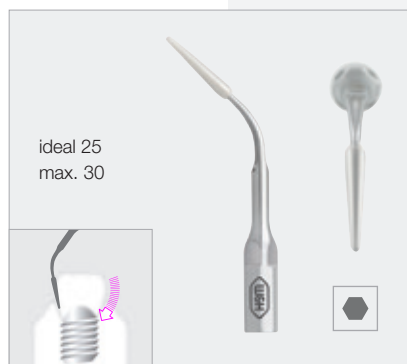

1IQ / 1I Implant-clean



Spitze zur effizienten und schonenden Reinigung von Implantaten und den dazugehörigen Restaurationen.

Für die unterstützende Parodontitistherapie (UPT), Recall und Biofilmmanagement.

Parodontologiespitzen


Diamantierte Spitzen unterstützen die gründliche Reinigung der Wurzeloberfläche in der Initialtherapie von Parodontitispatienten.

Paro

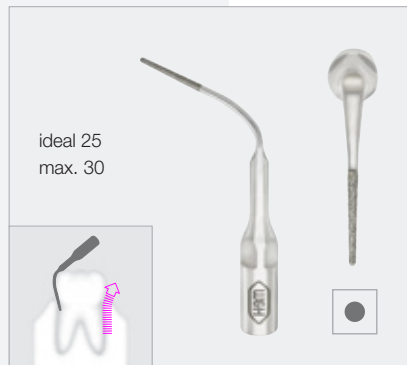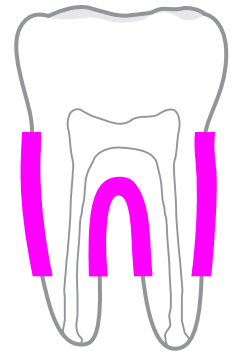


4PQ / 4P / 4PS

Diamantierte Spitze zur Reinigung der Wurzeloberfläche.

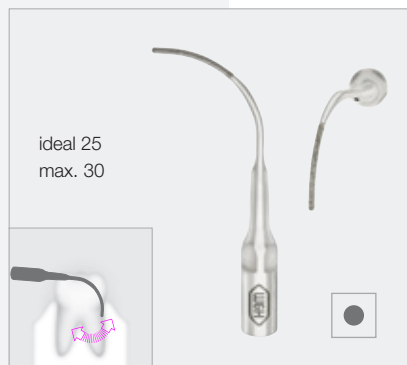


5PrQ / 5Pr

Rechtsgebogene Spitze mit einer Diamantierung zur Reinigung der Wurzeloberfläche.

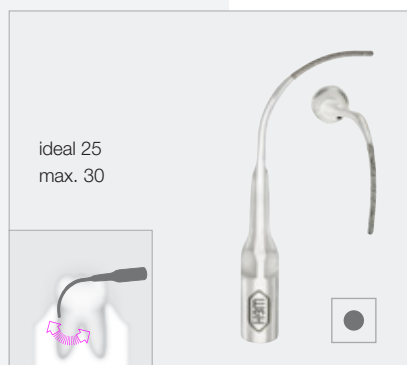

5PIQ / 5PI

Linksgebogene Spitze mit einer Diamantierung zur Reinigung der Wurzeloberfläche.

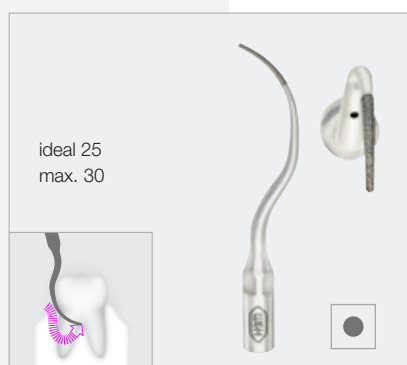

5PQ / 5P



Diamantierte Spitze zur Reinigung von Furkationen und Konkavitäten.

Für die initiale Parodontitistherapie und Entfernung von Konkrementen.

Endodontiespitzen

Endo

Ob Spülen eines Wurzelkanals oder die komplexe Revision an einem Endodontiepatienten. W&H bietet Ihnen das perfekte Sortiment an Endospitzen.

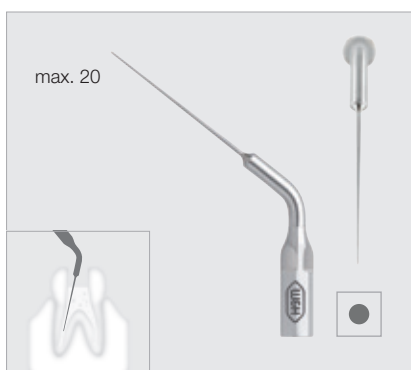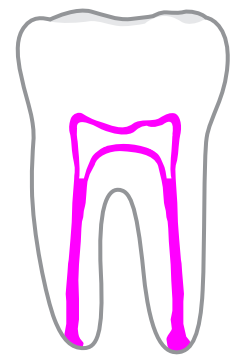


1E / 1ES

Nichtschneidendes Instrument zur effektiven Spülungsaktivierung im Wurzelkanalsystem.



2E

Spitze zum lateralen thermischen Kondensieren von Guttapercha.

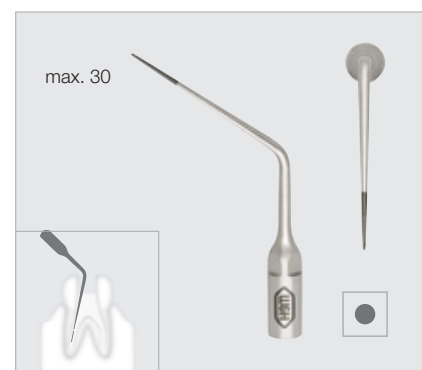


3E

Entfernen von abgebrochenen Wurzelkanal-Instrumenten.



4E

Pulpakammerboden Präparation.

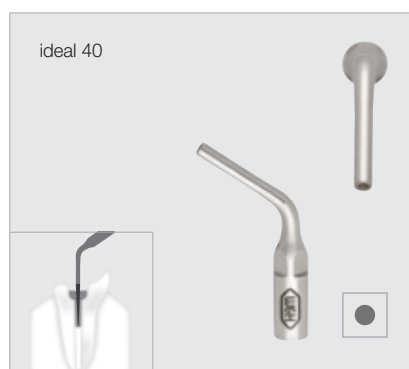

5E

Einvibrieren und Entfernen von Wurzelkanal-Stiften.





6E

Entfernung von Wurzelkanal-Füllungen und Wurzelkanal Kalzifizierungen.

Restaurationsspitzen

Die Spitzen sind die perfekte Ergänzung zu Ihren Hand- und Winkelstücken und ermöglichen durch die Diamantierung eine hohe Abtragsleistung.


Restoration

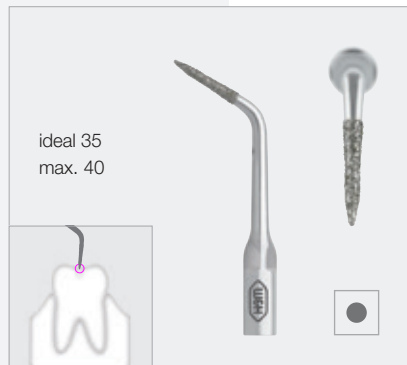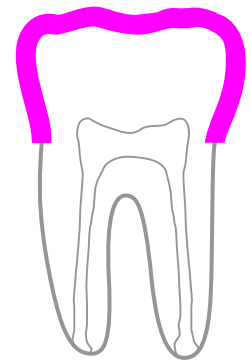

1R
Erweiterung von Fissuren.



2R
Diamantierte Spitze zur Veneerpräparation für eindeutig definierte Präparationsränder bei maximalem Schutz der Gingiva und des Nachbarzahns.

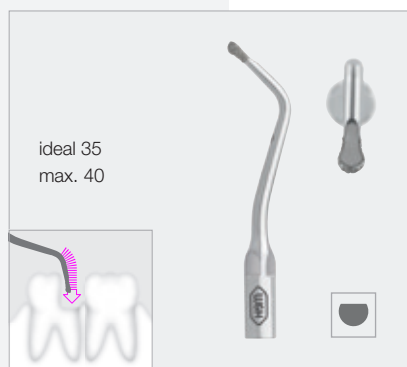

3Rd
Teildiamantierte Spitze zum Finieren approximaler distaler Kavitätenränder.



3Rm
Teildiamantierte Spitze zum Finieren approximaler mesialer Kavitätenränder.

Kompatibilität von Spitzen mit W&H Handstücken

	Q-Link*	W&H/EMS/Mectron			W&H/NSK/Satelec**		
	PB-5 L Q	PB-5 L	PA-1 LED	PB-3	PB-5 L S	PB-3 LED S	PB-3 S
Tigon+			X			X	
Proxeo Ultra	X	X			X		
Pyon 2				X			
Built-In	X	X		X	X		X

* Q-Link Spitzen (z. B. 1UQ, 2UQ) sind mit dem PB-5 L Q kompatibel.

** W&H Spitzen mit Satelec Gewinde (z. B. 1US, 2US) sind mit den W&H Handstücken PB-5 L S, PB-3 LED S und dem PB-3 S kompatibel.

Hinweis: EMS®, Mectron®, NSK® und Satelec® sind Marken von Drittparteien, die mit W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH nicht in Verbindung stehen. Bei Verwendung von Spitzen von Drittanbietern hat der Anwender für die korrekte Einstellung der Leistungsparameter des W&H Piezogerätes zu sorgen.

Hersteller:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Vertrieb:

W&H Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 3b
83410 Laufen, **Deutschland**
t +49 8682 8967-0
f +49 8682 8967-11
office.de@wh.com
wh.com

W&H Austria GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-239
f +43 6274 6236-890
office.at@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, **Schweiz**
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban