

Leicht in
den Sulkus
applizierbar

Der Faden aus der Kompule!

VOCO Retraction Paste

ADSTRINGIERENDE PASTE ZUR EFFEKTIVEN TEMPORÄREN
ERÖFFNUNG UND TROCKENLEGUNG DES SULKUS

Der Faden aus der Kompule

ADSTRINGIERENDE PASTE ZUR EFFEKTIVEN TEMPORÄREN ERÖFFNUNG UND TROCKENLEGUNG DES SULKUS

Perfekte Abformungen, Feuchtigkeitskontrolle und schonendes Weichgewebsmanagement sind unverzichtbar für exakte Kronenränder, perfekten Randschluss, langlebige und ästhetische Restaurationen.

In der Praxis unverzichtbar!

VOCO Retraction Paste ist Ihr unverzichtbarer Helfer für die effektive temporäre Eröffnung und Trockenlegung des Sulkus. Damit ist die Voraussetzung für erfolgreiche konventionelle oder digitale Abformung geschaffen.

VOCO Retraction Paste lässt sich einfach und hygienisch direkt aus dem *SingleDose Caps*, eine Entwicklung der VOCO Ingenieure, in den Sulkus applizieren und reicht dabei für bis zu 3 Sulki. Dank eines weichen und biegsamen Caps-Kunststoffs kann die Applikation gewebeschonender und damit angenehmer für Ihre Patientinnen und Patienten als beim Arbeiten mit Metallkanülen oder beim Fadenlegen erfolgen. Die Pastenviskosität ist entsprechend der klinischen Behandlungsanforderung entwickelt worden. Je nachdem, wie viel Druck auf die Paste gegeben wird, verfügt sie über differenzierte Viskositätsstufen, dem sogenannten Viscosity Change. Die Paste ist leicht ausdrückbar, fließt gut an und ist mit geringem Druck punktgenau zu applizieren. Sie ist standfest im Sulkus – dies führt zu einer effektiven temporären Aufweitung.

Die adstringierend wirkende Aluminiumchloridhaltige Paste stoppt etwaige Blutungen und verdrängt Feuchtigkeit. Bereits nach kurzer Einwirkzeit von 1 – 2 Minuten ist die kontrastreiche VOCO Retraction Paste gut abzusprühen. Die Paste kann als Alternative oder in Kombination z. B. mit Retraktionsfäden verwendet werden. Dabei ist es Ihnen überlassen, ob Sie klassisch mit Abformmaterial oder digital mit Intraoralscanner eine Abformung nehmen.

Indikationen

Zur vorübergehenden Verdrängung der marginalen Gingiva und Trockenlegung des Sulkus gingivalis bei gesundem Parodont, zum Beispiel vor

- Abformungen analog oder digital
- Zementierung von temporären und definitiven Restaurationen
- Anfertigung von Füllungen der Klassen II und V

Vorteile

- **Dünne Kanüle mit biegsamer Spitze** – leichte und gezielte Applikation in den Sulkus
- **Viscosity Change** – Pastenkonsistenz variiert bei Applikation und Sulkusaufweitung
- **Gute Sichtbarkeit** – kontrastreich zur Gingiva
- **Eine saubere Sache** – schnell und leicht abzusprühen

Handelsformen

REF 1012 Caps 25 x 0,3 g

REF 1013 Caps 100 x 0,3 g



VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
www.voco.dental

VOCO-Kundenservice

Freecall: 00 800 44 444 555
Fax: +49 (0) 4721-719-2931
service@voco.de

Zu beziehen durch:

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban