

SONICflex®

Catálogo de puntas.




**Nuevas
aplicaciones**

Stripping / Shaping
Prolongaciones
quirúrgicas de
coronas




KaVo. Dental Excellence.

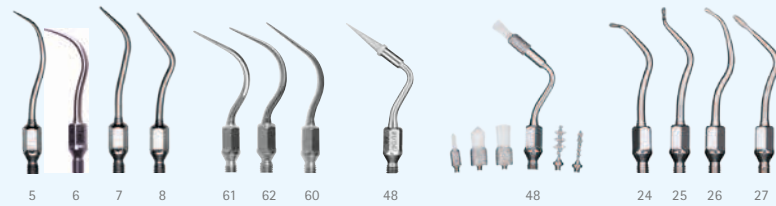


scaler | paro | implant | clean | rootplaner




micro | bevel | stripping, shaping | seal | caries

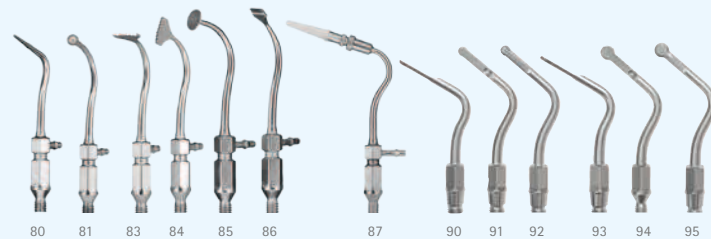

bone | crown extension

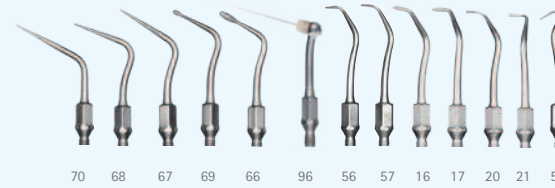

endo | retro

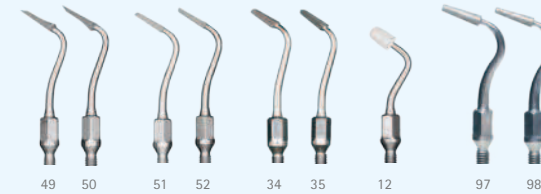

gold | ceram | CAD/CAM | cem | crown

Máxima variedad en puntas.

Gracias a las múltiples posibilidades que le ofrece el SONIFlex, se convertirá en poco tiempo en su instrumento más utilizado.

Gracias a sus numerosas puntas, se adapta de manera exacta a sus necesidades.

Numerosas posibilidades; beneficios y ventajas para usted:

- Más puntas y, por tanto, más posibilidades de aplicación que el resto de los air scalers
- Más de 50 puntas diferentes
- Para todos los ámbitos de aplicación
- La base para un tratamiento satisfactorio y mínimamente invasivo



SONICflex® Información general de instrumentos

KaVo **master** series



Un cambio de puntas fácil y rápido – sólo un giro también con conexión para acoplamientos Sirona

KaVo **expert** series



KaVo **smart** series



Su ventaja diaria en términos de rendimiento.

Con KaVo SONICflex dispone del Aircaler más potente y silencioso de su clase. Es, sin duda, el instrumento con la mayor gama de aplicaciones. Gracias a los niveles de potencia ajustables, le ayudará de forma activa en todas las indicaciones de forma consistente y precisa.

Técnica sin precedentes. Todo son ventajas:

- Potencia regulable en tres niveles: condiciones óptimas de trabajo en todas las indicaciones.
- Mucho más silencioso que los productos comparables de otros fabricantes (hasta 15 dB); protege la salud del personal de la consulta y la de sus pacientes.
- Sin necesidad de aparatos adicionales, fácil de conectar al acoplamiento MULTIflex de KaVo o SIRONA, sin molestos cables cruzados.
- La mejor iluminación: 25.000 lux: para una visibilidad relajada sin fatiga ocular.
- Calidad KaVo: SONICflex 2008 L ya es la tercera generación de scalers de KaVo, en la que se concentran 25 años de know-how y experiencia.

Punta SONICflex scaler n.º 5

Tratamiento: para eliminar sarro dental extenso
Forma: universal



Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



0.571.5171
1.005.8949

Punta SONICflex scaler n.º 6

Tratamiento: para eliminar sarro dental supragingival extenso
Forma: hoz



Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



0.571.5181
1.005.8950

Punta SONICflex scaler n.º 7

Tratamiento: para eliminar sarro dental supragingival extenso
Forma: perio



Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



0.571.5191
1.005.8951

Punta SONICflex scaler n.º 8

Tratamiento: para eliminar sarro dental supra y subgingival
Forma: perio, extra larga



Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS




0.571.5371
1.006.1953

Punta SONICflex scaler n.º 48

Tratamiento: eliminación de placa dental, limpieza de fisuras, cavidades y limpieza de muñón para corona
Forma: Varios acoplamientos, de un sólo uso



Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

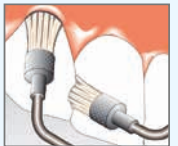

Cepillo clean N° 1
Cepillo clean N° 2
Cepillo clean N° 3
Cepillo clean N° 4
Cepillo clean N° 5
Cepillo clean N° 6
Punta n.º 48
Punta N° 48 A

0.571.0001
1.006.2026
0.571.0402
0.571.0412
0.571.0422
0.571.0432
0.571.0472
0.571.0482
0.571.0401
1.006.1982

Punta SONICflex paro N° 60

Tratamiento: limpieza suave de bolsas en la terapia de periodontitis, limpieza efectiva de bolsas hasta una profundidad de 9 mm. Para la zona de incisivos, superficies lisas

Forma: punta alargada y recta, superficie redondeada



Referencia: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



0.571.7402
1.006.1934

Punta SONICflex paro N°. 61

Tratamiento: limpiar desde el primer cuadrante hasta el incisivo medio desde la cara bucal, luego los dientes anteriores, premolares y molares del segundo cuadrante desde la cara palatina

Forma: punta doblada, **izquierda**- superficie redondeada



Referencia: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



0.571.7412
1.006.1935

Punta SONICflex paro N°. 62

Tratamiento: limpiar desde el primer cuadrante hasta el incisivo medio desde la cara bucal, luego los dientes anteriores, premolares y molares del segundo cuadrante desde la cara palatina

Forma: Punta doblada, **derecha** - superficie redondeada



Referencia: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



0.571.7422
1.006.1936

Punta SONICflex implant

Tratamiento: eliminación eficaz de la placa subgingival y del sarro en implantes

Forma: puntas cuneiformes, con pieza de plástico de un solo uso (PEEK)



Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS
Base de plástico desechable (30 unidades)



1.003.8167
1.006.2027
1.003.8168

Periodontología



SONICflex rootplaner punta N° 24

Tratamiento: para bifurcaciones de difícil acceso; permite también un acceso a las entradas furcacionales proximales con línea cerrada de dientes

Forma: brote contraangular, pequeño, **izquierda**, diamantado D25



Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5621
1.006.1957

SONICflex rootplaner punta N° 25

Tratamiento: para bifurcaciones de difícil acceso; permite también un acceso a las entradas furcacionales proximales con línea cerrada de dientes

Forma: brote contraangular, pequeño, **derecha**, diamantado D25



Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5631
1.006.1959

SONICflex rootplaner punta N° 26

Tratamiento: limpieza efectiva de superficies lisas y cóncavas

Forma: universal, brote pequeño, diamantado D25




Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5641
1.006.1961

SONICflex rootplaner punta N° 27

Tratamiento: limpieza efectiva de superficies lisas y cóncavas

Forma: perio, extra larga, brote, grande, diamantado D25

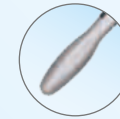

Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5651
1.006.1963

Periodontología



Micropunta SONICflex n.º 30

Tratamiento: tratamiento mínimamente invasivo para caries incipientes
Forma: semiesfera mesial pequeña, diamantado D46



Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS




0.571.6811
1.006.1969

Micropunta SONICflex n.º 31

Tratamiento: tratamiento mínimamente invasivo para caries incipientes
Forma: semiesfera distal pequeña, diamantado D46



Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

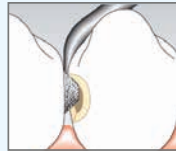

0.571.6801
1.006.1971

Micropunta SONICflex n.º 32

Tratamiento: tratamiento mínimamente invasivo para caries incipientes
Forma: semiesfera mesial grande, diamantado D46



Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS




0.571.6831
1.006.1973

Micropunta SONICflex n.º 33

Tratamiento: tratamiento mínimamente invasivo para caries incipientes
Forma: semiesfera distal grande, diamantado D46



Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

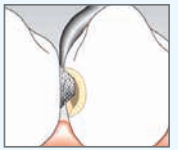

0.571.6821
1.006.1975

Punta SONICflex bevel n.º 58

Tratamiento: los bordes de cavidades proximales están sesgados
Forma: mesial, diamantado D46



Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS




0.571.7392
1.006.1988

Punta SONICflex bevel n.º 59

Tratamiento: los bordes de cavidades proximales están sesgados
Forma: distal, diamantado D46



Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

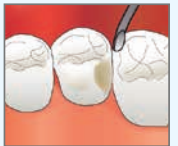

0.571.7382
1.006.1990

Mínimamente invasivo



Punta SONICflex seal n.º 45

Tratamiento: preparación mínimamente invasiva de fisuras, apertura de fisuras, indoloro
Forma: cónico, punta recta Ø 0,5 mm, diamantado D46



Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



1.000.8323
1.007.1506

Punta SONICflex carieux D n.º42

Tratamiento: excavación respetuosa, fina y sonoabrasiva de la caries
Forma: esférica, Ø 0,8 mm, diamantado D 64




Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS




1.000.7105
1.006.1980

Punta SONICflex carieux D n.º43

Tratamiento: excavación respetuosa, fina y sonoabrasiva de la caries
Forma: esférica, Ø 1,2 mm, diamantado D 64

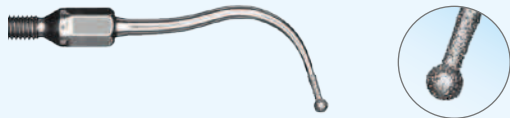

Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

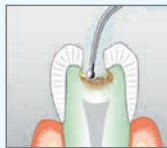

1.000.7167
1.006.1981

Punta SONICflex carieux TC n.º 71

Tratamiento: eliminación por capas del grueso de la sustancia cariosa
Forma: esférica, Ø 1,0 mm, metal duro



Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



1.000.7362
1.006.2002

Punta SONICflex carieux TC n.º 72

Tratamiento: eliminación por capas del grueso de la sustancia cariosa
Forma: esférica, Ø 1,4 mm, metal duro



Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS




1.000.7363
1.006.2004

Mínimamente Invasivo

Punta SONICflex prep gold n.º 49, mesial

Tratamiento: preparación precisa de diversos ángulos en la zona del margen según la "primera preparación" realizada de manera rotante; esto permite una mejor restauración dental.

Forma: **mesial**, puntas con ángulos de borde definidos: lateral - 60° cervical - 30°, diamantado D 46

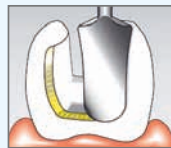


Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7212
1.006.1983

Punta SONICflex prep gold n.º 50, distal

Tratamiento: preparación precisa de diversos ángulos en la zona del margen según la "primera preparación" realizada de manera rotante; esto permite una mejor restauración dental

Forma: **distal**, puntas con ángulos de borde definidos: lateral - 60° cervical - 30°, diamantado D 46

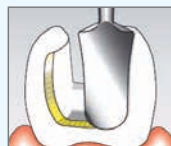

Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7222
1.006.1984

Punta SONICflex prep ceram n.º 51

Tratamiento: preparación precisa de diversos ángulos en la zona del margen, paso armonioso de las zonas de margen cervicales y laterales

Forma: **mesial**, puntas con ángulos de borde definidos: lateral - 60° cervical - 75°, diamantado D 46




Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7262
1.006.1985

Punta SONICflex prep ceram n.º 52

Tratamiento: preparación precisa de diversos ángulos en la zona del margen, cambios armonioso de las zonas marginales cervicales y laterales

Forma: **distal**, puntas con ángulos de borde definidos: lateral - 60° cervical - 75°, diamantado D 46

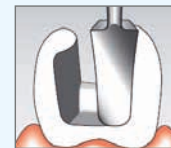

Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / L

0.571.7272
1.006.1986


Prótesis



Punta SONICflex prep CAD / CAM n° 34

Tratamiento: coordinación perfecta de la preparación de cavidades con procesos de tratamiento en sistemas CAD-CAM

Forma: **mesial**, ángulo lateral 30°, ángulo cervical 90°, diamantado D 46

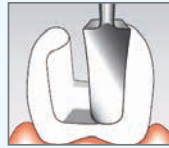

Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.002.1984
1.006.1977

Punta SONICflex prep CAD / CAM n° 35

Tratamiento: coordinación perfecta de la preparación de cavidades con procesos de tratamiento en sistemas CAD-CAM

Forma: **distal**, ángulo lateral 30°, ángulo cervical 90°, diamantado D 46



Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.002.1986
1.006.1979

Punta SONICflex stripping N°. 73

Tratamiento: Separación previa a la preparación de muñones de coronas
Redondeo de pasos afilados en el límite de preparación proximal en la preparación de cavidades
Preparación anatómica de las superficies proximales de obturaciones con composite
Reducción proximal de esmalte dental en ortodoncia (p.ej. con aplicación Invisalign)

Forma: plana, mesial, con diamante, (D 25)



Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.2993
1.011.2994

Punta SONICflex stripping N°. 74

Tratamiento: Separación previa a la preparación de muñones de coronas
Redondeo de pasos afilados en el límite de preparación proximal en la preparación de cavidades.
Preparación anatómica de las superficies proximales de obturaciones con composite
Reducción proximal de esmalte dental en ortodoncia (p.ej. aplicación Invisalign)

Forma: plana, distal, con diamante, (D 25)



Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS


1.011.2995
1.011.2996

Prótesis

Punta SONICflex shaping N°. 75

Tratamiento: Separación previa a la preparación de muñones de coronas
Ajuste perfecto en las zonas proximales de las cavidades.
Preparación anatómica de las superficies proximales de obturaciones con composite
Reducción proximal de esmalte dental en ortodoncia (p.ej. aplicación Invisalign)

Forma: arqueada, mesial, con diamante, (D 25)

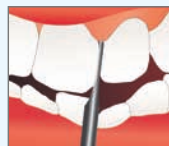

Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.2997
1.011.2998

Punta SONICflex shaping N°. 76

Tratamiento: Separación previa a la preparación de muñones de coronas
Ajuste perfecto en las zonas proximales de las cavidades.
Preparación anatómica de las superficies proximales de obturaciones con composite
Reducción proximal de esmalte dental en ortodoncia (p.ej. aplicación Invisalign)

Forma: arqueada, distal, con diamante, (D 25)



Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.2999
1.011.3000

Punta SONICflex cem n.º 12

Tratamiento: implantación suave de Inlays
Forma: capuchón redondeado de plástico



Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS
Accesorio CEM



0.571.5431
1.006.2021
0.571.7142

Punta SONICflex crown prep n°97

*a partir del 16 de mayo

Tratamiento: preparación de muñón de corona - ideal para esta indicación es la combinación de instrumentos de preparación de muñones de coronas y puntas vibrantes de forma similar.

Forma: radial, diamantado D46



Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L y 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



1.008.6383
1.008.6384

Punta SONICflex crown prep n°98

*a partir del 16 de mayo

Tratamiento: preparación de muñón de corona - ideal para esta indicación es la combinación de instrumentos de preparación de muñones de coronas y puntas vibrantes de forma similar.

Forma: plana, diamantado D46



Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L y 2003 / L
adecuada para SONICflex 2008 / L, 2008 S




1.008.6385
1.008.6386

Prótesis

Punta SONICflex retro n.º 56

Tratamiento: búsqueda y determinación del conducto radicular. Facilita enormemente el trabajo de una perforación retrógrada real

Forma: punta cilíndrica muy delgada, **izquierda**, diamantado D 46

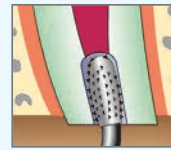


Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7322
1.006.2040

Punta SONICflex retro n.º 57

Tratamiento: búsqueda y determinación del conducto radicular. Facilita enormemente el trabajo de una perforación retrógrada real

Forma: punta cilíndrica muy delgada, **derecha**, diamantado D 46

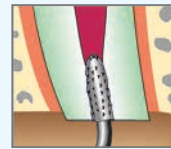


Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7332
1.006.2041

Punta SONICflex retro n.º 16

Tratamiento: preparación del conducto radicular, acceso más fácil en caso de una encorvadura de la raíz

Forma: **izquierda**, cilindro pequeño, diamantado D 64

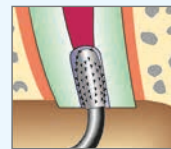


Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5541
1.006.2036

Punta SONICflex retro n.º 17

Tratamiento: preparación del conducto radicular, acceso más fácil en caso de una encorvadura de la raíz

Forma: **derecha**, cilindro pequeño, diamantado D64

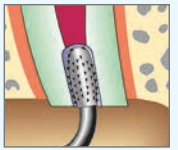


Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5581
1.006.2035

Punta SONICflex retro n.º 20 y n.º 21

Tratamiento: preparación de socavamientos. Tratamiento del canal radicular según el eje en caso de defecto óseo mínimo.

Forma: piriforme, **pequeño, izquierda** (n.º 20), **derecha** (n.º 21), diamantado D 64

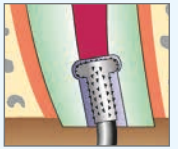

Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5521
1.006.2037




Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5561
1.006.2038

Punta SONICflex retro n.º 55

Tratamiento: para raíces, cuyos ápices están inclinados fuertemente hacia la cara oral

Forma: **diamantado D 46**

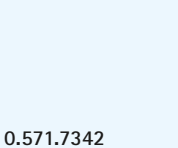

Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7342
1.006.2039

Apicectomía

Punta SONICflex endo n.º 66

Tratamiento: configuración de las entradas del conducto, eliminación de excedentes
Forma: brote, grande, diamantado D 46



Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.000.5825
1.006.1992

Punta SONICflex endo n.º 67

Tratamiento: ampliación de canales grandes
Forma: cónico 125°, diamantado D 46



Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



1.000.5822
1.006.1994

Punta SONICflex endo n.º 68

Tratamiento: ampliación de canales grandes
Forma: cónico 112°, diamantado D 46



Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS


1.000.5823
1.006.1996

Punta SONICflex endo n.º 69

Tratamiento: eliminación de restos del relleno del canal radicular
Forma: brote, pequeño, diamantado D 46



Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

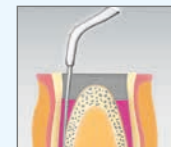


1.000.5827
1.006.1998

Punta SONICflex endo n.º 70

Tratamiento: para canales especialmente largos y anchos
Forma: cónica 117°, diamantado D 25
parte delantera no está diamantada



Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

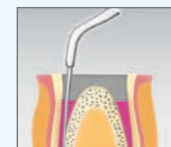

1.000.5821
1.006.2000

Punta SONICflex Endo clean n.º 96


*a partir del 16 de mayo

Tratamiento: para limpieza de conducto radicular para la eliminación de residuos y smear layer así como para aumentar la solución antibacteriana
Forma: ángulo de 105° o 75°



Número de pedido: apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

Set A SONICflex Endo clean	1.007.1142	Agujas endo clean para SONICflex 2000 N / L, 2003 y 2008
Punta A SONICflex Endo clean	1.008.5164	SONICflex Endo clean 015 blanco
apta para SONICflex 2000 N / L y 2003 / L		SONICflex Endo clean 020 amarillo
Punta SONICflex Endo clean	1.008.5163	SONICflex Endo clean 025 rojo
Set SONICflex Endo clean	1.006.2045	

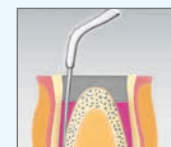

Endodoncia

Punta SONICflex crown extension 020 N°. 90

Tratamiento: Prolongación quirúrgica de corona sin formación de solapamientos para restablecer el ancho biológico en:
 transcurso asimétrico de arcada
 Gummy smile
 Lesión del ancho biológico

Forma: pequeña, recta, diamantada en la superficie exterior (D 46)



Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.3001
 1.011.3002

Punta SONICflex crown extension 020 N°. 92

Tratamiento: Prolongación quirúrgica de corona sin formación de solapamientos para restablecer el ancho biológico en:
 transcurso asimétrico de arcada
 Gummy smile
 Lesión del ancho biológico

Forma: pequeña, oblicua, diamantada en la superficie exterior (D 46)



Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.3005
 1.011.3006

Punta SONICflex crown extension 020 N°. 91

Tratamiento: Prolongación quirúrgica de corona sin formación de solapamientos para restablecer el ancho biológico en:
 transcurso asimétrico de arcada
 Gummy smile
 Lesión del ancho biológico

Forma: pequeña, oblicua, diamantada en la superficie exterior (D 46)



Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.3003
 1.011.3004

Punta SONICflex crown extension 030 N°. 93

Tratamiento: Prolongación quirúrgica de corona sin formación de solapamientos para restablecer el ancho biológico en:
 transcurso asimétrico de arcada
 Gummy smile
 Lesión del ancho biológico

Forma: grande, recta, diamantada en la superficie exterior (D 46)



Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.3007
 1.011.3008


Cirugía



Punta SONICflex crown extension 030 N°. 94

Tratamiento: Prolongación quirúrgica de corona sin formación de solapamientos para restablecer el ancho biológico en:
transcurso asimétrico de arcada
Gummy smile
Lesión del ancho biológico

Forma: grande, oblicua, diamantada en la superficie exterior (D 46)

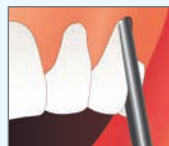

Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS


1.011.3009

1.011.3010

Punta SONICflex crown extension 030 N°. 95

Tratamiento: Prolongación quirúrgica de corona sin formación de solapamientos para restablecer el ancho biológico en:
transcurso asimétrico de arcada
Gummy smile
Lesión del ancho biológico

Forma: pequeña, oblicua, diamantada en la superficie exterior (D 46)

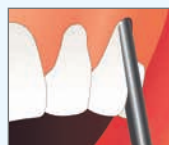

Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.3011

1.011.3012

Punta SONICflex N° 80

Tratamiento: separación de las fibras de Sharpey. Ampliación de la alveola: eliminación de restos radiculares; extracción cuidadosa de implantes; escisión ósea

Forma: cuadrada, cortante



Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



1.004.3875

1.006.2006


Punta SONICflex bone N° 81

Tratamiento: Preparación de la ventana ósea para la elevación del seno maxilar. Ante huesos muy macizos, en caso necesario, separar el hueso cortical mediante rotación y extraer el hueso remanente con la punta diamantada.

Forma: esfera, grande, diamantado D 46



Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

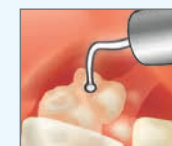

1.004.3876

1.006.2008


Punta SONICflex bone N° 83

Tratamiento: retirada de bloques óseos, osteotomías (distracción ósea, escisión ósea). En el caso de hueso cortical extremadamente ancho, efectuar trabajo de rotación.

Forma: sierra sagital



Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

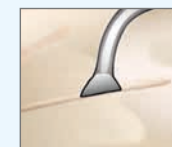

1.004.3878

1.006.2012

Cirugía

Punta SONICflex bone N° 84

Tratamiento: retirada de bloques óseos, osteotomías (distracción ósea, escisión ósea).
En el caso de hueso cortical extremadamente ancho, efectuar trabajo de rotación.

Forma: sierra axial



Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.004.3879
1.006.2014

Punta SONICflex bone N° 85

Tratamiento: ideal para separar con seguridad la membrana de Schneider en la elevación de seno maxilar gracias a la forma de plato.

Forma: pata de elefante




Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.006.0645
1.007.1624

Punta SONICflex bone N° 86

Tratamiento: adecuado para la generación sencilla y rápida de cantidades mayores de hueso, especialmente para el aumento óseo

Forma: raspador

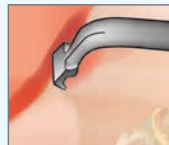

Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.006.0741
1.007.1625

Punta SONICflex N° 87

Tratamiento: para un corte fino y preciso en la separación de los ligamentos.

Forma: sierra axial, hojas de sierra recambiables
Grosor de hoja de sierra: 0,15 mm



Número de pedido: apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
apta para SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS
hoja de sierra (5 unidades)

1.006.1406
1.007.1627
1.006.1405

Accesorios:



Número de pedido: llave dinamométrica

1.000.4887



Número de pedido: cassette de desinfección

0.411.9101



Número de pedido: llave

0.411.0892



Número de pedido:
pieza intermedia para el suministro de líquidos con medicamentos para SONICflex 2003
pieza intermedia para el suministro de líquidos con medicamentos para SONICflex 2008

1.000.6296
1.006.5966

Cirugía



KaVo. Dental Excellence.

KaVo Dental GmbH, D-88400 Biberach/Riß · Telefon +49 7351 56-0 · Fax +49 7351 56-1103 · www.kavo.com

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban