


KaVo SONICflex® quick 2008/L · SONICflex® 2003/L

El eficaz multitalento para su clinica.

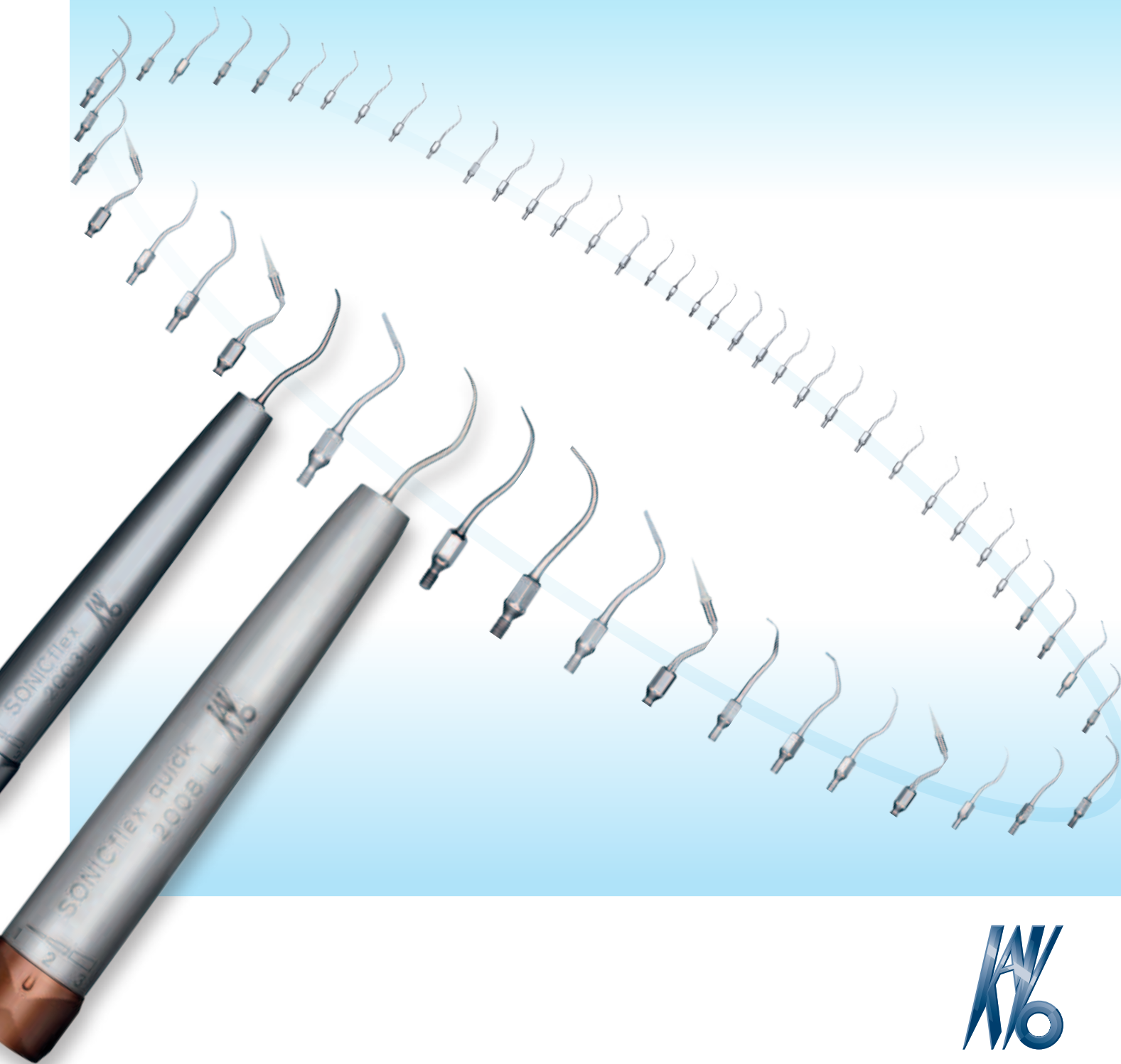

KaVo. Dental Excellence.



Amplia variedad en su máxima expresión.

Cada vez son más los pacientes que reconocen la necesidad de someterse regularmente a una profilaxis para mantener sus dientes sanos. Y dan mucha importancia a un tratamiento cuidadoso. KaVo SONICflex es fácil de usar y agradable en el tratamiento y por lo tanto también la solución perfecta para la profilaxis. De esa manera puede convencer aun más a sus pacientes y aprovechar la tendencia hacia una prevención a largo plazo.

Inserto universal y adaptable.

Gracias al gran abanico de posibilidades que le ofrece SONICflex, pronto se convertirá en el instrumento que más utilice. Con sus numerosas puntas, se adapta de manera exacta a sus necesidades.

Máxima variedad – Características principales y ventajas para usted:

- Más de 50 puntas y con ello más posibilidades de aplicación que con todos los demás air scalers
- Para todos los ámbitos de aplicación
- La base para un tratamiento satisfactorio y mínimamente invasivo

Un tratamiento cuidadoso – más agradable para sus pacientes.

Los pacientes que reciben un buen tratamiento vuelven encantados.

Con KaVo SONICflex, sus pacientes disfrutarán de un tratamiento claramente más suave. Menor generación de calor gracias a una frecuencia de ultrasonidos más baja y una mayor trayectoria del movimiento elíptico. Además, se protege la sustancia dental, puesto que el instrumento trabaja con una presión reducida. Con KaVo SONICflex, el tratamiento será, en todos los niveles de potencia, notablemente más agradable para sus pacientes y más delicado para el diente.

Confort para los pacientes – Características principales y ventajas:

- Tratamiento agradable
- Cuidando la sustancia dental
- Oscilaciones suaves, adecuadas sobre todo para pacientes sensibles al dolor
- Se genera menos calor



KaVo *Master Series*

KaVo *Expert Series*





Eficacia y alto rendimiento – más sencillo para Usted.

Un giro sencillo para un trabajo efectivo.

Con su KaVo SONICflex, el cambio de puntas es muy fácil: gracias a un procedimiento patentado de KaVo se pueden cambiar las puntas con un solo giro de manera fácil y rápida. Esto le ahorra un tiempo valioso y le garantiza un trabajo efectivo sin interrupciones innecesarias.

Patentado por KaVo: cambio sencillo y rápido de puntas con tan sólo un giro



KaVo SONICflex® – características principales y ventajas para Usted:

- Gama muy alta de indicaciones y de aplicaciones de todos los Sonic Scalern incl. profilaxis para tratamientos cuidadosos
- Cambio rápido y sencillo de punta: garantiza un trabajo eficaz, permite ahorrar tiempo y evita interrupciones innecesarias durante el trabajo
- Potencia de abrasión muy elevada, hasta un 50% más de potencia que el modelo anterior; hasta la placa más resistente se elimina sin esfuerzo
- Sin necesidad de aparatos adicionales, fácil de conectar al acoplamiento MULTiflex o Sirona de KaVo, sin las molestas marañas de cables
- La mejor iluminación: 25.000 lux: para una visibilidad relajada sin fatiga ocular – también disponible con LED
- Mucho más silencioso que los productos comparables de otros fabricantes (hasta 15 dB): protege la salud del personal de la consulta y la de sus pacientes.
- Calidad KaVo – KaVo SONICflex 2003 L o 2008 L ya es la tercera generación de scalers de KaVo en la que se concentran 25 años de conocimiento y experiencia

Su ventaja diaria en términos de potencia.

Con KaVo SONICflex dispone del Aircaler más potente y silencioso de su clase. Es, sin duda, el instrumento con el abanico más amplio de aplicaciones. Gracias a los niveles de potencia ajustables, le ayudará de forma activa en todas las indicaciones de forma consistente y precisa.


KaVo SONICflex® quick 2008 L y KaVo SONICflex® LUX 2003 L – rendimiento ajustable a cada indicación.

Niveles de potencia	Amplitud	Frecuencia	Volumen	Indicaciones
Nivel 1	120 µm	6000 Hz	61 dB (A)	Para trabajos especialmente delicados
Nivel 2	160 µm	6000 Hz	69 dB (A)	Preparación y eliminación de placa
Nivel 3	240 µm	6000 Hz	71 dB (A)	Preparación y eliminación intensas de la placa

Más seguro, ergonómico e higiénico.

KaVo SONICflex está equipado con el revestimiento Plasmatec especialmente robusto y manejable. Gracias a su superficie de cerámica metálica, KaVo SONICflex se sujeta de forma aún más segura. Los dedos están más relajados durante el tratamiento y podrá disfrutar de una agradable y cálida sensación de agarre.

La superficie Plasmatec está provista del sellado higiénico de KaVo. También es resistente a la limpieza en el termodesinfectante. Es esterilizable hasta 135 C y cumple con ello las normativas actuales de higiene (como, p. ej., RKI), lo que constituye una ventaja adicional importante para su consulta.

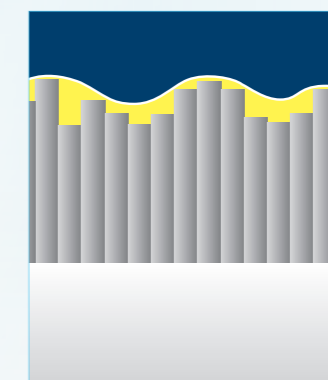

- Sellado higiénico
- Revestimiento Plasmatec
- Funda de instrumentos

El procedimiento Plasmatec empleado por KaVo ofrece un manejo excelente y una higiene superior.



KaVo SONICflex bone juego de puntas con una caja práctica de almacenamiento.

Nuestro máximo rendimiento – desde la profilaxis, periodontología y endodoncia hasta los...

Especialistas que le ayudan en su trabajo diario.

No importa la especialidad de tratamiento de su consulta. Gracias al gran número de puntas, con KaVo SONICflex siempre contará con el instrumento adecuado. Configure su gama de puntas personalizada y amplíela de acuerdo con sus necesidades. De esa manera puede alcanzar los mayores éxitos en todos los tratamientos – sencillo y agradable para sus pacientes.



Una profilaxis perfecta. Muy sencillo para usted y agradable para sus pacientes.

Profilaxis y periodontología

5
6
7
8

SONICflex® scaler

- Variedad de puntas para una eliminación duradera del sarro
- Limpieza de bolsas de menor profundidad

60
61 li.
62 re.

SONICflex® paro

- Diferentes puntas para una limpieza delicada, eficaz y mínimamente invasiva de bolsas periodontales de hasta 9 mm de profundidad

48

SONICflex® clean

- Amplio abanico de cepillos con vibración
- Para una limpieza y un pulido suaves

Accesorios para SONICflex® paro

- Pieza intermedia para suministro de líquidos como, p. ej., solución salina estéril (N.º de pedido: 1.000.6296)

Profilaxis y periodontología

48

SONICflex® implant

- Eliminación eficaz de la placa subgingival y las concreciones
- Sin abrasión ni raspado
- Acoplamiento de limpieza de un solo uso, con lo que se evita toda transmisión de enfermedades

24
25
26
27

SONICflex® root planer

- Para un tratamiento sencillo de zonas de furcación distantes o estrechas

Endodoncia

66
67
68
69
70
96

SONICflex® endo

SONICflex endo: un surtido especial de puntas para

- Búsqueda de los canales
- Eliminación de los materiales blandos en las revisiones
- Acondicionamiento de las entradas de los canales
- Acondicionamiento de la cavidad de la pulpa para la preparación radicular de la corona
- Limpieza y enjuague del conducto radicular (punta 96 en tamaños ISO 0,15, 0,20 y 0,25)

56
16
20
55
57
17
21

SONICflex® retro

- Preparación retrógrada del canal radicular con puntas diamantadas y con contra-ángulo
- Impide los daños radiculares por agrietamiento y protege la estabilidad del diente y el hueso periapical
- Preparación con precisión axial



... Tratamiento mínimamente invasivo de la caries y preparación ...

Tratamiento de la caries mínimamente invasivo

28 

30

32

29

31

33

SONICflex® microinvasivo

- Sistema especial de puntas para lesiones pequeñas y de difícil acceso en la zona aproximal
- Las puntas diamantadas unilaterales permiten el acceso directo a la lesión principal desde la posición oclusal o bucal
- Conservación de la sustancia dental sana

45 

SONICflex® seal

- Preparación de fisuras
- El complemento perfecto para el KaVo DIAGNOdent

58 

59

SONICflex® bevel

- Puntas diamantadas unilaterales para el biselado preciso de las lesiones más pequeñas
- Optimización de la unión
- Minimización de la fisura marginal

42 

43

71

72

SONICflex® cariex D + TC

- Eliminación mínimamente invasiva de la dentina cariosa
- Cariex TC: eliminación de grandes lesiones cariosas
- Cariex D: pequeñas lesiones cariosas con la posibilidad de acondicionar la cavidad

Preparación

49 

50

SONICflex® prep gold

- Puntas de preparación de diamantado unilateral para el acabado de los bordes de la cavidad que han sido especialmente desarrolladas para inlays de oro y coronas parciales
- Transmisión exacta de la geometría de la pieza para inlays de oro y coronas parciales

51 

52

SONICflex® prep ceram

- Para inlays/onlays
- Para la preparación de acabado de los bordes de la cavidad; transmite la geometría de las puntas de trabajo directamente a la sustancia dental
- Sin más socavamientos en inlays u onlays hechos en laboratorio

34 

35

SONICflex® prep CAD/CAM

- Formación ideal de los bordes de la cavidad para sistemas CAD-/CAM, p. ej., EVEREST, CEREC

97 

98

SONICflex® prep crown

- Para preparaciones de coronas exactamente definidas

12 


SONICflex® cem

- Colocación suave y precisa de los inlays
- Reducción de la fisura marginal



... hasta aplicaciones quirúrgicas.

Chirurgie

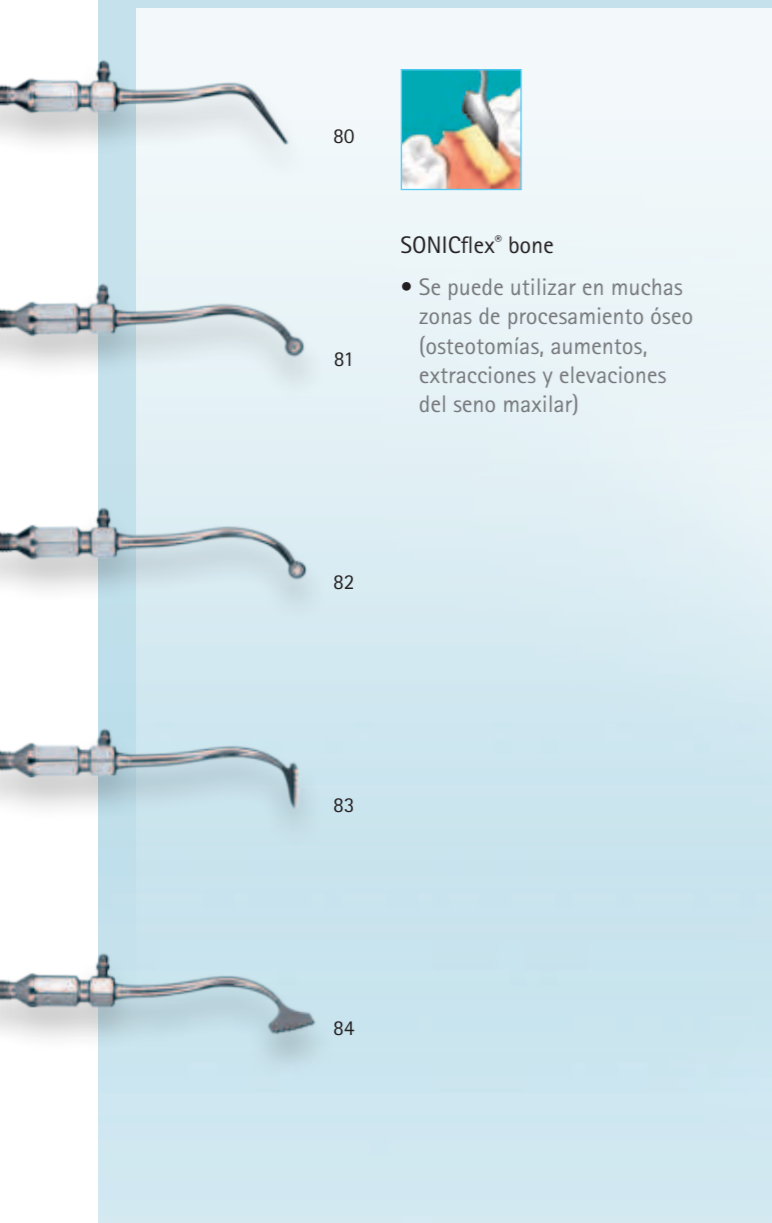

SONICflex® bone

- Se puede utilizar en muchas zonas de procesamiento óseo (osteotomías, aumentos, extracciones y elevaciones del seno maxilar)



Punta SONICflex® Bone n.º 85 (pata de elefante):

- Ideal para separar con seguridad la membrana de Schneider en la elevación de seno gracias a la forma de plato

Punta SONICflex® Bone n.º 86 (raspador):

- Para una extracción rápida y sencilla de porciones óseas de gran tamaño, especial para la elevación de seno.

Punta SONICflex® Bone n.º 87 (sierra):

- Para un corte fino y preciso en la separación de los ligamentos.

KaVo le ofrece para cada paso de profilaxis una solución óptima.

Tan sencillo para Usted.

Tan agradable para sus pacientes.

	<p>1. Workflow Integration (p.ej. con KaVo Primus® 1058 TM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un sistema de profilaxis profesional y una unidad de tratamiento fiable en uno. • Máxima fiabilidad para una profilaxis y unos resultados de tratamiento de primera calidad. • Versión de mesa, de brazo oscilante y de carrito con múltiple equipamiento flexible para cualquier necesidad <ul style="list-style-type: none"> • Asiento confortable para el paciente con acolchado blando • Ambiente de bienestar para sus pacientes gracias a diseños atractivos • Marketing de paciente efectivo con solución multimedia opcional
	<p>2. Eliminación de placa dental (p.ej. con KaVo SONICflex quick 2008 L)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambio sencillo y rápido de puntas con tan sólo un giro • Un instrumento para muchas aplicaciones • Adaptable a los acoplamientos de Sirona <ul style="list-style-type: none"> • Suave oscilación, adecuado sobre todo para pacientes sensibles al dolor • Mayor confianza de los pacientes gracias a un tratamiento cuidadoso • Airc scaler silencioso con luz
	<p>3. Limpieza dental. (p.ej. con KaVo PROPHYflex 3 - 2018)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tobera rotatoria a 360° para un trabajo óptimo y no fatigoso • Completamente esterilizable y por lo tanto fácil de integrar en la automatización de trabajos de higiene • Adaptable a los acoplamientos de Sirona <ul style="list-style-type: none"> • Una limpieza dental perfecta con unos resultados que saltan a la vista • Un tratamiento suave y agradable con las PROPHYpearls • Cuatro nuevos sabores (mora, cereza, menta y naranja)
	<p>4. Pulido dental (p.ej. con KaVo DURAtec 2933)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adaptable para Snap-on/Screw-in • Preparado especialmente para la profilaxis mediante un aislamiento especial • Una limpieza inmejorable gracias a un reparto perfecto de la pasta mediante movimiento giratorio de 90° <ul style="list-style-type: none"> • Un pulido cuidadoso con vibraciones suaves • Notablemente agradable • Dientes más limpios
	<p>5. Detección de caries (p.ej. con KaVo DIAGNOdent)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resultados perfectos en todas las aplicaciones • Diagnóstico seguro en caries proximales y de fisuras así como el reconocimiento de concrecimientos en las bolsas dentales • Diagnosticar caries ocultas prematuramente vía láser de alta tecnología <ul style="list-style-type: none"> • Inalámbrico • Conservación y cuidado de la sustancia dental sana • Detección indolora • Mayor confianza de los pacientes debido a un diagnóstico más seguro

Amplio abanico de posibilidades para todo tipo de aplicaciones.

Para SONICflex Para SONICflex
2000 N, 2000 L, 2003 / L 2008 / L, 2008 S / LS

Campos de aplicación	Denominación de las puntas KaVo	Nº	Nº de material	Nº	Nº de material	
Eliminación del sarro	Punta SONICflex Scaler Universal	5	0.571.5171	5A	1.005.8949	
	Punta SONICflex Scaler Hoz	6	0.571.5181	6A	1.005.8950	
	Punta SONICflex Scaler Perio	7	0.571.5179	7A	1.005.8951	
	Punta SONICflex Scaler Perio extralarga	8	0.571.5371	8A	1.006.1953	
	Juego de puntas SONICflex® Scalerset	Set	1.000.4983	Set A	1.005.9328	
	Punta SONICflex para acoplamientos de cepillos	48	0.571.0401	48 A	1.006.1982	
Limpieza de la superficie radicular	Punta SONICflex Paro, larga, recta	60	0.571.7402	60A	1.006.1934	
	Punta SONICflex Paro, larga, izquierda	61	0.571.7412	61A	1.006.1935	
	Punta SONICflex Paro, larga, derecha	62	0.571.7422	62A	1.006.1936	
	Juego de puntas SONICflex Paroset	Set	0.571.0371	Set A	1.006.2020	
	Punta SONICflex Rootplaner, punta brote, pequeña, izquierda	24	0.571.5621	24A	1.006.1957	
	Punta SONICflex Rootplaner, punta brote, pequeña, derecha	25	0.571.5631	25A	1.006.1959	
	Punta SONICflex Rootplaner, brote, pequeña, universal	26	0.571.5641	26A	1.006.1961	
	Punta SONICflex Rootplaner, brote, grande, perio	27	0.571.5651	27A	1.006.1963	
	Juego de puntas SONICflex Rootplaner	Set	0.571.0301	Set A	1.006.2022	
	Limpieza del cuello del implante	SONICflex Spitze Implant	48	1.003.8167	48A	1.006.2027
Tratamiento del conducto radicular retrógrado	Punta SONICflex Retro, istmo, izquierda	56	0.571.7322	56A	1.006.2040	
	Punta SONICflex Retro, istmo, derecha	57	0.571.7332	57A	1.006.2041	
	Punta SONICflex Retro, cilíndrica, pequeña, izquierda	16	0.571.5541	16A	1.006.2036	
	Punta SONICflex Retro, cilíndrica, pequeña, derecha	17	0.571.5581	17A	1.006.2035	
	Punta SONICflex Retro, forma de T, pequeña, izquierda	20	0.571.5521	20A	1.006.2037	
	Punta SONICflex Retro, forma de T, pequeña, derecha	21	0.571.5561	21A	1.006.2038	
	Punta SONICflex Retro para los dientes centrales	55	0.571.7342	55A	1.006.2039	
	Juego de puntas SONICflex Retro	Set	0.571.0381	Set A	1.006.2034	
Localización y preparación de los conductos radiculares	Punta SONICflex Endo, brote, grande, diamantada	66	1.000.5825	66A	1.006.1992	
	Punta SONICflex Endo, cónica, 125°, diamantada	67	1.000.5822	67A	1.006.1994	
	Punta SONICflex Endo, cónica, 112°, diamantada	68	1.000.5823	68A	1.006.1996	
	Endo, brote, pequeña, diamantada	69	1.000.5827	69A	1.006.1998	
	Punta SONICflex Endo, cónica, 117°, no diamantada	70	1.000.5821	70A	1.006.2000	
	Juego de puntas SONICflex Endo	Set	1.000.5828	Set A	1.006.2031	
	SONICflex endo clean punta 96	96	1.008.5163	96A	1.008.5164	
	Juego SONICflex endo clean	Set	1.006.2045	Set A	1.007.1142	
	Agujas SONICflex endo clean 015	-	1.006.2042	-	1.006.2042	
	Agujas SONICflex endo clean 020	-	1.006.2043	-	1.006.2043	
Agujas SONICflex endo clean 025	-	1.006.2044	-	1.006.2044		
Tratamiento de la caries mínimamente invasivo	Punta SONICflex Seal	45	1.000.8323	45A	1.007.1506	
	Punta SONICflex Micro Torpedo, mesial, diamantada	28	0.571.6741	28A	1.006.1965	
	Punta SONICflex Micro Torpedo, mesial, diamantada	29	0.571.6731	29A	1.006.1967	
	Punta SONICflex Micro, semiesfera pequeña, mesial, diamantada	30	0.571.6811	30A	1.006.1969	
	Punta SONICflex Micro, semiesfera pequeña, distal, diamantada	31	0.571.6801	31A	1.006.1971	
	Punta SONICflex Micro, semiesfera grande, mesial, diamantada	32	0.571.6831	32A	1.006.1973	
	Punta SONICflex Micro, semiesfera grande, distal, diamantada	33	0.571.6821	33A	1.006.1975	
	Juego de puntas SONICflex Micro	Set	0.571.0421	Set A	1.006.2023	
	SONICflex Bevel, mesial, diamantada	58	0.571.7392	58A	1.006.1988	
	Punta SONICflex Bevel, distal, diamantada	59	0.571.7382	59A	1.006.1990	
	Set A SONICflex Bevel	Set	0.571.0391	Set A	1.006.2030	
	Punta SONICflex Cariex D, esférica, pequeña, diamantada	42	0.571.7105	42A	1.006.1980	
	Punta SONICflex Cariex D, esférica, grande, diamantada	43	0.571.7167	43A	1.006.1981	
	Set A SONICflex Cari EX D	Set	0.571.7378	Set A	1.006.2025	
	Punta SONICflex Cariex TC, esférica, pequeña, de metal duro	71	1.000.7362	71A	1.006.2002	
	ta SONICflex Cariex TC, esférica, grande, de metal duro	72	1.000.7363	72A	1.006.2004	
	Set A SONICflex Cari EX TC	Set	1.000.7379	Set A	1.006.2032	
	Preparación	Punta SONICflex Prep gold, mesial, diamantada	49	0.571.7212	49A	1.006.1983
		Punta SONICflex Prep gold, distal, diamantada	50	0.571.7222	50A	1.006.1984
		Set A SONICflex Prep gold	Set	0.751.0321	Set A	1.006.2028
SONICflex Prep ceram, mesial, diamantada		51	0.571.7262	51A	1.006.1985	
Punta SONICflex prep ceram, distal, diamantada		52	0.571.7272	52A	1.006.1986	
Set A SONICflex Ceramset		Set	0.571.0341	Set A	1.006.2029	
Punta SONICflex Prep CAD/CAM, mesial, diamantada		34	1.002.1984	34A	1.006.1977	
Punta SONICflex Prep CAD/CAM, distal, diamantada		35	1.002.1986	35A	1.006.1979	
Set A SONICflex CAD/CAM		Set	1.002.1988	Set A	1.006.2024	
Punta SONICflex Cem		12	0.571.5431	12A	1.006.2021	
SONICflex crown prep 97 Radius		97	1.008.6383	97A	1.008.6384	
Nivel SONICflex crown prep 98		98	1.008.6385	98A	1.008.6386	
Cirugía		Punta SONICflex Bone, esfera grande, diamantada, elevación del suelo sinusal	81	1.004.3876	81A	1.006.2008
		Punta SONICflex bone, esférica, grande, no diamantada, evaluación de suelo de seno	82	1.004.3877	82A	1.006.2010
	Punta SONICflex Bone, sierra, sagital	83	1.004.3878	83A	1.006.2012	
	Punta SONICflex Bone, sierra, axial	84	1.004.3879	84A	1.006.2014	
	Punta SONICflex Bone, pata de elefante	85	1.006.0645	85A	1.007.1624	
	Punta SONICflex Bone, raspador	86	1.006.0741	86A	1.007.1625	
	Punta SONICflex Bone, sierra	87	1.006.1275	87A	1.007.1627	
	Punta SONICflex Bone, cuatro lados, para división de huesos	80	1.004.3875	80A	1.007.2006	
	Juego de puntas SONICflex Bone	Set	1.004.3874	Set A	1.006.2033	



Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban