


SONICflex[®]

Libro delle punte.

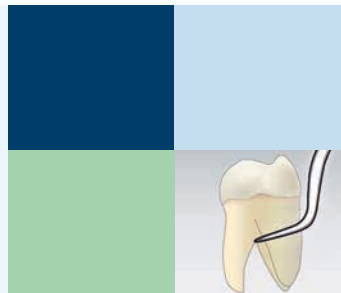


Nuove
applicazioni

Stripping / Shaping
Allungamento
di corona




KaVo. Dental Excellence.

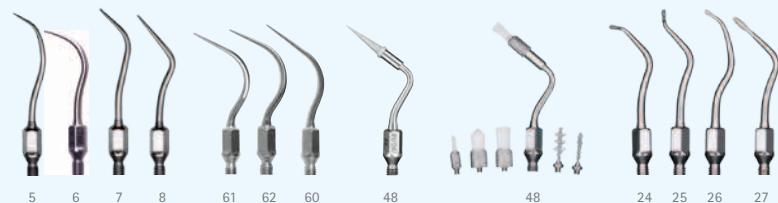

scaler | paro | implant | clean | rootplaner




micro | bevel | stripping, shaping | seal | caries

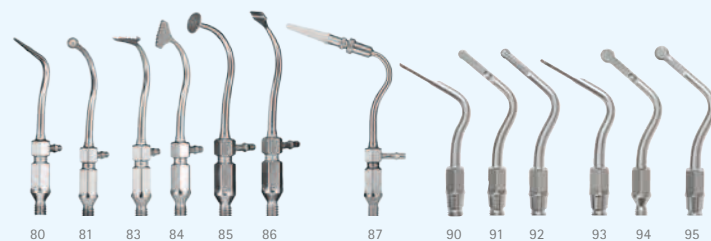

bone | crown extension



endo | retro

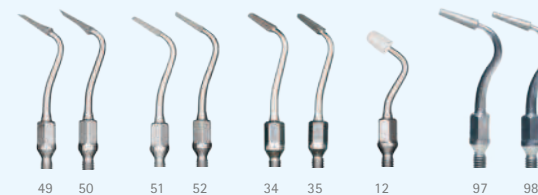

gold | ceram | CAD/CAM | cem | crown

Versatilità al massimo livello.

Grazie alle ampie possibilità di trattamento offerte, SONICflex diventerà presto uno strumento di cui non potrete fare a meno.

Grazie ai numerosi inserti si adegua perfettamente alle vostre esigenze.

Numerose possibilità, punti di forza e vantaggi per voi:

- Più inserti e quindi maggiori possibilità di impiego di qualsiasi altro airt scaler
- Oltre 50 punte diverse
- Per tutti i campi di applicazione
- Base per un trattamento minimamente invasivo di successo



SONICflex®

Panoramica inserti.

KaVo **master** series



Cambio della punta veloce e comodo: basta una sola rotazione anche con raccordo per attacchi Sirona

KaVo **expert** series



KaVo **smart** series



Il vostro vantaggio quotidiano in termini di potenza.

KaVo SONICflex è l'airscaler più potente e silenzioso della sua classe. È sicuramente lo strumento che vanta il più ampio spettro di applicazioni. Grazie ai livelli di potenza regolabili supporta in modo efficace e preciso il vostro lavoro in funzione del tipo di indicazione.

Tecnologia superiore, punti di forza e vantaggi per voi:

- Potenza regolabile in tre livelli – condizioni di lavoro ottimali per tutte le indicazioni
- Silenziosità notevolmente superiore a quella di prodotti concorrenti (fino a 15 dB): tutela la salute del personale dello studio e dei pazienti
- Non occorrono strumenti supplementari, basta una semplice operazione di innesto sull'attacco KaVo MULTIflex oppure su quello Sirona, senza fastidiosi grovigli di cavi
- Illuminazione ottimale: 25.000 Lux – per una visibilità rilassata, senza affaticare gli occhi
- Proverbiale qualità KaVo: SONICflex 2008 L è già la terza generazione di scaler KaVo, il risultato di 25 anni di esperienza



Inserto SONICflex scaler n. 5

Trattamento: per la rimozione di grandi quantità di tartaro
Forma: universale



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



0.571.5171
1.005.8949

Inserto SONICflex scaler n. 6

Trattamento: per la rimozione del tartaro sopra-gengivale
Forma: falcetto



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS




0.571.5181
1.005.8950

Inserto SONICflex scaler n. 7

Trattamento: per la rimozione del tartaro sopra-gengivale
Forma: paro



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

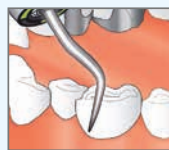

0.571.5191
1.005.8951

Inserto SONICflex scaler n. 8

Trattamento: per la rimozione del tartaro sopra e sotto-gengivale
Forma: paro, extra lungo



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS




0.571.5371
1.006.1953

Inserto SONICflex scaler n. 48

Trattamento: eliminazione della placca, pulizia di solchi, pulizia di cavità e monconi protesici
Forma: diverse punte applicabili e spazzole monouso



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS
spazzolino clean n. 1
spazzolino clean n. 2
spazzolino clean n. 3
spazzolino clean n. 4
spazzolino clean n. 5
spazzolino clean n. 6
inserto n. 48
inserto n. 48 A

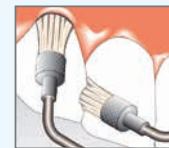


0.571.0001
1.006.2026
0.571.0402
0.571.0412
0.571.0422
0.571.0432
0.571.0472
0.571.0482
0.571.0401
1.006.1982

Inserto SONICflex paro n° 60

Trattamento: pulizia delicata delle tasche parodontali nella terapia della parodontite; pulizia efficace della tasca fino a 9 mm di profondità; per la parte dei denti frontali, superfici lisce

Forma: inserto lungo, diritto – superficie arrotondata

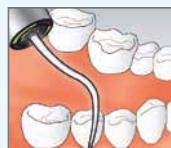

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7402
1.006.1934

Inserto SONICflex paro n° 61

Trattamento: pulizia delicata delle tasche parodontali nella terapia della parodontite; pulizia efficace della tasca fino a 9 mm di profondità; per premolari, molari

Forma: inserto inclinato ad angolo, sinistro – superficie arrotondata



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7412
1.006.1935

Inserto SONICflex paro n° 62

Trattamento: pulizia delicata delle tasche parodontali nella terapia della parodontite; pulizia efficace della tasca fino a 9 mm di profondità; per premolari, molari

Forma: inserto inclinato ad angolo, destro – superficie arrotondata



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7422
1.006.1936

Inserto SONICflex implant

Trattamento: rimozione efficace di depositi e concrezioni sotto-gengivali negli impianti

Forma: inserto cuneiforme, inserto monouso in plastica (PEEK)



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS
Inserto monouso in plastica (30 pz.)



1.003.8167
1.006.2027
1.003.8168

Parodontologia

SONICflex rootplaner, inserto n. 24

Trattamento: per le forcazioni di difficile accesso, consente l'accesso agli ingressi approssimali delle forcazioni anche con arcata dentaria chiusa

Forma: bocciolo a contrangolo, piccolo, **sinistro**, diamantatura D25

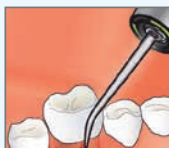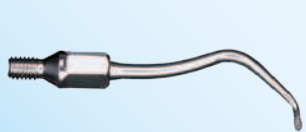

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5621
1.006.1957

SONICflex rootplaner, inserto n. 25

Trattamento: per le forcazioni di difficile accesso, consente l'accesso agli ingressi approssimali delle forcazioni anche con arcata dentaria chiusa

Forma: bocciolo a contrangolo, piccolo, **destro**, diamantatura D25



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5631
1.006.1959

SONICflex rootplaner, inserto n. 26

Trattamento: pulizia efficace di superfici lisce e concavità

Forma: universale, bocciolo, **piccolo**; diamantatura D25




Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5641
1.006.1961

SONICflex rootplaner, inserto n. 27

Trattamento: pulizia efficace di superfici lisce e concavità

Forma: paro extra lungo, bocciolo, **grande**; diamantatura D25

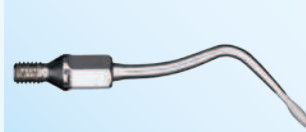

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5651
1.006.1963

Parodontologia



SONICflex micro, inserto n. 30

Trattamento: terapia minimamente invasiva in caso di carie iniziale
 Forma: piccola semisfera, **mesiale**, diamantatura D46




Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto pr SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.6811
 1.006.1969

SONICflex micro, inserto n. 31

Trattamento: terapia minimamente invasiva in caso di carie iniziale
 Forma: piccola semisfera, **distale**, diamantatura D46

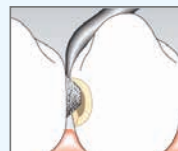


Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.6801
 1.006.1971

SONICflex micro, inserto n. 32

Trattamento: terapia minimamente invasiva in caso di carie iniziale
 Forma: piccola semisfera, **mesiale**, diamantatura D46

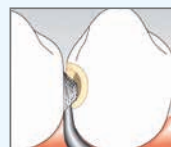


Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.6831
 1.006.1973

SONICflex micro, inserto n. 33

Trattamento: terapia minimamente invasiva in caso di carie iniziale
 Forma: piccola semisfera, **distale**, diamantatura D46

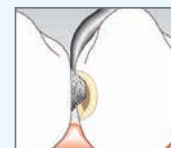


Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.6821
 1.006.1975

SONICflex bevel, inserto n. 58

Trattamento: i bordi approssimali delle cavità vengono smussati
 Forma: **mesiale**, diamantatura D46

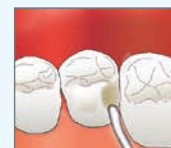

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7392
 1.006.1988

SONICflex bevel, inserto n. 59

Trattamento: i bordi approssimali delle cavità vengono smussati
 Forma: **distale**, diamantatura D46



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS


0.571.7382
 1.006.1990

Minima invasività

SONICflex seal, inserto n. 45

Trattamento: preparazione minimamente invasiva dei solchi, ingrandimento indolore dei solchi

Forma: conico, inserto diritto Ø 0,5 mm, diamantatura D 46

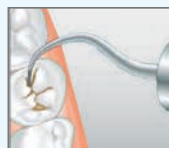

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.000.8323
1.007.1506

SONICflex cariex D, inserto n. 42

Trattamento: escavazione della carie sonoabrasiva, senza danneggiare la sostanza del dente, fine

Forma: a sfera, Ø 0,8 mm, diamantatura D 64



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.000.7105
1.006.1980

SONICflex cariex D, inserto n. 43

Trattamento: escavazione della carie sonoabrasiva, senza danneggiare la sostanza del dente, fine

Forma: a sfera, Ø 1,2 mm, diamantatura D 64



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.000.7167
1.006.1981

SONICflex cariex TC, inserto n. 71

Trattamento: rimozione a strati della parte principale della struttura cariata

Forma: a sfera, Ø 1,0 mm, metallo duro



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.000.7362
1.006.2002

SONICflex cariex TC, inserto n. 72

Trattamento: rimozione a strati della parte principale della struttura cariata

Forma: a sfera, Ø 1,4 mm, metallo duro



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.000.7363
1.006.2004


Minima invasività



SONICflex prep gold, inserto n. 49 mesiale

Trattamento: preparazione precisa di diversi angoli di bordi nella zona del margine dopo la "preparazione grossolana" effettuata in modo rotante; in questo modo è possibile un miglior restauro dentale sotto il profilo odontotecnico

Forma: **mesiale**, inserti con angoli di bordi definiti: laterale - 60° cervicale - 30°, diamantatura D 46

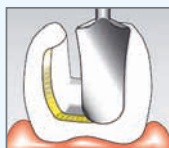



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7212
1.006.1983

SONICflex prep gold, inserto n. 50 distale

Trattamento: preparazione precisa di diversi angoli nei bordi marginali dopo la "preparazione grossolana" effettuata in modo rotante, in questo modo è possibile un migliore restauro sotto il profilo odontotecnico

Forma: **distale**, inserti con angoli di bordi definiti: laterale - 60°, cervicale - 30°, diamantatura D 46

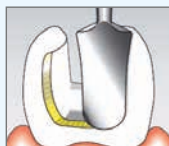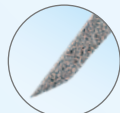


Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7222
1.006.1984

SONICflex prep ceram, inserto n. 51

Trattamento: preparazione precisa di diversi angoli nei bordi marginali, passaggi armonici delle zone del margine cervicale e laterale

Forma: **mesiale**, inserti con angoli di bordi definiti: laterale - 60° cervicale - 75°, diamantatura D 46

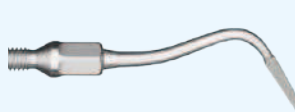


Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7262
1.006.1985

SONICflex prep ceram, inserto n. 52

Trattamento: preparazione precisa di diversi angoli nei bordi marginali, passaggi armonici delle zone del margine cervicale e laterale

Forma: **distale**, inserti con angoli di bordi definiti: laterale - 60°, cervicale - 75°, diamantatura D 46

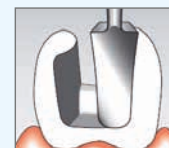

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7272
1.006.1986

Protesica



SONICflex prep CAD / CAM, inserto n. 34

Trattamento: perfetto adattamento della preparazione della cavità ai processi tecnici nei sistemi CAD-CAM

Forma: **mesiale**, angolo laterale 30°, angolo cervicale 90°, diamantatura D 46



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



1.002.1984
1.006.1977

SONICflex prep CAD / CAM, inserto n. 35

Trattamento: perfetto adattamento della preparazione della cavità ai processi tecnici nei sistemi CAD-CAM

Forma: **distale**, angolo laterale 30°, angolo cervicale 90°, diamantatura D 46



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto a SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



1.002.1986
1.006.1979


Punta SONICflex stripping n. 73

Trattamento: Separazione preliminare alla preparazione del moncone coronale
Arrotondamento degli spigoli prossimali della preparazione cavitaria
Perfezionamento anatomico delle superfici prossimali di otturazioni in composito

Forma: **piatta, mesiale**, diamantata (D 25)



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

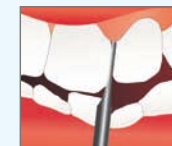

1.011.2993
1.011.2994


Punta SONICflex stripping n. 74

Trattamento: Separazione preliminare alla preparazione del moncone coronale
Arrotondamento degli spigoli prossimali della preparazione cavitaria
Perfezionamento anatomico delle superfici prossimali di otturazioni in composito

Forma: **piatta, distale**, diamantata (D 25)



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

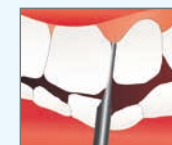

1.011.2995
1.011.2996

Protesica

Punta SONICflex shaping n. 75

Trattamento: Separazione preliminare alla preparazione del moncone coronale
Arrotondamento degli spigoli prossimali della preparazione cavitaria
Perfezionamento anatomico delle superfici prossimali di otturazioni in composito

Forma: arcuata, **mesiale**, diamantata (D 25)



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.2997
1.011.2998

Punta SONICflex shaping n. 76

Trattamento: Separazione preliminare alla preparazione del moncone coronale
Arrotondamento degli spigoli prossimali della preparazione cavitaria
Perfezionamento anatomico delle superfici prossimali di otturazioni in composito

Forma: arcuata, **distale**, diamantata (D 25)



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.2999
1.011.3000

SONICflex cem, inserto n. 12

Trattamento: inserimento delicato di inlay

Forma: cappetta protettiva in plastica arrotondata



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS
Rivestimento CEM




0.571.5431
1.006.2021
0.571.7142

SONICflex crown prep, inserto n. 97

Trattamento: preparazione monconi protesici – ideale per questa indicazione è la combinazione di strumenti di preparazione monconi protesici rotanti e inserti sonici della stessa forma.

Forma: arrotondata, diamantatura D46

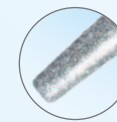

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L e 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS




1.008.6383
1.008.6384

SONICflex crown prep, inserto n. 98

Trattamento: preparazione monconi protesici – ideale per questa indicazione è la combinazione di strumenti di preparazione monconi protesici rotanti e inserti sonici della stessa forma.

Forma: piatta, diamantatura D46

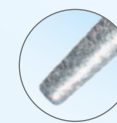

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L e 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S



1.008.6385
1.008.6386

Protesica


SONICflex retro, inserto n. 56

Trattamento: ricerca / identificazione del canale radicolare.
Notevole semplificazione del lavoro di pura preparazione di cavità retrograde

Forma: inserto cilindrico estremamente sottile, **sinistro**, diamantatura D 46



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

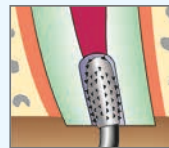

0.571.7322
1.006.2040

SONICflex retro, inserto n. 57

Trattamento: ricerca / identificazione del canale radicolare.
Notevole semplificazione del lavoro di pura preparazione di cavità retrograde

Forma: inserto cilindrico sottile, **destro**, diamantatura D 46



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



0.571.7332
1.006.2041

SONICflex retro, inserto n. 16

Trattamento: preparazione del canale radicolare, notevole semplificazione dell'accesso in presenza di forte incurvatura della radice

Forma: **sinistro**, cilindro piccolo, diamantatura D 64



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



0.571.5541
1.006.2036

SONICflex retro, inserto n. 17

Trattamento: preparazione del canale radicolare, notevole semplificazione dell'accesso in presenza di forte incurvatura della radice

Forma: **destro**, piccolo cilindro, diamantatura D 64



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



0.571.5581
1.006.2035


SONICflex retro, inserto n. 20 e n. 21

Trattamento: preparazione del sottosquadro. Preparazione conforme all'asse del canale radicolare in presenza di difetto osseo minimo.

Forma: a pera, **piccolo, sinistro** (n. 20), **destro** (n. 21), diamantatura D 64




Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

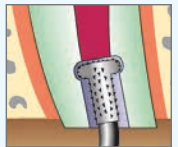

0.571.5521
1.006.2037



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

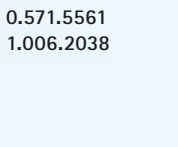

0.571.5561
1.006.2038

SONICflex retro, inserto n. 55

Trattamento: per radici dall'apice ad inclinazione fortemente frontale

Forma: diamantatura D 46



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



0.571.7342
1.006.2039

SONICflex endo, inserto n. 66

Trattamento: formazione della cavità di accesso, rimozione eccedenze

Forma: bocciolo, **grande**, diamantatura D 46



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.000.5825
1.006.1992

SONICflex endo, inserto n. 67

Trattamento: ingrandimento canali di maggiori dimensioni

Forma: conico **125°**, diamantatura D 46



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



1.000.5822
1.006.1994

SONICflex endo, inserto n. 68

Trattamento: ingrandimento canali di maggiori dimensioni

Forma: conico **112°**, diamantatura D 46



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.000.5823
1.006.1996


SONICflex endo, inserto n. 69

Trattamento: rimozione di residui dell'otturazione del canale radicolare

Forma: bocciolo, **piccolo**, diamantatura D 46



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

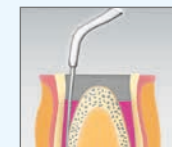

1.000.5827
1.006.1998


SONICflex endo, inserto n. 70

Trattamento: per canali particolarmente lunghi e larghi

Forma: conico **117°**, diamantatura D 25
parte anteriore non diamantata



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

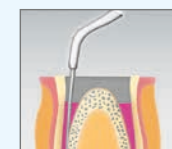

1.000.5821
1.006.2000

SONICflex endo clean, inserto n. 96


Trattamento: per il lavaggio del canale radicolare, per rimuovere detriti e smear layer e per aumentare la soluzione di lavaggio antibatterica

Forma: 105° o angolo 75°



Codice: adatto per
SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS
SONICflex Endo clean set A 1.007.1142
SONICflex Endo clean, inserto A 1.008.5164
adatto per SONICflex 2000 N / L e 2003 / L
SONICflex Endo clean, inserto 1.008.5163
SONICflex Endo clean set 1.006.2045

Endo clean, aghi per SONICflex 2000 N / L, 2003 e 2008
SONICflex Endo clean 015 bianco 1.006.2042
SONICflex Endo clean 020 giallo 1.006.2043
SONICflex Endo clean 025 rosso 1.006.2044

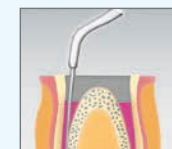


Endodonzia

Punta SONICflex crown extension 020 n. 90

Trattamento: Allungamento chirurgico della corona a minima invasività senza lembo grazie al leggero movimento della punta sonica per il ripristino dell'ampiezza biologica in caso di: asimmetria delle arcate
Gummy Smile
Lesione dell'ampiezza biologica

Forma: piccola, rettilinea, con superficie esterna diamantata (D 46)

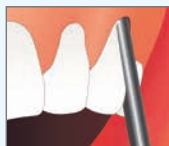


Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.3001
1.011.3002

Punta SONICflex crown extension 020 n. 92

Trattamento: Allungamento chirurgico della corona a minima invasività senza lembo grazie al leggero movimento della punta sonica per il ripristino dell'ampiezza biologica in caso di: asimmetria delle arcate
Gummy Smile
Lesione dell'ampiezza biologica

Forma: piccola, con superficie esterna diamantata (D 46)

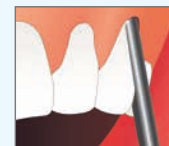


Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.3005
1.011.3006

Punta SONICflex crown extension 0020 n. 91

Trattamento: Allungamento chirurgico della corona a minima invasività senza lembo grazie al leggero movimento della punta sonica per il ripristino dell'ampiezza biologica in caso di: asimmetria delle arcate
Gummy Smile
Lesione dell'ampiezza biologica

Forma: piccola, obliqua, con superficie esterna diamantata (D 46)

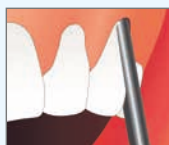


Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.3003
1.011.3004

Punta SONICflex crown extension 030 n. 93

Trattamento: Allungamento chirurgico della corona a minima invasività senza lembo grazie al leggero movimento della punta sonica per il ripristino dell'ampiezza biologica in caso di: asimmetria delle arcate
Gummy Smile
Lesione dell'ampiezza biologica

Forma: grande, rettilinea, con superficie esterna diamantata (D 46)

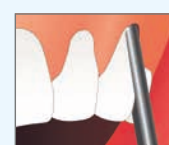

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.3007
1.011.3008

Chirurgia

Punta SONICflex crown extension 030 n. 94

Trattamento: Allungamento chirurgico della corona a minima invasività senza lembo grazie al leggero movimento della punta sonica per il ripristino dell'ampiezza biologica in caso di: asimmetria delle arcate Gummy Smile
Lesione dell'ampiezza biologica

Forma: grande, obliqua, con superficie esterna diamantata (D 46)




Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.3009
1.011.3010

Punta SONICflex crown extension 030 n. 95

Trattamento: Allungamento chirurgico della corona a minima invasività senza lembo grazie al leggero movimento della punta sonica per il ripristino dell'ampiezza biologica in caso di: asimmetria delle arcate Gummy Smile
Lesione dell'ampiezza biologica

Forma: grande, obliqua, con superficie esterna diamantata (D 46)

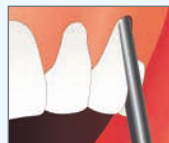

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.3011
1.011.3012

SONICflex bone, inserto n° 80

Trattamento: taglio delle fibre di Sharpey. Allargamento degli alveoli: rimozione dei residui radicolari; estrazione delicata prima dell'impianto; osteotomia (bone splitting)

Forma: quadro, tagliente



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



1.004.3875
1.006.2006

SONICflex bone, inserto n° 81

Trattamento: preparazione della finestra ossea del rialzo del seno. In caso di sostanza corticale dell'osso molto massiccia tagliare eventualmente con rotazione e con l'inserto diamantato rimuovere l'osso residuo

Forma: sfera, grande, diamantatura D 46



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



1.004.3876
1.006.2008


SONICflex bone, inserto n° 83

Trattamento: prelievo di blocchi ossei, osteotomie (distrazione, bone splitting). In caso di sostanza corticale dell'osso spessa lavorare eventualmente con rotazione

Forma: sega sagittale



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

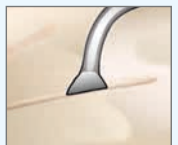


1.004.3878
1.006.2012

Chirurgia

SONICflex bone, inserto n° 84

Trattamento: prelievo di blocchi ossei, osteotomie (distrazione, bone splitting).
In caso di sostanza corticale dell'osso spessa lavorare eventualmente con rotazione

Forma: sega assiale

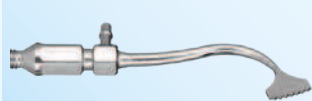


Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.004.3879
1.006.2014

SONICflex bone, inserto n° 85

Trattamento: ideale per il distacco in sicurezza della membrana di Schneider nel rialzo del seno grazie alla forma a zampa di elefante

Forma: zampa d'elefante

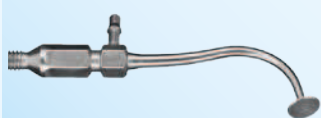

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.006.0645
1.007.1624

SONICflex bone, inserto n° 86

Trattamento: ideale per ricavare in modo semplice e veloce quantitativi maggiori di osso, soprattutto per l'aumento dell'osso

Forma: Raschietto



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.006.0741
1.007.1625

SONICflex bone, inserto n° 87

Trattamento: ideale per tagli stretti, per il distacco dei legamenti

Forma: sega assiale, lame intercambiabili
spessore lama: 0,15 mm



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS
lama (5 pz.)

1.006.1406
1.007.1627
1.006.1405

Accessori:



Codice: chiave dinamometrica

1.000.4887



Codice: cassetta sterile

0.411.9101



Codice: chiave

0.411.0892



Codice: raccordo per l'apporto di soluzione fisiologica, per SONICflex 2003
raccordo per l'apporto di soluzione fisiologica, per SONICflex 2008

1.000.6296
1.006.5966

Chirurgia



KaVo. Dental Excellence.

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban