


SONICflex™ Livre des inserts

Aperçu des inserts KaVo SONICflex



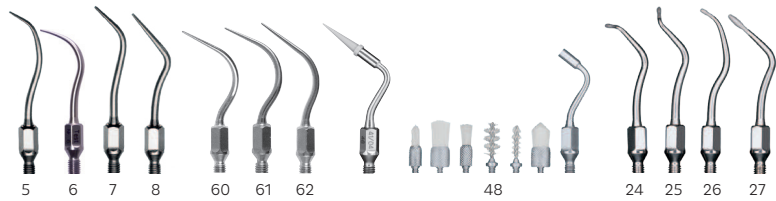


5 6 7 8 60 61 62 48 24 25 26 27

scaler | paro | implant | clean | root planer



30 31 32 33 58 59 73 74 75 76 45 42 43 71 72

micro | bevel | stripping, shaping | seal | caries

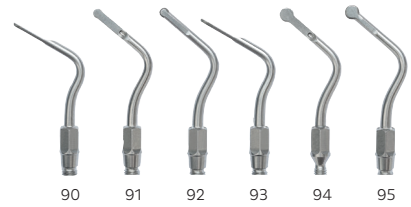


90 91 92 93 94 95

crown extension



70 68 67 69 66 96 56 57 16 17 20 21 55

endo | retro

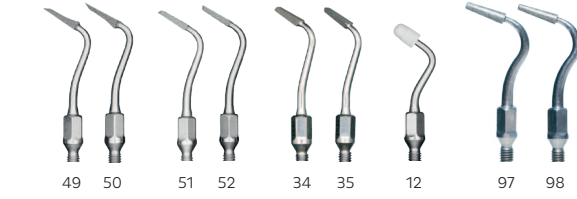

49 50 51 52 34 35 12 97 98

gold | ceram | CAD/CAM | CEM | crown

**SONICflex -
À la pointe de la
polyvalence.**

Grâce aux indications variées dont vous disposez avec le SONICflex, il deviendra rapidement l'un de vos instruments le plus utilisé. Ses nombreux inserts lui permettent de s'adapter exactement à vos besoins.

**Options variées -
vos atouts et avantages :**

- Davantage d'inserts et ainsi de possibilités d'utilisation que tous les autres détarteurs
- Plus de 50 inserts différents
- Pour tous les domaines d'application
- La base d'un traitement invasif minimal réussi



Aperçu des instruments SONICflex™.



MASTER
series

EXPERT
series

SMART
series

Avec votre KaVo SONICflex, vous disposez du détartreur le plus puissant et le plus silencieux de sa catégorie. Il est sans aucun doute l'instrument ayant la plus large gamme d'indications.

Il sera votre allié fiable, puissant et précis grâce à ses 3 niveaux de puissance réglables en fonction des applications et des inserts utilisés.

Technique supérieure – Vos atouts et avantages :

- Puissance réglable sur trois niveaux – conditions de travail optimisées à chaque utilisation
- Sensiblement plus silencieux que ses concurrents directs (jusqu'à 15 dB) – moins de stress et de nuisances sonores pour l'équipe du cabinet et les patients
- Aucun accessoire supplémentaire n'est nécessaire ; il suffit de le brancher sur le raccord KaVo MULTIflex ou Sirona
- Meilleure éclairage : 25 000 Lux, pour une vision détendue sans fatigue des yeux
- Qualité KaVo éprouvée – le SONICflex 2008 L représente la troisième génération de détartreurs chez KaVo, issue de 25 années d'expérience et de connaissances

PROPHYLAXIE

Insert SONICflex scaler n° 5

Traitement : pour éliminer le tartre sur de grandes surfaces
 Forme : Universel



N° de référence : Insert scaler n° 5
 Insert scaler n° 5A



0.571.5171
 1.005.8949

Insert SONICflex scaler n° 6 / 6A

Traitement : pour éliminer le tartre supra-gingival sur de grandes surfaces
 Forme : Faucille



N° de référence : Insert scaler n° 6
 Insert scaler n° 6A




0.571.5181
 1.005.8950

Insert SONICflex scaler n° 7 / 7A

Traitement : pour éliminer le tartre supra-gingival sur de grandes surfaces
 Forme : Paro



N° de référence : Insert scaler n° 7
 Insert scaler n° 7A

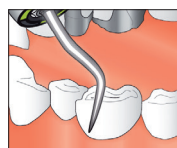

0.571.5191
 1.005.8951

Informations importantes concernant
 le numéro de référence:

XX: Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)
 XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

Insert SONICflex scaler n° 8 / 8A

Traitement : pour éliminer le tartre supra- et sous-gingival
 Forme : paro, extra long




N° de référence : Insert scaler n° 8
 Insert scaler n° 8A



0.571.5371
 1.006.1953

Insert SONICflex clean n° 48/ 48A

Traitement : élimination des plaques, nettoyage des fissures, nettoyage des cavités et des moignons
 pour couronnes
 Forme : différents embouts, balais à usage unique

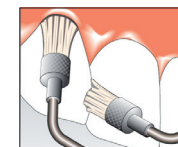



N° de référence :	Insert scaler n° 48	0.571.0401
	Insert scaler n° 48A	1.006.1982
	Clean brush n° 1	0.571.0402
	Clean brush n° 2	0.571.0412
	Clean brush n° 3	0.571.0422
	Clean brush n° 4	0.571.0432
	Clean brush n° 5	0.571.0472
	Clean brush n° 6	0.571.0482
	Brush set	0.571.0001
	Brush set A	1.006.2026

PARODONTOLOGIE

Insert SONICflex paro n° 60 / 60A

Traitement : nettoyage soigneux des poches en parodontologie ; nettoyage efficace des poches jusqu'à une profondeur de 9 mm ; Pour les incisives, les surfaces lisses

Forme : insert long et droit - surface arrondie

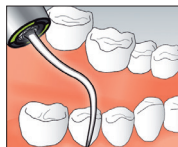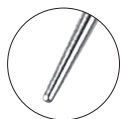


N° de référence : Insert paro n° 60
Insert paro n° 60A

0.571.7402
1.006.1934

Insert SONICflex paro n° 61 /61A

Traitement : nettoyage soigneux des poches en parodontologie ; nettoyage efficace des poches jusqu'à une profondeur de 9 mm ; pour prémolaires, molaires

Forme : insert coudé, **gauche** - surface arrondie

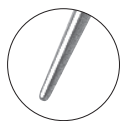

N° de référence : Insert paro n° 61
Insert paro n° 61A

0.571.7412
1.006.1935

Insert SONICflex paro n° 62 /62A

Traitement : nettoyage soigneux des poches en parodontologie ; nettoyage efficace des poches jusqu'à une profondeur de 9 mm ; pour prémolaires, molaires

Forme : insert coudé, **droite** -surface arrondie



N° de référence : Insert paro n° 62
Insert paro n° 62A

0.571.7422
1.006.1936



Informations importantes concernant
le numéro de référence:

XX: Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

Insert SONICflex implant

Traitement : retrait efficace de dépôts et concrétions sous-gingivales en cas d'implants

Forme : inserts cunéiformes, partie en plastique à usage unique (PEEK)

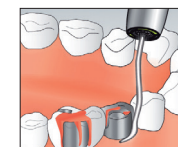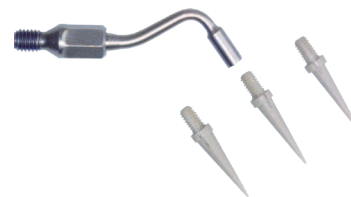

N° de référence : Implant set
Implant set A
Implant refill (30 pcs)

1.003.8167
1.006.2027
1.003.8168

PARODONTOLOGIE

Informations importantes concernant
le numéro de référence:

XX: Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

Insert SONICflex rootplaner n° 24 / 24A

Traitement : pour furcations difficilement accessibles, permet également l'accès aux entrées proximales des furcations dans le cas où la rangée dentaire est fermée

Forme : bouton à contre-angle, petit, **gauche**, diamantation D25




N° de référence : Insert rootplaner n° 24
Insert rootplaner n° 24A

0.571.5621
1.006.1957

Insert SONICflex rootplaner n° 27 / 27A

Traitement : nettoyage efficace de surfaces lisses et de concavités

Forme : paro extra long, bouton, **grand** ; diamantation D25

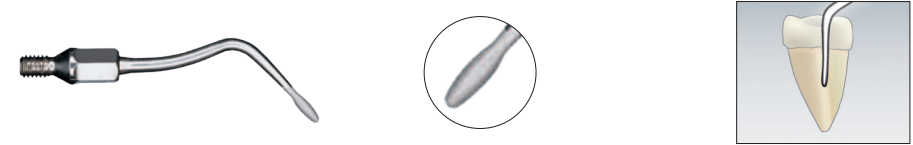

N° de référence : Insert rootplaner n° 27
Insert rootplaner n° 27A

0.571.5651
1.006.1963

Insert SONICflex rootplaner n° 25 / 25A

Traitement : pour furcations difficilement accessibles, permet également l'accès aux entrées proximales des furcations dans le cas où la rangée dentaire est fermée

Forme : bouton à contre-angle, petit, **droite**, diamantation D25




N° de référence : Insert rootplaner n° 25
Insert rootplaner n° 25A

0.571.5631
1.006.1959

Insert SONICflex rootplaner n° 26 / 26A

Traitement : nettoyage efficace de surfaces lisses et de concavités

Forme : universel, bouton, **petit** ; diamantation D25

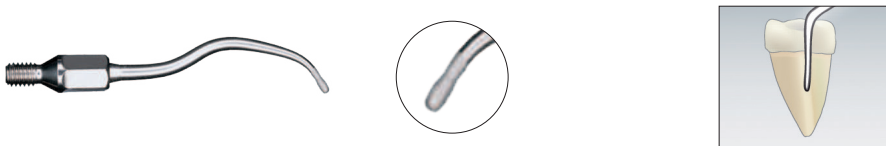

N° de référence : Insert rootplaner n° 26
Insert rootplaner n° 26A

0.571.5641
1.006.1961

INVASIF AU MINIMUM

Informations importantes concernant
le numéro de référence:

XX: Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

Insert SONICflex micro n° 30 / 30A

Traitement : thérapie peu invasive en début de caries
Forme : petite demi-sphère, **mésiale**, diamantation D46




N° de référence : Insert micro n° 30 / 30A
Insert micro n° 30 / 30A

0.571.6811
1.006.1969

Insert SONICflex micro n° 33 / 33A

Traitement : thérapie peu invasive en début de caries
Forme : grande demi-sphère, **distale**, diamantation D46

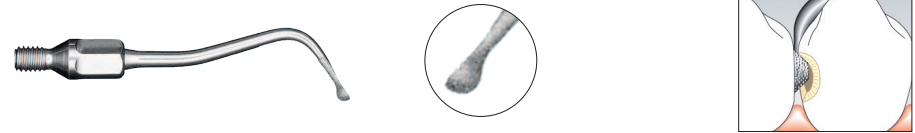


N° de référence : Insert micro n° 33
Insert micro n° 33A

0.571.6821
1.006.1975

Insert SONICflex micro n° 31 / 31A

Traitement : thérapie peu invasive en début de caries
Forme : petite demi-sphère, **distale**, diamantation D46

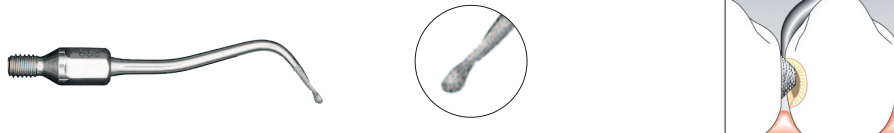


N° de référence : Insert micro n° 31
Insert micro n° 31A

0.571.6801
1.006.1971

Insert SONICflex bevel n° 58 / 58A

Traitement : les bords proximaux des cavités sont coupés en biais
Forme : **mésiale**, diamantation D46

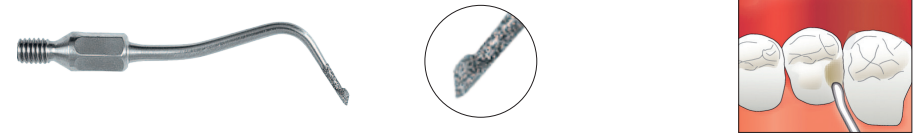

N° de référence : Insert bevel no. 58
Insert bevel no. 58A

0.571.7392
1.006.1988

Insert SONICflex micro n° 32 / 32A

Traitement : thérapie peu invasive en début de caries
Forme : grande demi-sphère, **mésiale**, diamantation D46




N° de référence : Insert micro n° 32
Insert micro n° 32A

0.571.6831
1.006.1973

Insert SONICflex bevel n° 59 / 59A

Traitement : les bords proximaux des cavités sont coupés en biais
Forme : **distale**, diamantation D46

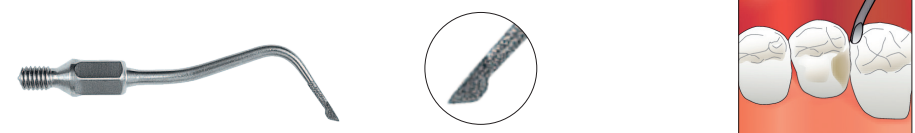

N° de référence : Insert bevel no. 59
Insert bevel no. 59A

0.571.7382
1.006.1990


INVASIF AU MINIMUM

Informations importantes concernant
le numéro de référence:

XX: Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

Insert SONICflex seal conical n° 45/ 45A

Traitement : préparation invasive minimale des puits et fissures
Forme : conique, insert droit Ø 0,5 mm, diamantation D46

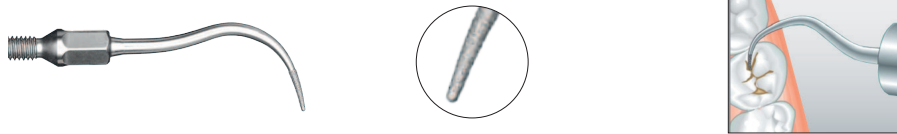

N° de référence : Insert seal n° 45
Insert seal n° 45A

1.000.8323
1.007.1506

Insert SONICflex cariex 1.0 no. 71/ 71A

Traitement : élimination par couches de la partie principale de la substance cariée
Forme : forme sphérique, Ø 1,0 mm, métal dur




N° de référence : Insert cariex TC n° 71 / 71A
Insert cariex TC n° 71 / 71A

1.000.7362
1.006.2002

Insert SONICflex cariex 0.8 n° 42/ 42A

Traitement : fine excavation de caries conservatrice pour la substance et sonoabrasive
Forme : forme sphérique, Ø 0,8 mm, diamantation D64

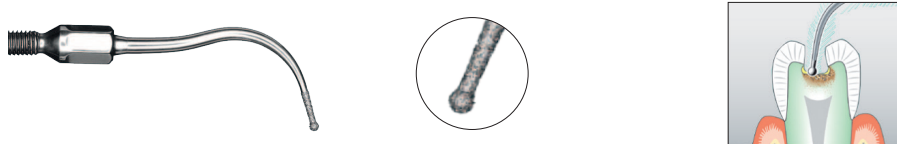


N° de référence : Insert cariex D n° 42
Insert cariex D n° 42A

1.000.7105
1.006.1980

Insert SONICflex cariex 1.4 n° 72/ 72A

Traitement : élimination par couches de la partie principale de la substance cariée
Forme : forme sphérique, Ø 1,4 mm, métal dur

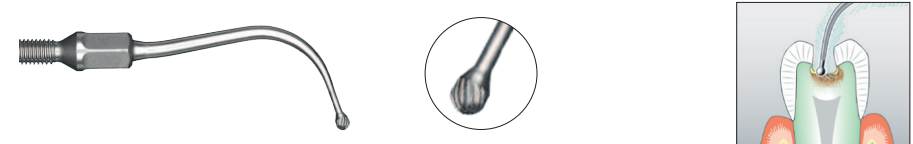


N° de référence : Insert cariex TC n° 72
Insert cariex TC n° 72A

1.000.7363
1.006.2004

Insert SONICflex cariex1.2 n° 43/43 A

Traitement : fine excavation de caries conservatrice pour la substance et sonoabrasive
Forme : forme sphérique, Ø 1,2 mm, diamantation D64

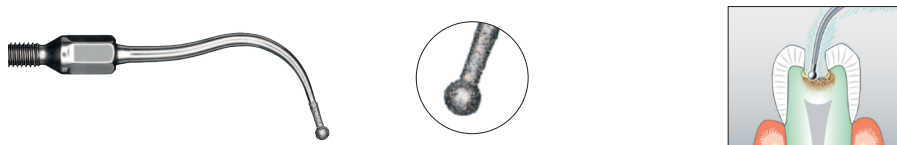

N° de référence : Insert cariex D n° 43
Insert cariex D n° 43A

1.000.7167
1.006.1981

PROTHÈSE DENTAIRE


Informations importantes concernant
le numéro de référence:

XX: Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

Insert SONICflex prep gold n° 49 / 49A mésial

Traitement : préparation précise de différents angles de coupe dans la zone marginale après préparation préalable avec un instrument rotatif et ce, pour améliorer la technique de restauration

Forme : **mésiale**, inserts avec angles de coupe définis : latéral - 60° cervical - 30°, diamantation D46

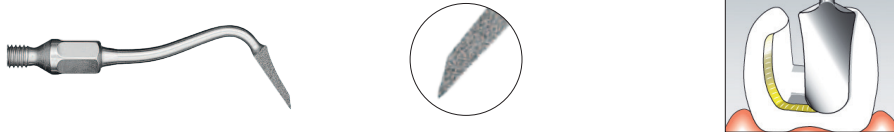


N° de référence : Insert prep gold n° 49
Insert prep gold n° 49A

0.571.7212
1.006.1983

Insert SONICflex prep ceram n° 52 / 52A

Traitement : préparation précise de différents angles de coupe dans la zone marginale, transitions harmonieuses des zones marginales cervicales et latérales

Forme : **distale**, inserts avec angles de coupe définis, latéral - 60°, cervical - 75°, diamantation D46

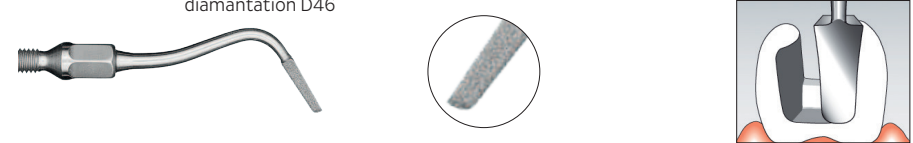


N° de référence : Insert prep ceram n° 52
Insert prep ceram n° 52A

0.571.7272
1.006.1986

Insert SONICflex prep gold n° 50 / 50A distal

Traitement : préparation précise de différents angles de coupe dans la zone marginale après préparation préalable avec un instrument rotatif et ce, pour améliorer la technique de restauration

Forme : **distale**, inserts avec angles de coupe définis : latéral - 60°, cervical - 30°, diamantation D46

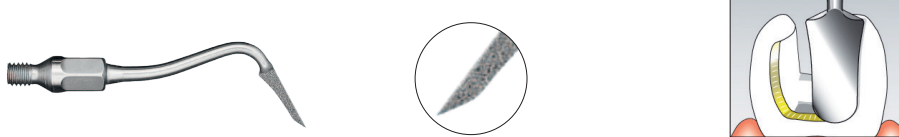


N° de référence : Insert prep gold n° 50
Insert prep gold n° 50A

0.571.7222
1.006.1984

Insert SONICflex prep ceram n° 51 / 51A

Traitement : préparation précise de différents angles de coupe dans la zone marginale, transitions harmonieuses des zones marginales cervicales et latérales

Forme : **mésiale**, inserts avec angles de coupe définis : latéral - 60°, cervical - 75°, diamantation D46

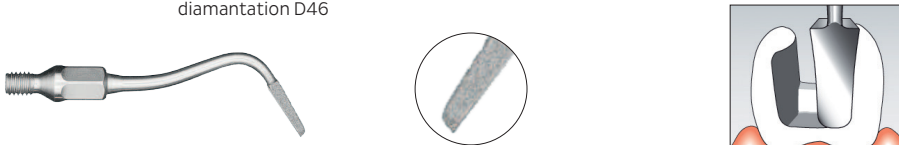

N° de référence : Insert prep ceram n° 51
Insert prep ceram n° 51A


0.571.7262
1.006.1985

PROTHÈSE DENTAIRE

Insert SONICflex prep CAO/FAO n° 34 / 34A

Traitement : accord parfait de la préparation des cavités sur les processus de travail techniques dans les systèmes CAO-FAO

Forme : **mésiale**, angle latéral de 30°, angle cervical de 90°, diamantation D46

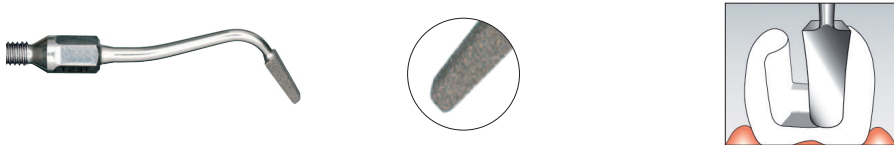


N° de référence : Insert prep CAO/FAO n° 34
Insert prep CAO/FAO n° 34A

1.002.1984
1.006.1977

Insert SONICflex prep CAO/FAO n° 35 / 35A

Traitement : accord parfait de la préparation des cavités sur les processus de travail techniques dans les systèmes CAO-FAO

Forme : **distale**, angle latéral de 30°, angle cervical de 90°, diamantation D46

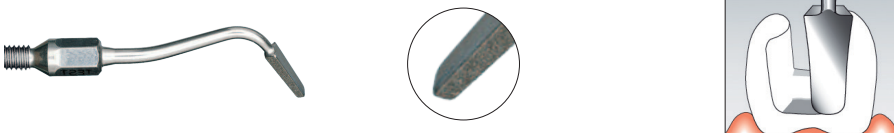

N° de référence : Insert prep CAO/FAO n° 35
Insert prep CAO/FAO n° 35A

1.002.1986
1.006.1979


Informations importantes concernant
le numéro de référence:

XX: Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

Insert SONICflex stripping n° 73 / 73A

Traitement : Séparation avant le début de la préparation coronaire
Arrondissement des zones de transition sur la limite de préparation proximale dans le cadre d'une préparation cavitaire
Modification anatomique des surfaces proximales des obturations en composite
Réduction proximale de l'émail dans le cadre de l'orthopédie dentofaciale

Forme : plat, mésial, diamanté, (D25)

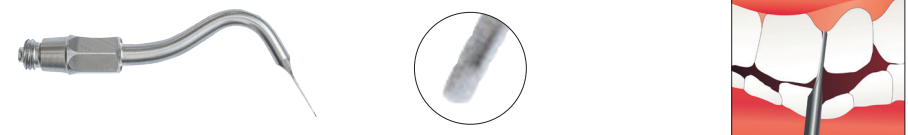

N° de référence : Insert stripping n° 73
Insert stripping n° 73A

1.011.2993
1.011.2994

Insert SONICflex stripping n° 74 / 74A

Traitement : Séparation avant le début de la préparation coronaire
Arrondissement des zones de transition sur la limite de préparation, proximale dans le cadre d'une préparation cavitaire
Modification anatomique des surfaces proximales des obturations en composite
Réduction proximale de l'émail dans le cadre de l'orthopédie dentofaciale

Forme : plat, distale, diamanté, (D25)



N° de référence : Insert stripping n° 74
Insert stripping n° 74A

1.011.2995
1.011.2996

PROTHÈSE DENTAIRE


Insert SONICflex shaping n° 75 / 75A

Traitement : Séparation avant le début de la préparation coronaire
Arrondissement des zones de transition sur la limite de préparation proximale dans le cadre d'une préparation cavitaire
Modification anatomique des surfaces proximales des obturations en composite
Réduction proximale de l'émail dans le cadre de l'orthopédie dentofaciale

Forme : convexe, mésial, diamanté, (D 25)



N° de référence : Insert shaping n° 75
Insert shaping n° 75A

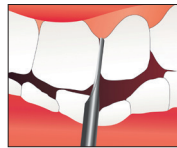

1.011.2997
1.011.2998

Insert SONICflex shaping n° 76 / 76A

Traitement : Séparation avant le début de la préparation coronaire
Arrondissement des zones de transition sur la limite de préparation proximale dans le cadre d'une préparation cavitaire
Modification anatomique des surfaces proximales des obturations en composite
Réduction proximale de l'émail dans le cadre de l'orthopédie dentofaciale

Forme : convexe, distale, diamanté, (D 25)



N° de référence : Insert shaping n° 76
Insert shaping n° 76A



1.011.2999
1.011.3000

Informations importantes concernant
le numéro de référence:


XX: Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

Insert SONICflex cem n° 12 / 12A

Traitement : Insert cem n° 12 con embout cem
Forme : bouchon arrondi en plastique



N° de référence : Insert cem n° 12 avec Embout cem
Insert cem n° 12A avec Embout cem
Embout Cem

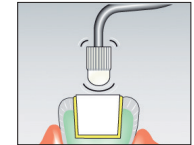

0.571.5431
1.006.2021
0.571.7142


Insert SONICflex prep crown n° 97 / 97A

Traitement : préparation corono-périphérique (moignons)- l'idéal pour cette indication est la combinaison d'instruments de préparation rotatifs pour couronnes et d'inserts sonores

Forme : arrondie, diamantation D46



N° de référence : Insert crown prep n° 97
Insert crown prep n° 97A

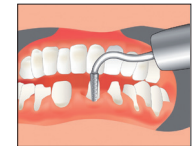

1.008.6383
1.008.6384


Insert SONICflex prep crown n° 98 / 98A

Traitement : préparation corono-périphérique (moignons) - l'idéal pour cette indication est la combinaison d'instruments de préparation rotatifs pour couronnes et d'inserts sonores.

Forme : plat, diamantation D46



N° de référence : Insert crown prep n° 98
Insert crown prep n° 98A

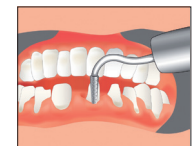


1.008.6385
1.008.6386

RÉSECTION APICALE

Insert SONICflex retro n° 56 / 56A

Traitement : Recherche du canal radiculaire. Travail considérablement facilité en ce qui concerne la préparation rétrograde réelle des cavités

Forme : insert cylindrique extrêmement étroit, **gauche**, diamantation D46

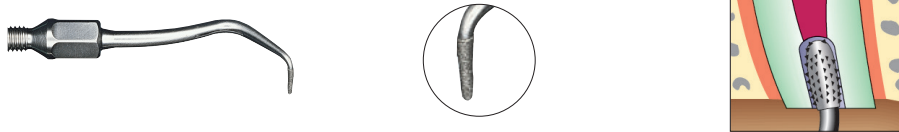

N° de référence : Insert retro n° 56
Insert retro n° 56A

0.571.7322
1.006.2040

Insert SONICflex retro n° 57 / 57A

Traitement : Recherche du canal radiculaire. Travail considérablement facilité en ce qui concerne la préparation rétrograde réelle des cavités

Forme : insert cylindrique extrêmement étroit, **droite**, diamantation D46



N° de référence : Insert retro n° 57
Insert retro n° 57A

0.571.7332
1.006.2041

Insert SONICflex retro n° 16 / 16A

Traitement : préparation du canal radiculaire, accès considérablement facilité en cas de forte courbure articulaire

Forme : **gauche**, petit cylindre, diamanté D64



N° de référence : Insert retro n° 16
Insert retro n° 16A

0.571.5541
1.006.2036

Informations importantes concernant
le numéro de référence:

XX: Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

Insert SONICflex retro n° 17 / 17A

Traitement : préparation du canal radiculaire, accès considérablement facilité en cas de forte courbure articulaire

Forme : **droite**, petit cylindre, diamantation D64



N° de référence : Insert retro n° 17
Insert retro n° 17A

0.571.5581
1.006.2035

Insert SONICflex retro n° 20 / 20A et n° 21 / 21A

Traitement : Préparation de l'incision inférieure. Préparation, adaptée aux axes, du canal radiculaire en cas de défaut minimal des os

Forme : en forme de poire, **petit, gauche**, diamantation D64



N° de référence : Insert retro n° 20
Insert retro n° 20A

0.571.5521
1.006.2037

N° de référence : en forme de poire, **petit, droite**, diamantation D64




N° de référence : Insert retro n° 21
Insert retro n° 21A

0.571.5561
1.006.2038

Insert SONICflex retro n° 55 / 55A

Traitement : pour les racines dont les pointes sont fortement inclinées vers l'oral

Forme : diamantation D46

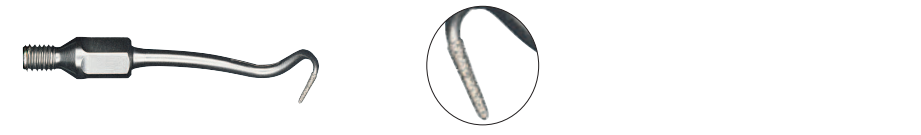

N° de référence : Insert retro n° 55
Insert retro n° 55A

0.571.7342
1.006.2039

ENDODONTIE

Insert SONICflex endo n° 66 / 66A

Traitement : Mise en oeuvre de la cavité d'accès, élimination d'excédents
 Forme : bouton, **grand**, diamantation D46



N° de référence : Insert endo n° 66
 Insert endo n° 66A


1.000.5825
 1.006.1992

Insert SONICflex endo n° 67 / 67A

Traitement : Extension de grands canaux
 Forme : cônica **125°**, diamantation D46



N° de référence : Insert endo n° 67
 Insert endo n° 67A

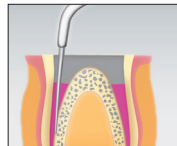

1.000.5822
 1.006.1994

Insert SONICflex endo n° 68 / 68A

Traitement : Extension de grands canaux
 Forme : cônica **112°**, diamantation D46



N° de référence : Insert endo n° 68
 Insert endo n° 68A

1.000.5823
 1.006.1996

Informations importantes concernant
 le numéro de référence:


XX: Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

Insert SONICflex endo n° 69 / 69A

Traitement : Élimination des résidus de remplissage du canal radicaire
 Forme : bouton, **petit**, diamantation D46



N° de référence : Insert endo n° 69
 Insert endo n° 69A

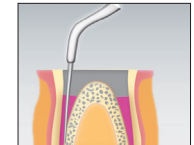


1.000.5827
 1.006.1998

Insert SONICflex endo n° 70 / 70A

Traitement : pour canaux particulièrement longs et larges
 Forme : cônica **117°**, diamantation D25 la partie avant n'est pas diamantée



N° de référence : Insert endo n° 70
 Insert endo n° 70A

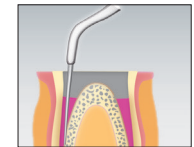

1.000.5821
 1.006.2000

Insert SONICflex Endo clean n° 96 / 96A

Traitement : pour le rinçage du canal radicaire, l'élimination des débris et de la boue dentinaire (smear layer) et potentialisation de l'action de la solution de rinçage antibactérienne.
 Forme : angles de 105° et de 75°

N° de référence :
 1X support N° 96 / 96A et 6X endo clean seringues 015, 020 et 025 :




Set: 1.006.2045 | Set A: 1.007.1142

Endo clean support no. 96 :

1.008.5163 | A: 1.008.5164

Endo clean seringues (6pcs) pour tous les SONICflex :

015 white: 1.006.2042 | 020 yellow: 1.006.2043 | 025 red: 1.006.2044

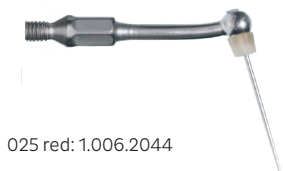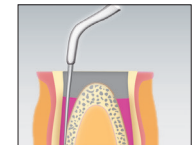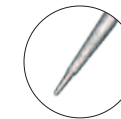


**Informations importantes concernant
le numéro de référence:**

XX: Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

Insert SONICflex crown extension 020 n° 90 / 90A

Traitement : Élongation coronaire chirurgicale sans lambeau pour la restauration de l'espace biologique en cas de :
tracé d'arcade asymétrique, Sourire gingival, Atteinte de l'espace biologique

Forme : petit, droit, surface extérieure diamantée (D46)

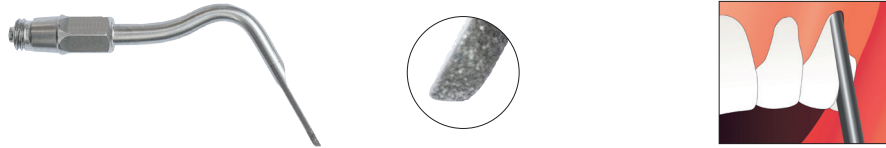

N° de référence : Insert crown extension 020 n° 90
Insert crown extension 020 n° 90A

1.011.3001
1.011.3002

Insert SONICflex crown extension 020 n° 92 / 92A

Traitement : Élongation coronaire chirurgicale sans lambeau pour la restauration de l'espace biologique en cas de :
tracé d'arcade asymétrique, Sourire gingival, Atteinte de l'espace biologique

Forme : petit, oblique, surface extérieure diamantée (D46)



N° de référence : Insert crown extension 020 n° 92
Insert crown extension 020 n° 92A

1.011.3005
1.011.3006

Insert SONICflex crown extension 020 n° 91 / 91A

Traitement : Élongation coronaire chirurgicale sans lambeau pour la restauration de l'espace biologique en cas de :
tracé d'arcade asymétrique, Sourire gingival, Atteinte de l'espace biologique

Forme : small, oblique, diamond-coated outer surface D46




N° de référence : Insert crown extension 020 n° 91
Insert crown extension 020 n° 91A

1.011.3003
1.011.3004

Insert SONICflex crown extension 030 n° 93 / 93A

Traitement : Élongation coronaire chirurgicale sans lambeau pour la restauration de l'espace biologique en cas de :
tracé d'arcade asymétrique, Sourire gingival, Atteinte de l'espace biologique

Forme : grand, droit, surface extérieure diamantée (D46)

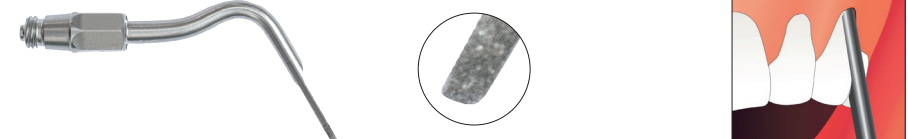

N° de référence : Insert crown extension 030 n° 93
Insert crown extension 030 n° 93A


1.011.3007
1.011.3008

CHIRURGIE

Insert SONICflex crown extension 030 n° 94 / 94A

Traitement : Élongation coronaire chirurgicale sans lambeau pour la restauration de l'espace biologique en cas de :

Forme : tracé d'arcade asymétrique, Sourire gingival, Atteinte de l'espace biologique grand, oblique, surface extérieure diamantée (D46)

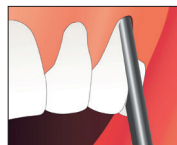

N° de référence : Insert crown extension 030 n° 94
Insert crown extension 030 n° 94A

1.011.3009
1.011.3010

Insert SONICflex crown extension 030 n° 95 / 95A

Traitement : Élongation coronaire chirurgicale sans lambeau pour la restauration de l'espace biologique en cas de :

Forme : tracé d'arcade asymétrique, Sourire gingival, Atteinte de l'espace biologique petit, oblique, surface extérieure diamantée (D46)



N° de référence : Insert crown extension 030 n° 95
Insert crown extension 030 n° 95A

1.011.3011
1.011.3012

Informations importantes concernant
le numéro de référence:

XX: Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

Accessoires :



clé dynamométrique

1.000.4887



Cassette stérile

0.411.9101



clé

0.411.0892



pièce intermédiaire pour l'alimentation de liquide
médicamenteux pour SONICflex 2003 / 2008

1.000.6296
A: 1.006.5966

L'excellence dentaire dans tous les domaines.



Équipements de cabinet dentaire

Unités de soin et scialytiques KaVo, fauteuils dentaires, systèmes de communication avec les patients, microscope dentaire, et autres instruments.



Instruments

Pièces-à-main et contre-angles dentaires, turbines, systèmes d'aéropolissage et petits appareils pour tous les domaines d'application, notamment le diagnostic, la prophylaxie, les soins de restauration, la chirurgie, l'endodontie et l'entretien des instruments.



Imagerie

Équipements de radiographies intraorales, capteurs et systèmes de plaques d'imagerie numérique, dispositifs de radiographie panoramique et céphalométrique combinés au CBCT, ainsi que des appareils dédiés au CBCT pour toute application dans le domaine des soins dentaires.

Les produits, fonctionnalités et services indiqués et décrits dans ce catalogue ne sont pas commercialisés dans tous les pays. Toutes les caractéristiques étaient exactes au moment de la publication. KaVo Dental GmbH n'est pas responsable des différences de couleur ou de forme par rapport aux illustrations, et n'est pas responsable des fautes ou des erreurs d'impression. KaVo Dental GmbH se réserve le droit de modifier les brochures à tout moment. La réimpression, même partielle, n'est autorisée qu'avec le consentement de KaVo Dental GmbH.

Dispositif Medical (DM) Classe IIa pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Lisez attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. L'ensemble des produits présent sur ce document sont fabriqués par les sociétés Kaltenbach & Voigt GmbH – Organisme notifié: 0124 – Date de parution mai 2018.

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban