



SONICflex[®]

Libro delle punte.

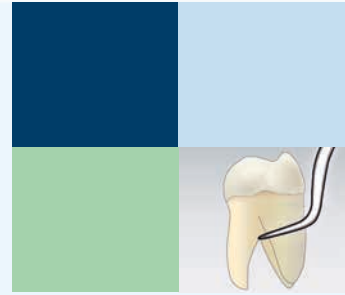


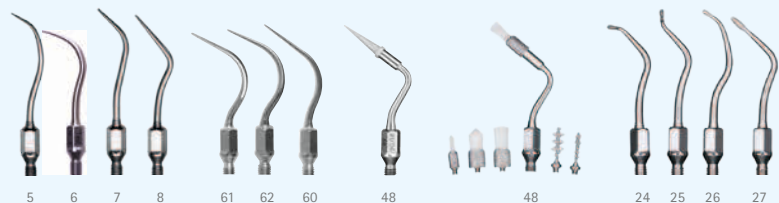

scaler | paro | implant | clean | rootplaner




micro | bevel | stripping, shaping | seal | caries

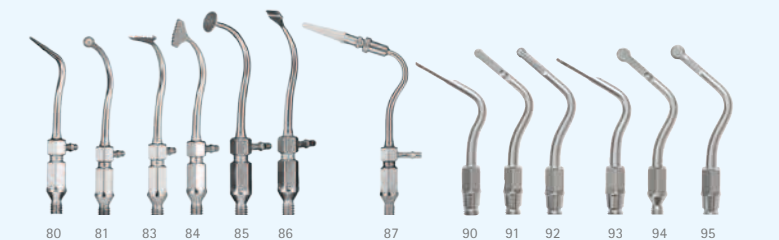

bone | crown extension



endo | retro

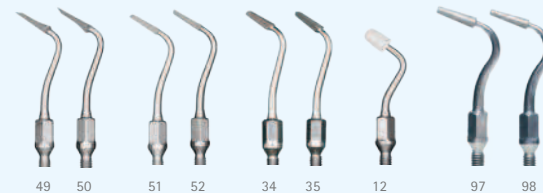

gold | ceram | CAD/CAM | cem | crown



Versatilità al massimo livello.

Grazie alle ampie possibilità di trattamento offerte, SONICflex diventerà presto uno strumento di cui non potrete fare a meno.

Grazie ai numerosi inserti si adegua perfettamente alle vostre esigenze.

Numerose possibilità, punti di forza e vantaggi per voi:

- Più inserti e quindi maggiori possibilità di impiego di qualsiasi altro airscaler
- Oltre 50 punte diverse
- Per tutti i campi di applicazione
- Base per un trattamento minimamente invasivo di successo



SONICflex® Panoramica inserti.

KaVo **master** series




Cambio della punta veloce e comodo: basta una sola rotazione anche con raccordo per attacchi Sirona

KaVo **expert** series



KaVo **smart** series

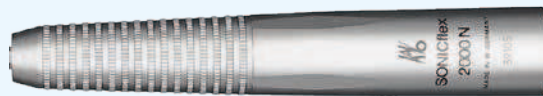

Il vostro vantaggio quotidiano in termini di potenza.

KaVo SONICflex è l'airscaler più potente e silenzioso della sua classe. È sicuramente lo strumento che vanta il più ampio spettro di applicazioni. Grazie ai livelli di potenza regolabili supporta in modo efficace e preciso il vostro lavoro in funzione del tipo di indicazione.

Tecnologia superiore, punti di forza e vantaggi per voi:

- Potenza regolabile in tre livelli – condizioni di lavoro ottimali per tutte le indicazioni
- Silenziosità notevolmente superiore a quella di prodotti concorrenti (fino a 15 dB): tutela la salute del personale dello studio e dei pazienti
- Non occorrono strumenti supplementari, basta una semplice operazione di innesto sull'attacco KaVo MULTIflex oppure su quello Sirona, senza fastidiosi grovigli di cavi
- Illuminazione ottimale: 25.000 Lux – per una visibilità rilassata, senza affaticare gli occhi
- Proverbiale qualità KaVo: SONICflex 2008 L è già la terza generazione di scaler KaVo, il risultato di 25 anni di esperienza

Inserto SONICflex scaler n. 5

Trattamento: per la rimozione di grandi quantità di tartaro
 Forma: universale



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



0.571.5171
1.005.8949

Inserto SONICflex scaler n. 8

Trattamento: per la rimozione del tartaro sopra e sotto-gengivale
 Forma: paro, extra lungo



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



0.571.5371
1.006.1953

Inserto SONICflex scaler n. 6

Trattamento: per la rimozione del tartaro sopra-gengivale
 Forma: falchetto



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



0.571.5181
1.005.8950

Inserto SONICflex scaler n. 7

Trattamento: per la rimozione del tartaro sopra-gengivale
 Forma: paro



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS




0.571.5191
1.005.8951

Inserto SONICflex scaler n. 48

Trattamento: eliminazione della placca, pulizia di solchi, pulizia di cavità e monconi protesici
 Forma: diverse punte applicabili e spazzole monouso



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS
 spazzolino clean n. 1
 spazzolino clean n. 2
 spazzolino clean n. 3
 spazzolino clean n. 4
 spazzolino clean n. 5
 spazzolino clean n. 6
 inserto n. 48
 inserto n. 48 A

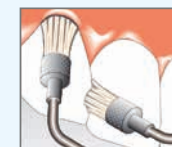


0.571.0001
1.006.2026
0.571.0402
0.571.0412
0.571.0422
0.571.0432
0.571.0472
0.571.0482
0.571.0401
1.006.1982

Profilassi

Inserto SONICflex paro n° 60

Trattamento: pulizia delicata delle tasche parodontali nella terapia della parodontite; pulizia efficace della tasca fino a 9 mm di profondità; per la parte dei denti frontali, superfici lisce

Forma: inserto lungo, diritto - superficie arrotondata

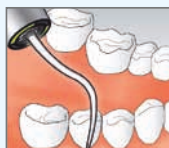

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7402
1.006.1934

Inserto SONICflex paro n° 61

Trattamento: pulizia delicata delle tasche parodontali nella terapia della parodontite; pulizia efficace della tasca fino a 9 mm di profondità; per premolari, molari

Forma: inserto inclinato ad angolo, sinistro - superficie arrotondata



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7412
1.006.1935

Inserto SONICflex paro n° 62

Trattamento: pulizia delicata delle tasche parodontali nella terapia della parodontite; pulizia efficace della tasca fino a 9 mm di profondità; per premolari, molari

Forma: inserto inclinato ad angolo, destro - superficie arrotondata




Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7422
1.006.1936

Inserto SONICflex implant

Trattamento: rimozione efficace di depositi e concrezioni sotto-gengivali negli impianti

Forma: inserto cuneiforme, inserto monouso in plastica (PEEK)

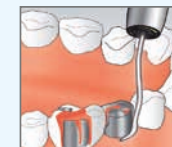

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS
Inserto monouso in plastica (30 pz.)


1.003.8167
1.006.2027
1.003.8168

Parodontologia

SONICflex rootplaner, inserto n. 24

Trattamento: per le forcazioni di difficile accesso, consente l'accesso agli ingressi approssimali delle forcazioni anche con arcata dentaria chiusa

Forma: boccio a contrangolo, piccolo, **sinistro**, diamantatura D25

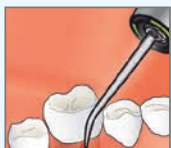

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5621
1.006.1957

SONICflex rootplaner, inserto n. 27

Trattamento: pulizia efficace di superfici lisce e concavità

Forma: paro extra lungo, boccio, **grande**; diamantatura D25



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5651
1.006.1963

SONICflex rootplaner, inserto n. 25

Trattamento: per le forcazioni di difficile accesso, consente l'accesso agli ingressi approssimali delle forcazioni anche con arcata dentaria chiusa

Forma: boccio a contrangolo, piccolo, **destro**, diamantatura D25



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5631
1.006.1959

SONICflex rootplaner, inserto n. 26

Trattamento: pulizia efficace di superfici lisce e concavità

Forma: universale, boccio, **piccolo**; diamantatura D25



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5641
1.006.1961

Parodontologia



SONICflex micro, inserto n. 30

Trattamento: terapia minimamente invasiva in caso di carie iniziale
 Forma: piccola semisfera, **mesiale**, diamantatura D46




0.571.6811
 1.006.1969

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto pr SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

SONICflex micro, inserto n. 33

Trattamento: terapia minimamente invasiva in caso di carie iniziale
 Forma: piccola semisfera, **distale**, diamantatura D46

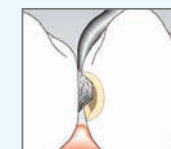


0.571.6821
 1.006.1975

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

SONICflex micro, inserto n. 31

Trattamento: terapia minimamente invasiva in caso di carie iniziale
 Forma: piccola semisfera, **distale**, diamantatura D46

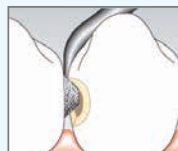


0.571.6801
 1.006.1971

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

SONICflex bevel, inserto n. 58

Trattamento: i bordi approssimali delle cavità vengono smussati
 Forma: mesiale, diamantatura D46

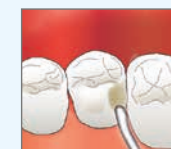

0.571.7392
 1.006.1988

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

SONICflex micro, inserto n. 32

Trattamento: terapia minimamente invasiva in caso di carie iniziale
 Forma: piccola semisfera, **mesiale**, diamantatura D46



0.571.6831
 1.006.1973

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

SONICflex bevel, inserto n. 59

Trattamento: i bordi approssimali delle cavità vengono smussati
 Forma: distale, diamantatura D46



0.571.7382
 1.006.1990

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

Minima invasività




SONICflex seal, inserto n. 45

Trattamento: preparazione minimamente invasiva dei solchi, ingrandimento indolore dei solchi
 Forma: conico, inserto diritto Ø 0,5 mm, diamantatura D 46



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

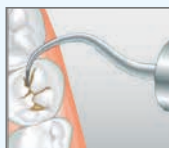

1.000.8323
 1.007.1506

SONICflex cariex TC, inserto n. 71

Trattamento: rimozione a strati della parte principale della struttura cariata
 Forma: a sfera, Ø 1,0 mm, metallo duro



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS




1.000.7362
 1.006.2002

SONICflex cariex D, inserto n. 42

Trattamento: escavazione della carie sonoabrasiva, senza danneggiare la sostanza del dente, fine
 Forma: a sfera, Ø 0,8 mm, diamantatura D 64



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

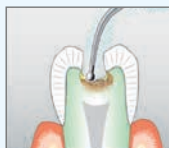

1.000.7105
 1.006.1980

SONICflex cariex TC, inserto n. 72

Trattamento: rimozione a strati della parte principale della struttura cariata
 Forma: a sfera, Ø 1,4 mm, metallo duro




Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS




1.000.7363
 1.006.2004

SONICflex cariex D, inserto n. 43

Trattamento: escavazione della carie sonoabrasiva, senza danneggiare la sostanza del dente, fine
 Forma: a sfera, Ø 1,2 mm, diamantatura D 64

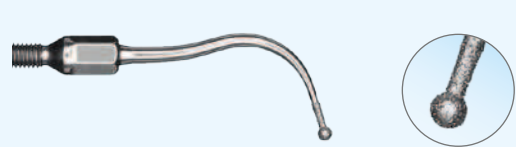

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

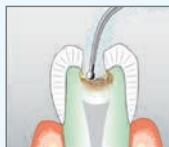


1.000.7167
 1.006.1981

Minima invasività

SONICflex prep gold, inserto n. 49 mesiale

Trattamento: preparazione precisa di diversi angoli di bordi nella zona del margine dopo la "preparazione grossolana" effettuata in modo rotante; in questo modo è possibile un miglior restauro dentale sotto il profilo odontotecnico

Forma: **mesiale**, inserti con angoli di bordi definiti: laterale - 60° cervicale - 30°, diamantatura D 46

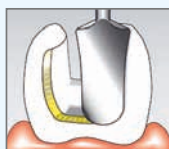


Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7212
1.006.1983

SONICflex prep ceram, inserto n. 52

Trattamento: preparazione precisa di diversi angoli nei bordi marginali, passaggi armonici delle zone del margine cervicale e laterale

Forma: **distale**, inserti con angoli di bordi definiti: laterale - 60°, cervicale - 75°, diamantatura D 46

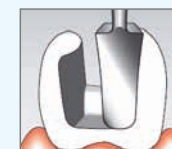


Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7272
1.006.1986

SONICflex prep gold, inserto n. 50 distale

Trattamento: preparazione precisa di diversi angoli nei bordi marginali dopo la "preparazione grossolana" effettuata in modo rotante, in questo modo è possibile un migliore restauro sotto il profilo odontotecnico

Forma: **distale**, inserti con angoli di bordi definiti: laterale - 60°, cervicale - 30°, diamantatura D 46

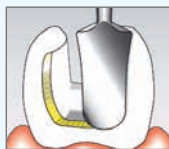


Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7222
1.006.1984

SONICflex prep ceram, inserto n. 51

Trattamento: preparazione precisa di diversi angoli nei bordi marginali, passaggi armonici delle zone del margine cervicale e laterale

Forma: **mesiale**, inserti con angoli di bordi definiti: laterale - 60° cervicale - 75°, diamantatura D 46

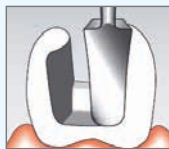

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7262
1.006.1985

Protetica

SONICflex prep CAD / CAM, inserto n. 34

Trattamento: perfetto adattamento della preparazione della cavità ai processi tecnici nei sistemi CAD-CAM

Forma: **mesiale**, angolo laterale 30°, angolo cervicale 90°, diamantatura D 46



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



1.002.1984
1.006.1977

SONICflex prep CAD / CAM, inserto n. 35

Trattamento: perfetto adattamento della preparazione della cavità ai processi tecnici nei sistemi CAD-CAM

Forma: **distale**, angolo laterale 30°, angolo cervicale 90°, diamantatura D 46



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto a SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



1.002.1986
1.006.1979


Punta SONICflex stripping n. 73

Trattamento: Separazione preliminare alla preparazione del moncone coronale
Arrotondamento degli spigoli prossimali della preparazione cavitaria
Perfezionamento anatomico delle superfici prossimali di otturazioni in composito

Forma: **piatta, mesiale**, diamantata (D 25)



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

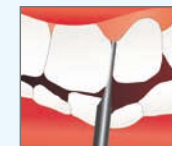

1.011.2993
1.011.2994


Punta SONICflex stripping n. 74

Trattamento: Separazione preliminare alla preparazione del moncone coronale
Arrotondamento degli spigoli prossimali della preparazione cavitaria
Perfezionamento anatomico delle superfici prossimali di otturazioni in composito

Forma: **piatta, distale**, diamantata (D 25)



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

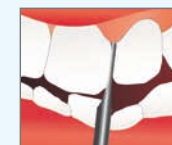

1.011.2995
1.011.2996

Protetica

Punta SONICflex shaping n. 75

Trattamento: Separazione preliminare alla preparazione del moncone coronale
Arrotondamento degli spigoli prossimali della preparazione cavitaria
Perfezionamento anatomico delle superfici prossimali di otturazioni in composito arcuata, **mesiale**, diamantata (D 25)

Forma:



1.011.2997
1.011.2998

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

Punta SONICflex shaping n. 76

Trattamento: Separazione preliminare alla preparazione del moncone coronale
Arrotondamento degli spigoli prossimali della preparazione cavitaria
Perfezionamento anatomico delle superfici prossimali di otturazioni in composito arcuata, **distale**, diamantata (D 25)

Forma:



1.011.2999
1.011.3000

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

SONICflex cem, inserto n. 12

Trattamento: inserimento delicato di inlay
Forma: cappetta protettiva in plastica arrotondata



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS
Rivestimento CEM

0.571.5431
1.006.2021
0.571.7142

SONICflex crown prep, inserto n. 97

Trattamento: preparazione monconi protesici - ideale per questa indicazione è la combinazione di strumenti di preparazione monconi protesici rotanti e inserti sonici della stessa forma.

Forma: arrotondata, diamantatura D46



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L e 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.008.6383
1.008.6384

SONICflex crown prep, inserto n. 98

Trattamento: preparazione monconi protesici - ideale per questa indicazione è la combinazione di strumenti di preparazione monconi protesici rotanti e inserti sonici della stessa forma.

Forma: piatta, diamantatura D46



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L e 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S

1.008.6385
1.008.6386

Protesica

SONICflex retro, inserto n. 56

Trattamento: ricerca / identificazione del canale radicolare.
 Notevole semplificazione del lavoro di pura preparazione di cavità retrograde
 Forma: inserto cilindrico estremamente sottile, **sinistro**, diamantatura D 46





Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7322
 1.006.2040

SONICflex retro, inserto n. 17

Trattamento: preparazione del canale radicolare, notevole semplificazione dell'accesso in presenza di forte incurvatura della radice
 Forma: **destro**, piccolo cilindro, diamantatura D 64

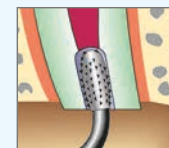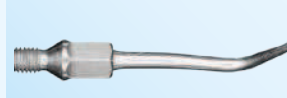

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5581
 1.006.2035

SONICflex retro, inserto n. 57

Trattamento: ricerca / identificazione del canale radicolare.
 Notevole semplificazione del lavoro di pura preparazione di cavità retrograde
 Forma: inserto cilindrico sottile, **destro**, diamantatura D 46




Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7332
 1.006.2041

SONICflex retro, inserto n. 20 e n. 21

Trattamento: preparazione del sottosquadro. Preparazione conforme all'asse del canale radicolare in presenza di difetto osseo minimo.
 Forma: a pera, **piccolo, sinistro** (n. 20), **destro** (n. 21), diamantatura D 64

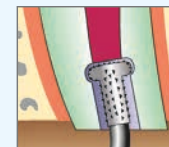

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5521
 1.006.2037




Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5561
 1.006.2038

SONICflex retro, inserto n. 16

Trattamento: preparazione del canale radicolare, notevole semplificazione dell'accesso in presenza di forte incurvatura della radice
 Forma: **sinistro**, cilindro piccolo, diamantatura D 64

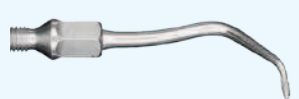

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5541
 1.006.2036

SONICflex retro, inserto n. 55

Trattamento: per radici dall'apice ad inclinazione fortemente frontale
 Forma: diamantatura D 46



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7342
 1.006.2039

Resezione dell'apice della radice



SONICflex endo, inserto n. 66

Trattamento: formazione della cavità di accesso, rimozione eccedenze
 Forma: bocciolo, **grande**, diamantatura D 46



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS


1.000.5825
 1.006.1992

SONICflex endo, inserto n. 67

Trattamento: ingrandimento canali di maggiori dimensioni
 Forma: conico **125°**, diamantatura D 46



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

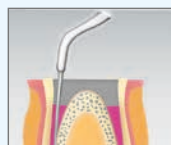

1.000.5822
 1.006.1994

SONICflex endo, inserto n. 68

Trattamento: ingrandimento canali di maggiori dimensioni
 Forma: conico **112°**, diamantatura D 46



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS


1.000.5823
 1.006.1996

SONICflex endo, inserto n. 69

Trattamento: rimozione di residui dell'otturazione del canale radicolare
 Forma: bocciolo, **piccolo**, diamantatura D 46



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

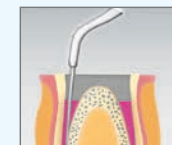


1.000.5827
 1.006.1998

SONICflex endo, inserto n. 70

Trattamento: per canali particolarmente lunghi e larghi
 Forma: conico **117°**, diamantatura D 25
 parte anteriore non diamantata



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

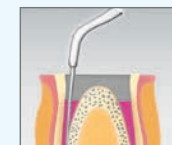

1.000.5821
 1.006.2000


SONICflex endo clean, inserto n. 96

Trattamento: per il lavaggio del canale radicolare, per rimuovere detriti e smear layer e per aumentare la soluzione di lavaggio antibatterica
 Forma: 105° o angolo 75°



Codice: adatto per
 SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS
 SONICflex Endo clean set A **1.007.1142**
 SONICflex Endo clean, inserto A **1.008.5164**
 adatto per SONICflex 2000 N / L e 2003 / L
 SONICflex Endo clean, inserto **1.008.5163**
 SONICflex Endo clean set **1.006.2045**

Endo clean, aghi per SONICflex 2000 N / L, 2003 e 2008
 SONICflex Endo clean 015 bianco **1.006.2042**
 SONICflex Endo clean 020 giallo **1.006.2043**
 SONICflex Endo clean 025 rosso **1.006.2044**

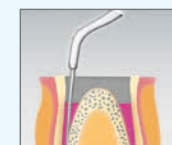

Endodonzia

Punta SONICflex crown extension 020 n. 90

Trattamento: Allungamento chirurgico della corona a minima invasività senza lembo grazie al leggero movimento della punta sonica per il ripristino dell'ampiezza biologica in caso di: asimmetria delle arcate
Gummy Smile

Lesione dell'ampiezza biologica

Forma: piccola, rettilinea, con superficie esterna diamantata (D 46)



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS


1.011.3001
1.011.3002

Punta SONICflex crown extension 020 n. 92

Trattamento: Allungamento chirurgico della corona a minima invasività senza lembo grazie al leggero movimento della punta sonica per il ripristino dell'ampiezza biologica in caso di: asimmetria delle arcate
Gummy Smile

Lesione dell'ampiezza biologica

Forma: piccola, con superficie esterna diamantata (D 46)

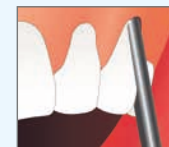

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.3005
1.011.3006

Punta SONICflex crown extension 0020 n. 91

Trattamento: Allungamento chirurgico della corona a minima invasività senza lembo grazie al leggero movimento della punta sonica per il ripristino dell'ampiezza biologica in caso di: asimmetria delle arcate
Gummy Smile

Lesione dell'ampiezza biologica

Forma: piccola, obliqua, con superficie esterna diamantata (D 46)



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS


1.011.3003
1.011.3004

Punta SONICflex crown extension 030 n. 93

Trattamento: Allungamento chirurgico della corona a minima invasività senza lembo grazie al leggero movimento della punta sonica per il ripristino dell'ampiezza biologica in caso di: asimmetria delle arcate
Gummy Smile

Lesione dell'ampiezza biologica

Forma: grande, rettilinea, con superficie esterna diamantata (D 46)

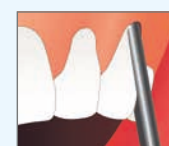

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.3007
1.011.3008

Chirurgia



Punta SONICflex crown extension 030 n. 94

Trattamento: Allungamento chirurgico della corona a minima invasività senza lembo grazie al leggero movimento della punta sonica per il ripristino dell'ampiezza biologica in caso di: asimmetria delle arcate Gummy Smile
Lesione dell'ampiezza biologica

Forma: grande, obliqua, con superficie esterna diamantata (D 46)




Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.3009
1.011.3010

Punta SONICflex crown extension 030 n. 95

Trattamento: Allungamento chirurgico della corona a minima invasività senza lembo grazie al leggero movimento della punta sonica per il ripristino dell'ampiezza biologica in caso di: asimmetria delle arcate Gummy Smile
Lesione dell'ampiezza biologica

Forma: grande, obliqua, con superficie esterna diamantata (D 46)

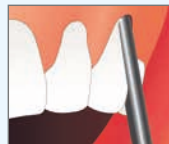

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.3011
1.011.3012

SONICflex bone, inserto n° 80

Trattamento: taglio delle fibre di Sharpey. Allargamento degli alveoli: rimozione dei residui radicalari; estrazione delicata prima dell'impianto; osteotomia (bone splitting)

Forma: quadro, tagliente




Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.004.3875
1.006.2006

SONICflex bone, inserto n° 81

Trattamento: preparazione della finestra ossea del rialzo del seno. In caso di sostanza corticale dell'osso molto massiccia tagliare eventualmente con rotazione e con l'inserto diamantato rimuovere l'osso residuo

Forma: sfera, grande, diamantatura D 46

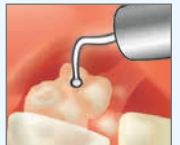

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.004.3876
1.006.2008

SONICflex bone, inserto n° 83

Trattamento: prelievo di blocchi ossei, osteotomie (distrazione, bone splitting). In caso di sostanza corticale dell'osso spessa lavorare eventualmente con rotazione

Forma: sega sagittale



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS


1.004.3878
1.006.2012

Chirurgia

SONICflex bone, inserto n° 84

Trattamento: prelievo di blocchi ossei, osteotomie (distrazione, bone splitting).
In caso di sostanza corticale dell'osso spessa lavorare eventualmente con rotazione

Forma: sega assiale

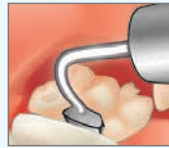

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.004.3879
1.006.2014

SONICflex bone, inserto n° 85

Trattamento: ideale per il distacco in sicurezza della membrana di Schneider nel rialzo del seno grazie alla forma a zampa di elefante

Forma: zampa d'elefante




Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.006.0645
1.007.1624

SONICflex bone, inserto n° 86

Trattamento: ideale per ricavare in modo semplice e veloce quantitativi maggiori di osso, soprattutto per l'aumento dell'osso

Forma: Raschietto

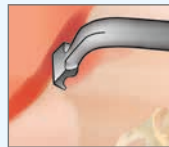

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.006.0741
1.007.1625

SONICflex bone, inserto n° 87

Trattamento: ideale per tagli stretti, per il distacco dei legamenti

Forma: sega assiale, lame intercambiabili
spessore lama: 0,15 mm



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS
lama (5 pz.)

1.006.1406
1.007.1627
1.006.1405

Accessori:



Codice: chiave dinamometrica

1.000.4887



Codice: cassetta sterile

0.411.9101



Codice: chiave


0.411.0892



Codice: raccordo per l'apporto di soluzione fisiologica, per SONICflex 2003
raccordo per l'apporto di soluzione fisiologica, per SONICflex 2008

1.000.6296
1.006.5966

Chirurgia

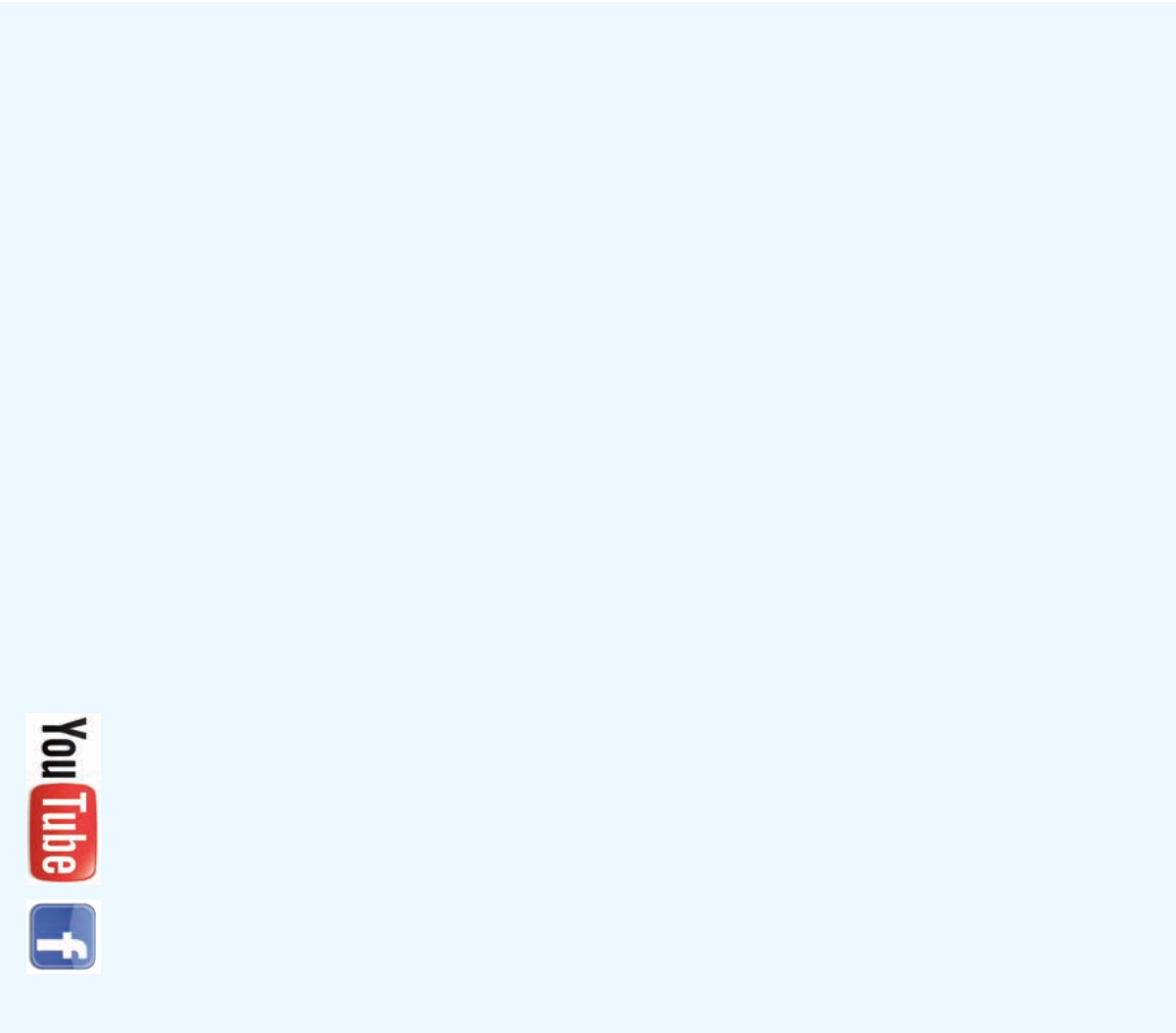

KaVo. Dental Excellence.

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban