


KaVo SONICflex® quick 2008/L · SONICflex® 2003/L

Das effiziente Multitalent für Ihre Praxis.

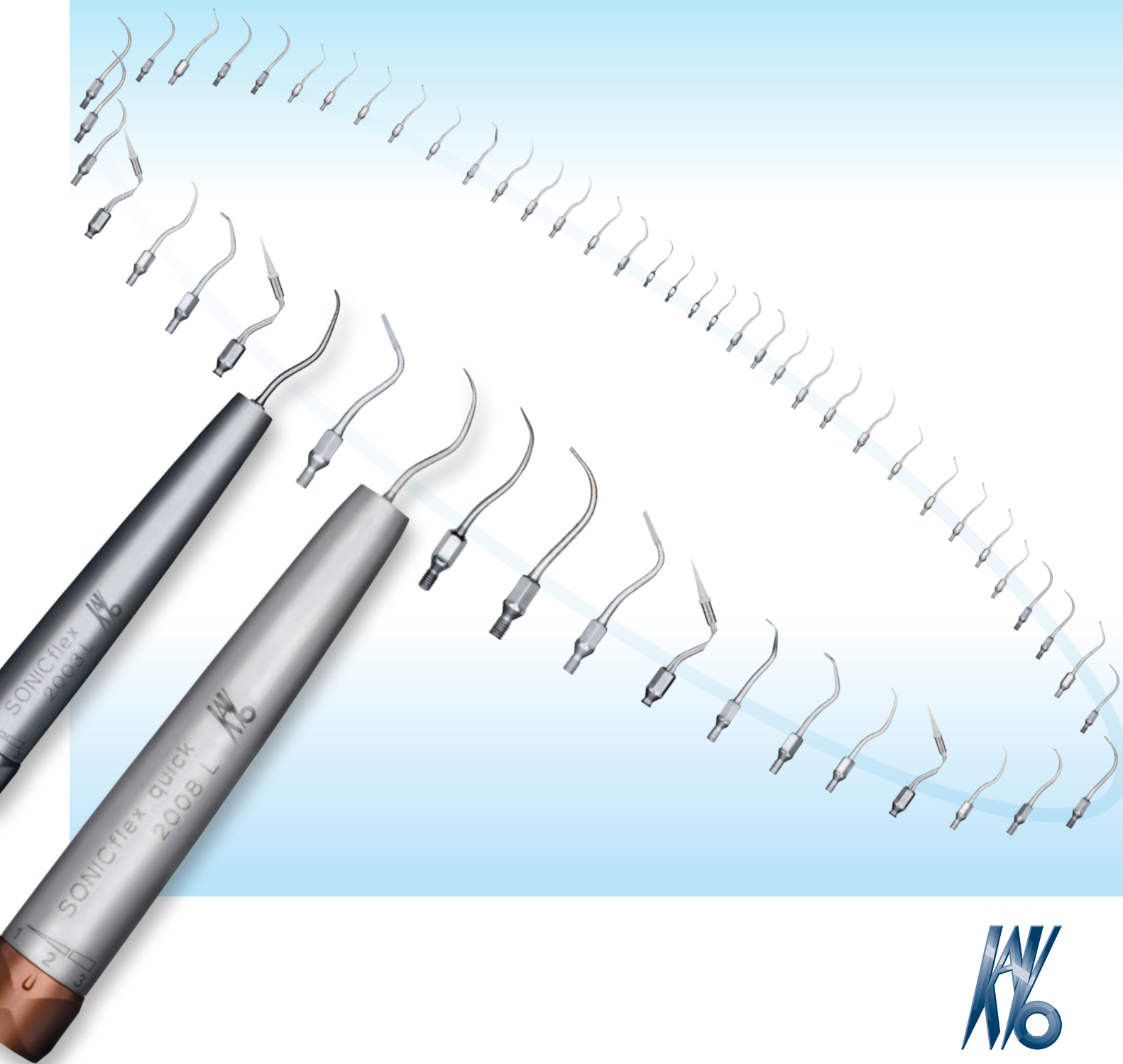

KaVo. Dental Excellence.



Höchste Vielfalt – auf die Spitze gebracht.

Immer mehr Patienten erkennen die Notwendigkeit einer regelmäßigen Prophylaxe für den Erhalt gesunder Zähne. Dabei legen sie besonderen Wert auf eine schonende Behandlung. KaVo SONICflex ist einfach in der Anwendung und angenehm in der Behandlung und damit auch perfekt zur Prophylaxe geeignet. So können Sie Patienten noch stärker an sich binden und vom langfristigen Trend zur Prävention profitieren.

Universeller und passgenauer Einsatz.

Durch die umfassenden Möglichkeiten, die Sie mit KaVo SONICflex haben, wird es schon in Kürze eines Ihrer am meisten eingesetzten Instrumente. Dank zahlreicher Spitzen stellt es sich exakt auf Ihre Anforderungen ein.

Höchste Vielfalt – Höhepunkte und Vorteile für Sie:

- Über 50 Spitzen und damit mehr Einsatzmöglichkeiten als alle anderen Aircaler
- Für sämtliche Anwendungsbereiche
- Die Grundlage für eine erfolgreiche minimalinvasive Behandlung

Schonende Behandlung – angenehmer für Ihre Patienten.

Angenehm behandelte Patienten kommen gerne wieder.

Mit KaVo SONICflex genießen Ihre Patienten eine deutlich sanftere Behandlung. Durch niedrige Schallfrequenz und lange Wege der elliptischen Bewegung bleibt die Wärmeentwicklung gering. Zudem wird die Zahnschubstanz geschützt, da das Instrument mit geringem Anpressdruck arbeitet. Bei aller Leistungsstärke behandeln Sie mit KaVo SONICflex spürbar angenehmer und äußerst zahnschonend.

Patientenkomfort – Höhepunkte und Vorteile:

- Angenehme Behandlung
- Substanzschonend
- Sanfte Oszillationen, besonders bei schmerzempfindlichen Patienten geeignet
- Geringe Hitzeentwicklung



Effizienz und Höchstleistung – einfacher für Sie.

Der einfache Dreh für effektives Arbeiten.

Mit Ihrem KaVo SONICflex ist der Spitzenwechsel ganz einfach: Dank eines von KaVo patentierten Verfahrens lassen sich Spitzen mit nur einer Umdrehung einfach und schnell wechseln. Dies spart Ihnen kostbare Zeit und garantiert einen effektiven Arbeitsablauf ohne unnötige Unterbrechungen.

Von KaVo patentiert: Einfacher und schneller Spitzenwechsel mit nur einer Umdrehung.



KaVo SONICflex® – Höhepunkte und Vorteile für Sie:

- Breitestes Indikationen- und Einsatzspektrum von allen Sonic Scalern inkl. Prophylaxe für schonende Behandlungen
- Einfacher und schneller Spitzenwechsel – garantiert effizientes Arbeiten, spart Zeit und verhindert unnötige Unterbrechungen in Ihrem Arbeitsablauf
- Sehr hohe Abtragsleistung, bis zu 50 % mehr Leistung als das Vorgängermodell – hartnäckige Beläge lassen sich mühelos entfernen
- Keine Zusatzgeräte notwendig, einfach auf die KaVo MULTiflex- oder Sirona-Kupplung stecken – ganz ohne lästiges Kabelgewirr
- Beste Ausleuchtung: 25.000 Lux für entspannte Sicht ohne Ermüdung der Augen – auch mit LED erhältlich
- Wesentlich leiser als vergleichbare Anbieter (bis zu 15 dB) – Gesundheitsschutz für Praxisteam und Patienten
- Bewährte KaVo-Qualität – KaVo SONICflex 2003 L bzw. 2008 L sind bereits die dritte Scaler-Generation bei KaVo, 25 Jahre Wissen und Erfahrung sind darin gebündelt

Ihr täglicher Vorsprung in Sachen Leistungsstärke.

Mit Ihrem KaVo SONICflex verfügen Sie über den stärksten und leisesten Airscaler seiner Klasse. Er ist mit Sicherheit das Instrument mit dem breitesten Einsatzspektrum. Je nach Indikation unterstützt er Sie tatkräftig mit einstellbaren Leistungsstufen – stark und präzise.


KaVo SONICflex® quick 2008 L und KaVo SONICflex® LUX 2003 L – einstellbare Leistung für jede Indikation.

Leistungsstufen	Amplitude	Frequenz	Lautstärke	Indikationen
Stufe 1	120 µm	6000 Hz	61 dB (A)	Finieren und besonders schonendes Arbeiten
Stufe 2	160 µm	6000 Hz	69 dB (A)	Präparieren und Belagse Entfernung
Stufe 3	240 µm	6000 Hz	71 dB (A)	Kraftvolles Präparieren und Belagse Entfernung

Ihre Effizienz spürbar im Griff.

Ihr KaVo SONICflex ist mit der besonders robusten und griffigen Plasmatec-Beschichtung ausgestattet. Dank dieser metallkeramischen Oberfläche halten Sie Ihr KaVo SONICflex noch sicherer in der Hand. Ihre Finger sind bei der Behandlung entspannter, und Sie profitieren vom angenehm warmen Greifgefühl.

Die Plasmatec-Oberfläche ist mit der KaVo Hygieneversiegelung versehen. Sie widersteht auch der Reinigung im Thermodesinfektor, ist bis 135° C sterilisierbar und erfüllt damit die aktuellen Hygiene-Richtlinien (wie z. B. RKI) – ein wichtiges Hygiene-Plus für Ihre Praxis.

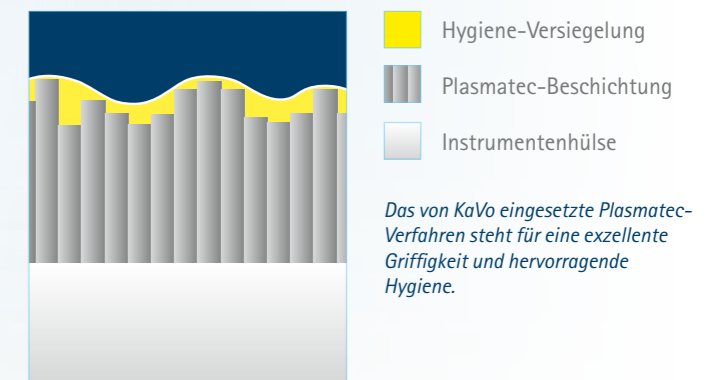

Adapter für die validierte Wiederaufbereitung der SONICflex Spitzen z.B. für den Miele Thermodesinfektor

Unsere Spitzenleistung – von Prophylaxe, Parodontologie und Endodontie über ...

Spezialisten, die Sie täglich unterstützen.

Ganz gleich, wo die Behandlungsschwerpunkte Ihrer Praxis liegen. Durch die umfassende Spitzenauswahl halten Sie mit KaVo SONICflex immer das richtige Instrument in der Hand. Stellen Sie sich Ihr persönliches Sortiment an Spitzen zusammen und erweitern Sie es ganz nach Bedarf. So können Sie in allen Behandlungssituationen beste Ergebnisse erzielen – einfach und angenehm für Ihre Patienten!



Perfekte Prophylaxe.
Ganz einfach für Sie und angenehm für Ihre Patienten.

Prophylaxe und Parodontologie

5
6
7
8

SONICflex® scaler


- Spitzenvielfalt für nachhaltige Zahnsteinentfernung
- Reinigung von Taschen mit geringer Tiefe



60
61 li.
62 re.

SONICflex® paro


- Verschiedene Spitzen für eine minimalinvasive, schonende und effiziente Reinigung von Parodontaltaschen bis 9 mm Tiefe

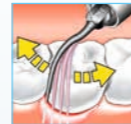

48

SONICflex® clean

- Breites Spektrum vibrierender Bürstchen
- Für sanftes Reinigen und Polieren

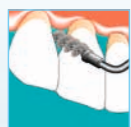

SONICflex® paro Zubehör

- Zwischenstück zur Zufuhr medikamentöser Flüssigkeit, z. B. steriler Kochsalzlösung (Best.-Nr. 1.000.6296)

Prophylaxe und Parodontologie

48

SONICflex® implant

- Effektives Entfernen von subgingivalen Belägen und Konkrementen
- Keine Abrasion, kein Aufrauen
- Einweg-Reinigungsaufsatz, dadurch keine Übertragung von Krankheiten



24
25
26
27

SONICflex® root planer

- Zur mühelosen Bearbeitung entlegener oder enger Furkationsbereiche




Endodontie

66
67
68
69
70
96

SONICflex® endo

Spezielles Spitzensortiment zum

- Suchen der Kanäle
- Entfernen von weichen Materialien bei der Revision
- Ausgestalten der Kanaleingänge
- Ausgestalten des Pulpenkavums zur koronalen Wurzelauflbereitung
- Reinigung und Spülung des Wurzelkanals (Spitze 96 in ISO Größen 0,15, 0,20 und 0,25 erhältlich)

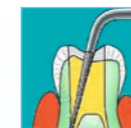

56
16
20
55
57
17
21

SONICflex® retro


- Retrograde Wurzelkanalaufbereitung mit kontrawinkligen, diamantierten Spitzen
- Verhinderung von Wurzelschäden durch Haarrisse, Unterstützung der Zahnstabilität, Schonung des periapikalen Knochens
- Achsengenaue Präparation möglich






... minimalinvasive Kariestherapie und Präparation ...

Minimalinvasive Kariestherapie

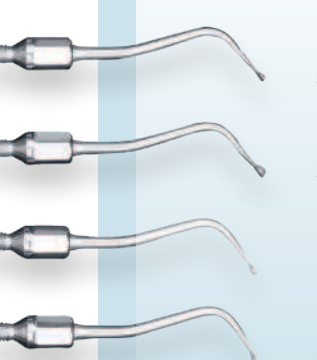

30 

32 **SONICflex® microinvasive**

- Spezielles Spitzensystem für kleine, schwer zugängliche Läsionen im Approximalbereich
- Einseitig diamantierte Spitzen ermöglichen den direkten Zugang zur Erstläsion von okklusal oder bukkal
- Erhaltung der gesunden Zahnsubstanz

31


33




45 

SONICflex® seal

- Aufbereiten von Fissuren
- Die perfekte Ergänzung zum KaVo DIAGNOdent



58 

SONICflex® bevel

- Einseitig diamantierte Spitzen zur gezielten Abschrägung präparierter Kleinstläsionen
- Optimierung der Klebung
- Minimierung des Randspalts

59



42 

43 **SONICflex® cariex D + TC**

- Minimalinvasives Entfernen von kariösem Dentin
- Cariex TC: Entfernen von großen Kariesläsionen
- Cariex D: Entfernen von kleinen Kariesläsionen mit der Möglichkeit, die Kavität auszugestalten

71

72

Präparation



49 

50 **SONICflex® prep gold**

- Einseitig diamantierte Präparationsspitzen für das Finieren der Kavitätenränder, die speziell für Gold-Inlays und Teilkronen entwickelt worden sind
- Die Ansatzgeometrie für Gold-Inlays und Teilkronen wird genau übertragen



51 

52 **SONICflex® prep ceram**

- Für Inlays/Onlays
- Zur Finierpräparation von Kavitätenrändern, überträgt die Geometrie der Arbeitsspitzen direkt auf die Zahnsubstanz
- Keine Hinterschnitte mehr bei laborgefertigten In- bzw. Onlays



34 

35 **SONICflex® prep CAD/CAM**

- Ideale Gestaltung der Kavitätenränder für CAD-/CAM-Systeme z. B. EVEREST, CEREC



12 

SONICflex® cem


- Sanftes und präzises Einsetzen von Inlays
- Reduktion des Randspalts




97 

98 **SONICflex® prep crown**

- für exakt finierte Kronenpräparation

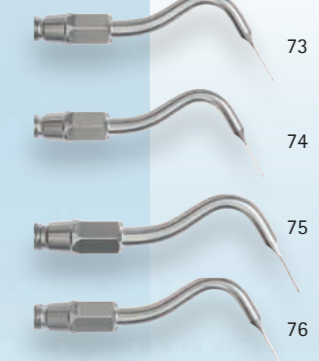

73 

74 **SONICflex® stripping / shaping**

- Separation vor Beginn der Kronenstumpfpräparation
- Abrundung scharfer Übergänge am approximalen Präparationsgrenzverlauf im Rahmen der Kavitätspräparation
- Anatomische Ausgestaltung der approximalen Flächen von Composite – Füllungen.
- Approximale Schmelzreduktion im Rahmen der Kieferorthopädie





75

76



... bis hin zu chirurgischen Anwendungen.

Chirurgie

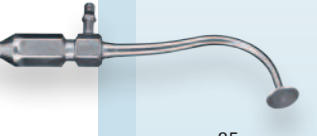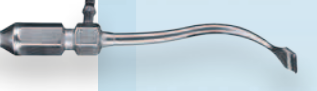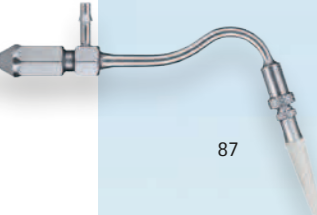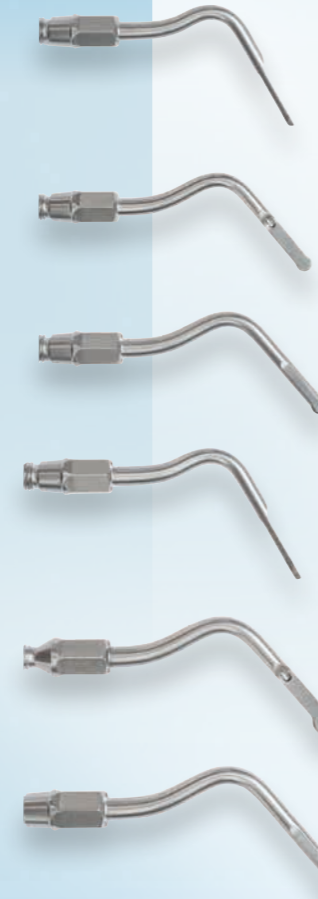 <p>80</p> <p>81</p> <p>83</p> <p>84</p>	 <p>85</p>  <p>86</p>  <p>87</p>	 <p>90</p> <p>91</p> <p>92</p> <p>93</p> <p>94</p> <p>95</p>
<p>SONICflex® bone</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einsetzbar für viele Bereiche in der Knochenbearbeitung (Osteotomien, Augmentation, Extraktionen und Sinuslift) 		<p>SONICflex® crown extension</p> <p>Chirurgische Kronenverlängerung ohne Lappenbildung zur Wiederherstellung der biologischen Breite bei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unsymmetrischen Arkadenverlauf • Gummy smile • Verletzung der biologischen Breite
<p>SONICflex® bone Spitze 85 (Elefantenfuß)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ideal zum sicheren Ablösen der Schneider'schen Membran beim Sinuslift durch die tellerartige Form 		
<p>SONICflex® bone Spitze 86 (Schaber)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ideal zur leichten und schnellen Gewinnung größerer Knochenmengen, speziell für den Sinuslift 		
<p>SONICflex® bone Spitze 87 (Säge)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ideal für präzise, schmale Schnitte, zum Lösen der Ligamente 		

KaVo bietet Ihnen für jeden Prophylaxe-Schritt die optimale Lösung.

So einfach für Sie.

So angenehm für Ihre Patienten.

	<p>1. Workflow Integration (z. B. mit KaVo Primus® 1058 TM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Professionelles Prophylaxesystem und zuverlässige Behandlungseinheit in einem • Höchste Zuverlässigkeit für erstklassige Prophylaxe- und Behandlungsergebnisse • Tisch-, Schwingen- und Cartversion mit flexibler Ausstattungsvielfalt für jeden Bedarf 	<ul style="list-style-type: none"> • Komfortable Patientenlagerung mit Softpolster • Wohlfühl-Ambiente für Ihre Patienten dank attraktiver Designs • Wirksames Patientenmarketing mit optionaler Multimedialösung 
	<p>2. Zahnbelagentfernung (z. B. mit KaVo SONICflex quick 2008 L)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einfacher und schneller Spitzenwechsel mit nur einer Umdrehung • Ein Instrument für extrem viele Anwendungsbereiche • Auch passend für Sirona-Kupplungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Sanfte Oszillationen, besonders bei schmerzempfindlichen Patienten geeignet • Hohes Patientenvertrauen dank schonender Behandlung • Geräuscharmer Aircaler mit Licht 
	<p>3. Zahnreinigung (z. B. mit KaVo PROPHYflex 3 - 2018)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 360° rotierende Düse für optimales und ermüdungsfreies Arbeiten • Komplet sterilisierbar und damit leicht in den Hygiene-Workflow integrierbar • Auch passend für Sirona-Kupplungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Perfekte Zahnreinigung für sichtbar bessere Ergebnisse • Sanfte und angenehme Behandlung mit PROPHYpearls • Vier individuelle Pulver-Geschmacksrichtungen (berry, cherry, mint und orange) 
	<p>4. Zahnpolitur (z. B. mit KaVo DURAtec 2933)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adaptierbar für Snap-on/Screw-in • Durch spezielle Abdichtung perfekt auf Prophylaxe ausgerichtet • Beste Reinigung durch ideale Verteilung der Paste dank 90°-Drehbewegung 	<ul style="list-style-type: none"> • Schonende Politur mit sanften Vibrationen • Spürbar angenehm • Sicht- und spürbar sauberere Zähne 
	<p>5. Karieserkennung (z. B. mit KaVo DIAGNOdent)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perfekte Befunde in allen Anwendungsfeldern • Sichere Diagnose bei Fissuren- und Approximalkaries sowie Konkrementerkennung in den Zahntaschen • Versteckte Karies frühzeitig diagnostizieren per Hightech-Laser • Kabellos 	<ul style="list-style-type: none"> • Erhalt und Schonung der gesunden Zahnschicht • Schmerzfreie Detektion • Höheres Patientenvertrauen dank sicherer Diagnose 

Umfassende Auswahl für Ihr gesamtes Anwendungsspektrum.

für SONICflex für SONICflex
2000 N, 2000 L, 2003 / L 2008 / L, 2008 S / LS

Anwendungsgebiet	KaVo Bezeichnung der Spitze	Nr.	Mat. Nummer	Nr.	Mat. Nummer	
Zahnsteinentfernung	SONICflex scaler Spitze Universal	5	0.571.5171	5A	1.005.8949	
	SONICflex scaler Spitze Sichel	6	0.571.5181	6A	1.005.8950	
	SONICflex scaler Spitze Perio	7	0.571.5179	7A	1.005.8951	
	SONICflex scaler Spitze Perio extra lang	8	0.571.5371	8A	1.006.1953	
	SONICflex scaler Spitze Spitzensatz	Set	1.000.4983	Set A	1.005.9328	
	SONICflex Spitze für Bürstenaufsätze	48	0.571.0401	48 A	1.006.1982	
Reinigung der Wurzeloberfläche	SONICflex paro Spitze lang, gerade	60	0.571.7402	60A	1.006.1934	
	SONICflex paro Spitze lang, links	61	0.571.7412	61A	1.006.1935	
	SONICflex paro Spitze lang, rechts	62	0.571.7422	62A	1.006.1936	
	SONICflex paro Spitzensatz	Set	0.571.0371	Set A	1.006.2020	
	SONICflex rootplaner Spitze Knopse, klein, links	24	0.571.5621	24A	1.006.1957	
	SONICflex rootplaner Spitze Knopse, klein, rechts	25	0.571.5631	25A	1.006.1959	
	SONICflex rootplaner Spitze Knopse, klein universal	26	0.571.5641	26A	1.006.1961	
	SONICflex rootplaner Spitze, Knopse, groß, perio	27	0.571.5651	27A	1.006.1963	
	SONICflex Spitze implant.	48	1.003.8167	48A	1.006.2027	
	SONICflex retro Spitze Isthmus, links	56	0.571.7322	56A	1.006.2040	
Retrograde Wurzelkanalbehandlung	SONICflex retro Spitze Isthmus, rechts	57	0.571.7332	57A	1.006.2041	
	SONICflex retro Spitze Zylinder, klein, links	16	0.571.5541	16A	1.006.2036	
	SONICflex retro Spitze Zylinder, klein, rechts	17	0.571.5581	17A	1.006.2035	
	SONICflex retro Spitze T-Form, klein, links	20	0.571.5521	20A	1.006.2037	
	SONICflex retro Spitze T-Form, klein, rechts	21	0.571.5561	21A	1.006.2038	
	SONICflex retro Spitze Frontzahn	55	0.571.7342	55A	1.006.2039	
	SONICflex retro Spitze Spitzensatz	Set	0.571.0381	Set A	1.006.2034	
	SONICflex endo Spitze Knopse groß, diamantiert	66	1.000.5825	66A	1.006.1992	
	SONICflex endo Spitze konisch 125°, diamantiert	67	1.000.5822	67A	1.006.1994	
	SONICflex endo Spitze konisch 112°, diamantiert	68	1.000.5823	68A	1.006.1996	
Auffinden und Aufbereiten der Wurzelkanäle	SONICflex endo Spitze Knopse klein, diamantiert	69	1.000.5827	69A	1.006.1998	
	SONICflex endo Spitze konisch 117°, nicht diamantiert	70	1.000.5821	70A	1.006.2000	
	SONICflex endo clean Spitze 96	96	1.008.5163	96A	1.008.5164	
	SONICflex endo clean set	Set	1.006.2045	Set A	1.007.1142	
	SONICflexendo clean Nadeln 015	-	1.006.2042	-	1.006.2042	
	SONICflex endo clean Nadeln 020	-	1.006.2043	-	1.006.2043	
	SONICflex endo clean Nadeln 025	-	1.006.2044	-	1.006.2044	
	SONICflex seal Spitze	45	1.000.8323	45A	1.007.1506	
	SONICflex micro Torpedo Spitze mesial, diamantiert	28	0.571.6741	28A	1.006.1965	
	SONICflex micro Torpedo Spitze distal, diamantiert	29	0.571.6731	29A	1.006.1967	
Minimalinvasive Kariestherapie	SONICflex micro Spitze, kleine Halbkugel, mesial, diamantiert	30	0.571.6811	30A	1.006.1969	
	SONICflex micro Spitze, kleine Halbkugel, distal, diamantiert	31	0.571.6801	31A	1.006.1971	
	SONICflex micro Spitze, große Halbkugel, mesial, diamantiert	32	0.571.6831	32A	1.006.1973	
	SONICflex micro Spitze, große Halbkugel, distal, diamantiert	33	0.571.6821	33A	1.006.1975	
	SONICflex bevel, mesial, diamantiert	58	0.571.7392	58A	1.006.1988	
	SONICflex bevel, Spitze distal, diamantiert	59	0.571.7382	59A	1.006.1990	
	SONICflex caries D Spitze, Kugelform, klein, diamantiert	42	0.571.7105	42A	1.006.1980	
	SONICflex caries D Spitze, Kugelform, groß, diamantiert	43	0.571.7167	43A	1.006.1981	
	SONICflex caries TC Spitze, Kugelform, klein, Hartmetall	71	1.000.7362	71A	1.006.2002	
	SONICflex caries TC Spitze, Kugelform, groß, Hartmetall	72	1.000.7363	72A	1.006.2004	
Präparation	SONICflex prep gold Spitze mesial, diamantiert	49	0.571.7212	49A	1.006.1983	
	SONICflex prep gold Spitze distal, diamantiert	50	0.571.7222	50A	1.006.1984	
	SONICflex prep ceram Spitze, mesial, diamantiert	51	0.571.7262	51A	1.006.1985	
	SONICflex prep ceram Spitze, distal, diamantiert	52	0.571.7272	52A	1.006.1986	
	SONICflex prep CAD/CAM Spitze mesial, diamantiert	34	1.002.1984	34A	1.006.1977	
	SONICflex prep CAD/CAM Spitze distal, diamantiert	35	1.002.1986	35A	1.006.1979	
	SONICflex cem Spitze	12	0.571.5431	12A	1.006.2021	
	SONICflex crown prep 97 Radius	97	1.008.6383	97A	1.008.6384	
	SONICflex crown prep 98 Stufe	98	1.008.6385	98A	1.008.6386	
	SONICflex stripping mesial	73	1.011.2993	73A	1.011.2994	
	SONICflex stripping distal	74	1.011.2995	74A	1.011.2996	
	SONICflex shaping mesial	75	1.011.2997	75A	1.011.2998	
	SONICflex shaping distal	76	1.011.2999	76A	1.011.3000	
	Chirurgie	SONICflex bone Spitze, Kugel groß, diamantiert, Sinus Boden Evaluation	81	1.004.3876	81A	1.006.2008
		SONICflex bone Spitze, Kugel groß, undiamantiert, Sinus Boden Evaluation	82	1.004.3877	82A	1.006.2010
SONICflex bone Spitze, Säge sagittal		83	1.004.3878	83A	1.006.2012	
SONICflex bone Spitze, Säge axial		84	1.004.3879	84A	1.006.2014	
SONICflex bone Spitze Elefantenfuß		85	1.006.0645	85A	1.007.1624	
SONICflex bone Spitze Scratcher		86	1.006.0741	86A	1.007.1625	
SONICflex bone Spitze Säge		87	1.006.1275	87A	1.007.1627	
SONICflex bone Spitze Vierkant, für bone splitting		80	1.004.3875	80A	1.007.2006	
SONICflex bone Spitzensatz		Set	1.004.3874	Set A	1.006.2033	
SONICflex crown extension 020		90	1.011.3001	90A	1.011.3002	
Minimalinvasive Kronenverlängerung	SONICflex crown extension 020	91	1.011.3003	91A	1.011.3004	
	SONICflex crown extension 020	92	1.011.3005	92A	1.011.3006	
	SONICflex crown extension 030	93	1.011.3007	93A	1.011.3008	
	SONICflex crown extension 030	94	1.011.3009	94A	1.011.3010	
	SONICflex crown extension 030	95	1.011.3011	95A	1.011.3012	



Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban