

TD SPLITFIX

Funktionell-ästhetische Modelle erleichtern die tägliche Arbeit und sollten selbstverständlich sein. Nur auf präzisen Splitcast-Modellen kann zeitsparend und qualitativ hochwertig gearbeitet werden. Es ist sehr einfach, diesen entscheidenden Grundstein zu legen!
 Functional, aesthetic models facilitate the daily work and should be a matter of course. Only split-cast models make a time-saving and excellent work possible. It is very simple to lay the foundation to perfect work!

das ABC der Modellherstellung


→ Zwei Arbeitsweisen

1. Magnet im Modell
2. Magnet in der Sockelplatte

the ABC of model preparation

→ Two different systems:

1. magnet in the model
2. magnet in the plate

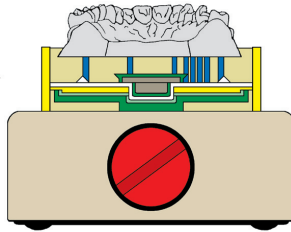


Modellherstellung mit Kontrollsockel in einem Arbeitsgang/ model-casting and split-casting in one operation:

1.




Entsprechend der Zahnkranzgröße passende SPLITFIX-Platte auswählen
 acc. to model size choose the appropriate SPLITFIX plate in yellow, red or blue

2.

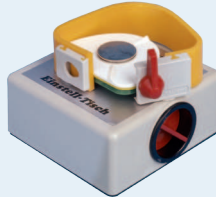

Platzierung der SPLITFIX-Platte auf dem Tisch des Einstellgerätes
 place chosen plate onto the height adjuster

3.

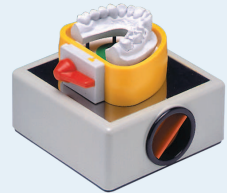

Höheneinstellung bei geöffneter Manschette (2-3 mm über der Basis des Zahnkranzes)
 with open collar adjust the height in such a way that the upper margin of the collar jutted out the model base by about 2-3 mm

4.



Für optimale Ergebnisse empfiehlt es sich, den Gips mind. eine Stunde lang aushärten zu lassen
 for optimum results we recommend to allow the plaster to harden for about 1 hour

5.



Das Trimmen des Sockels ist nicht zwingend erforderlich – Minimierung des Expansionsrisikos
 trimming of the model base is not absolutely necessary - minimisation of expansion risk

6.




Die spiegelglatte Basis des Modells
 the glassy base surface of the model

TD SPLITFIX



Grundausrüstung
BASE Kit


Je 2 Sockelplatten mit integriertem Magnet in rot, blau + gelb,
6 Haftplatten, je 1 Manschette in rot, blau + gelb, 1 Einstellgerät
ea. 2 base plates with integrated magnet in red, blue and yellow,
6 counter plates, ea. 1 collar in red, blue and yellow, 1 height adjuster

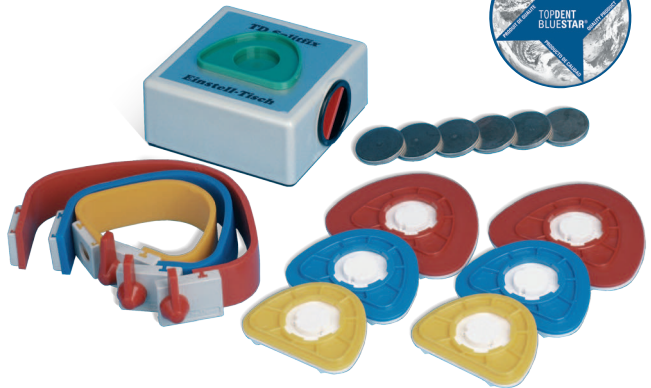

REF 04420S

SPLITFIX Einstellgerät
HEIGHT adjuster

Zur Höheneinstellung
des Primärsockels
for height adjusting of
model base prior
REF 04412

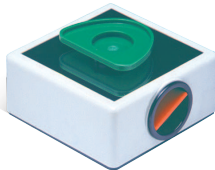

Sockelplatten mit
integriertem Magnet
Base Plates with
integrated magnet




10 St./ pcs.
rot groß/ red large
blau mittel/ blue medium
gelb klein/ yellow small

REF 04401M
REF 04403M
REF 04405M

Haftplatten,
verzinkt
Counter plates,
zinc-coated

20 St./ pcs.
REF 04408

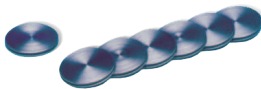

Manschetten
Collars

5 St./ pcs.
rot groß/ red large
blau mittel/ blue medium
gelb klein/ yellow small



REF 04409
REF 04410
REF 04411

Gemeinsam für gesunde Zähne
Together for healthy teeth

www.kkd-topdent.de
www.kkd-topdent-shop.de



Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban