

TD SPLITFIX

Funktionell-ästhetische Modelle erleichtern die tägliche Arbeit und sollten selbstverständlich sein. Nur auf präzisen Splitcast-Modellen kann zeitsparend und qualitativ hochwertig gearbeitet werden. Es ist sehr einfach, diesen entscheidenden Grundstein zu legen! Functional, aesthetic models facilitate the daily work and should be a matter of course. Only split-cast models make a time-saving and excellent work possible. It is very simple to lay the foundation to perfect work!

das ABC der Modellherstellung


→ Zwei Arbeitsweisen

1. Magnet im Modell
2. Magnet in der Sockelplatte

the ABC of model preparation

→ Two different systems:

1. magnet in the model
2. magnet in the plate

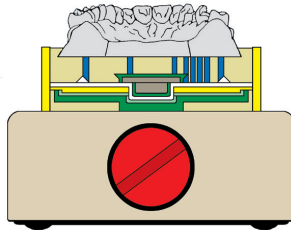


Modellherstellung mit Kontrollsockel in einem Arbeitsgang/ model-casting and split-casting in one operation:

1.




Entsprechend der Zahnkranzgröße passende SPLITFIX-Platte auswählen
acc. to model size choose the appropriate SPLITFIX plate in yellow, red or blue

2.

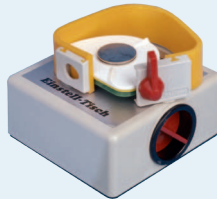

Platzierung der SPLITFIX-Platte auf dem Tisch des Einstellgerätes
place chosen plate onto the height adjuster

3.

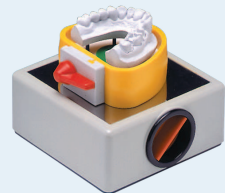

Höheneinstellung bei geöffneter Manschette (2-3 mm über der Basis des Zahnkranzes)
with open collar adjust the height in such a way that the upper margin of the collar jutted out the model base by about 2-3 mm

4.



Für optimale Ergebnisse empfiehlt es sich, den Gips mind. eine Stunde lang aushärten zu lassen
for optimum results we recommend to allow the plaster to harden for about 1 hour

5.



Das Trimmen des Sockels ist nicht zwingend erforderlich – Minimierung des Expansionsrisikos
trimming of the model base is not absolutely necessary - minimisation of expansion risk

6.



Die spiegelglatte Basis des Modells
the glassy base surface of the model

TD SPLITFIX



Grundausrüstung
BASE Kit

Je 2 Sockelplatten mit integriertem Magnet in rot, blau + gelb,
6 Haftplatten, je 1 Manschette in rot, blau + gelb, 1 Einstellgerät
ea. 2 base plates with integrated magnet in red, blue and yellow,
6 counter plates, ea. 1 collar in red, blue and yellow, 1 height adjuster

REF **04420S**



SPLITFIX Einstellgerät
HEIGHT adjuster

Zur Höheneinstellung
des Primärsockels
for height adjusting of
model base prior
REF **04412**



Sockelplatten mit
integriertem Magnet
Base Plates with
integrated magnet




10 St./ pcs.
rot groß/ red large
blau mittel/ blue medium
gelb klein/ yellow small

REF **04401M**
REF **04403M**
REF **04405M**

Haftplatten,
verzinkt
Counter plates,
zinc-coated

20 St./ pcs.
REF **04408**

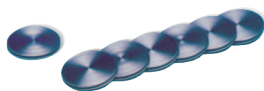

Manschetten
Collars

5 St./ pcs.
rot groß/ red large
blau mittel/ blue medium
gelb klein/ yellow small



REF **04409**
REF **04410**
REF **04411**

Gemeinsam für gesunde Zähne
Together for healthy teeth

www.kkd-topdent.de
www.kkd-topdent-shop.de



Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban