


TISSUE MANAGEMENT
Leitfaden



Unsere Tissue Management Produkte sind optimal aufeinander abgestimmt. Dank der austauschbaren Formulierungen und Instrumente können Behandlungsprotokolle, in Abhängigkeit vom klinischen Fall, individuell angepasst werden. Egal ob bei Abformungen, Klasse V Restaurationen oder Kronen - Sie nutzen immer auf das beste Produkt!

Selbstverständlich liegt die endgültige Entscheidung im Ermessen des Anwenders. Unsere Empfehlungen für den Einsatz der Tissue Management Produkte dienen als zusätzliche Orientierung.

TISSUE MANAGEMENT Leitfaden

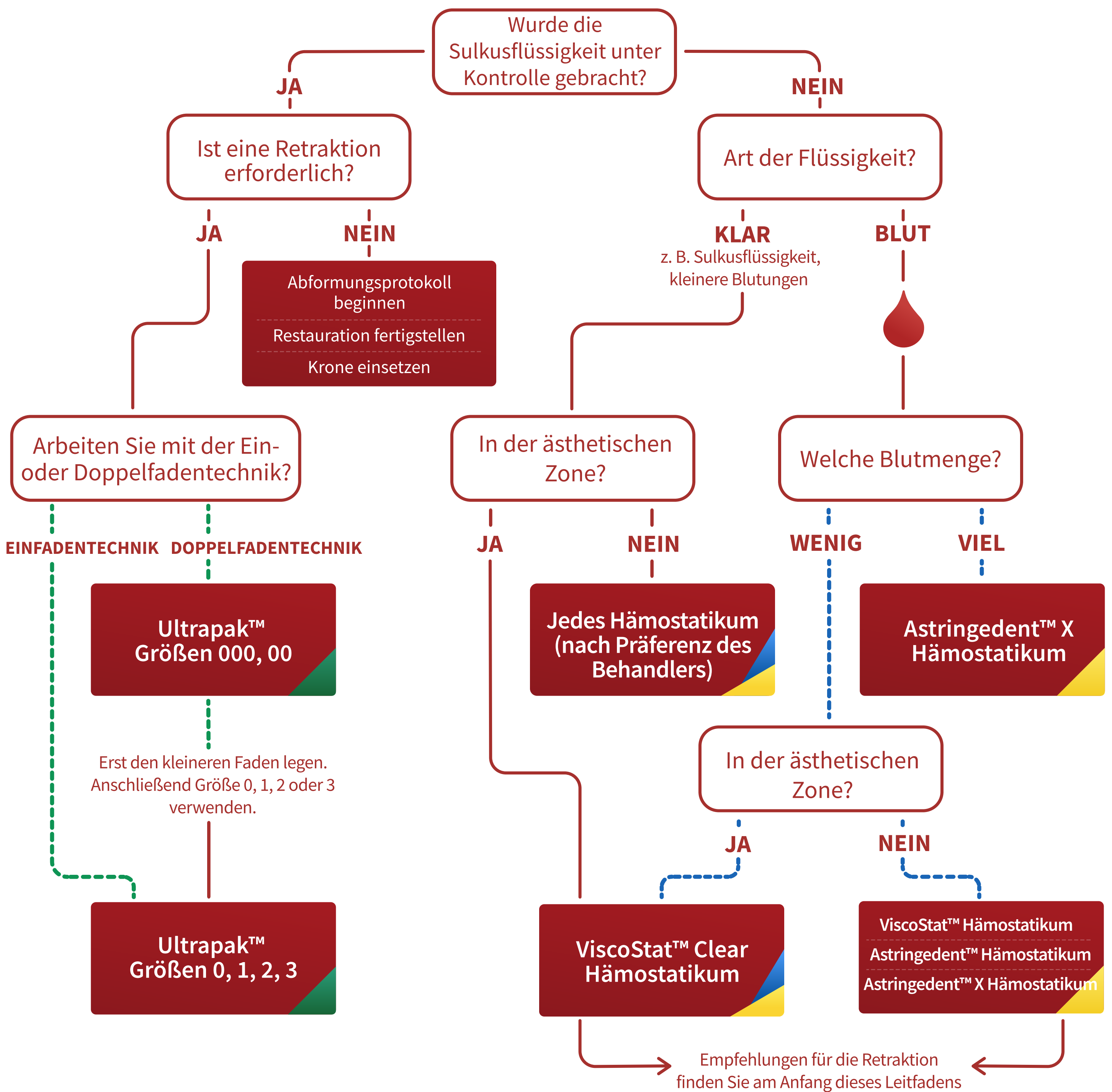

WICHTIG

--- Einreibetechnik

Reiben Sie das Präparat kräftig in den Sulkus ein. Unter festem Druck ist das gewählte Hämostatikum am wirksamsten.

--- Tränketechnik

Tränken Sie den ersten Faden in Hämostatikum.

▲ Gezahnte Ultrapak™ Legeinstrumente

Die speziell entwickelten Instrumente erleichtern das Legen von gestrickten Ultrapak Retraktionsfäden. Ihre dünnen Enden und feinen Verzahnungen üben Druck auf den Faden aus. Dadurch wird ein Abrutschen verhindert und die Gefahr einer Verletzung des gingivalen Attachments vermieden.

▲ Blue Mini™ Dento-Infusor™ Tip

- Zur Anwendung bei fragilem, heilendem Gewebe oder bei Empfindlichkeit.
- Ist lediglich die Kontrolle der Sulkusflüssigkeit erforderlich, ist das weichere Ende des Blue Mini™ Dento-Infusor™ Tips eventuell besser geeignet.

▲ Metal Dento-Infusor™ Tip

- Wirksame Applikation blutstillender Mittel. Eignet sich am besten für Blutungen (insbesondere schwere Blutungen) und die Entfernung von oberflächlichem Koagulum.
- Stumpfe, gebogene Kanüle mit einem weichen Bürsteende zum Infundieren und Reinigen des verletzten Sulkus.

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban