



# Traypurol®

BEWÄHRTES REINIGUNGSKONZENTRAT

# Traypurol®

## BEWÄHRTES REINIGUNGSKONZENTRAT

### Was ist Traypurol®?

Traypurol ist der ideale Helfer für die tägliche Reinigung von Instrumenten und Abformlöffeln in Ihrer Praxis! Traypurol löst zuverlässig Reste von Alginaten, Glasionomer-, Carboxylat-, Phosphat- und Zinkoxid-Eugenol-Zementen und ist für alle nicht oxidierenden Metalle und Kunststoffe geeignet. Außerdem ist es biologisch abbaubar und sehr materialschonend.

### Wie wird Traypurol® angewendet?

Die Anwendung ist denkbar einfach: Traypurol wird mit Wasser angesetzt und reinigt Löffel und Instrumente zuverlässig, indem diese in die Lösung gelegt werden. Die Materialreste werden durch die Traypurol-Lösung angelöst und lassen sich danach mühelos unter fließendem Wasser oder mit einer Bürste entfernen. Zudem ist Traypurol auch im Ultraschallgerät einsetzbar.

### In welchen Handelsformen ist Traypurol® erhältlich?

Traypurol ist in einer bewährten 1 Liter Flasche sowie im ökonomischen 5 Liter Kanister für den erhöhten Bedarf erhältlich.

### Ihre Vorteile

- Schnellere Wirkung
- Verbesserte Lösungseigenschaften
- Angenehm dezenter Geruch

### Handelsformen

- REF 2289 Flasche 1 l  
 REF 2290 Kanister 5 l  
 REF 2304 Dosierpumpe – Kanister 5 l



VOCO GmbH  
 Anton-Flettner-Straße 1-3  
 27472 Cuxhaven  
 www.voco.dental

**VOCO-Kundenservice**  
 Freecall: 00 800 44 444 555  
 Fax: +49 (0) 4721-719-2931  
 service@voco.de

Zu beziehen durch:

**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban